

INSTRUKTIONER TIL BRUG

Sengebord


Produktkode: TableTIM

1. Egenskaber

Sengebordet har form som en C-formet metalramme. Det har en justerbar top, hvor objekter kan placeres, og hjul med bremse for at sikre mobilitet og bevægelse over sengen.

2. Støttekomponenter:

- a. Ramme
- b. Base med hjul (2 sæt)
- c. Bordpladeramme
- d. Bordpladeaks
- e. Monteringsommerfugl
- f. Monteringsommerfugl med skrue
- g. Bushing
- h. Skrue med skive (2 sæt)
- i. Bordplade

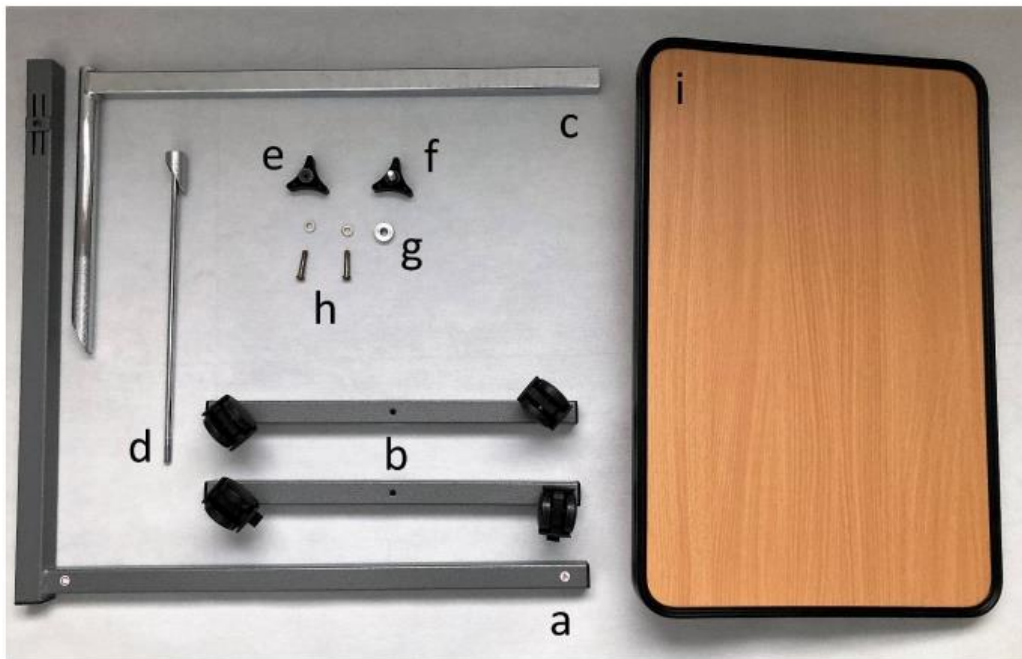

3. Anvendelse

Sengebordet er designet til brug direkte over en patients seng for at give en overflade til spisning, læsning eller skrivning mens man ligger i sengen. Produktet er designet til brug både under pleje på medicinske faciliteter og derhjemme.

4. Samling og justering

- Skru begge baser med hjul (b) til rammen (a) - husk at matche bogstavmærkerne korrekt - bogstavet "A" fra rammen til bogstavet "A" på basen med hjul, tilsvarende for bogstaverne "B" / "C" / "D",
- Efter at have drejet basen, placer den på 4 hjul og lås hjulbremsene for yderligere samling,
- Indsæt rammen af bordpladen (c) i det firkantede hul i rammen (a),
- Indsæt bordpladeaksen (d) i det skrå afskårne hul i bordpladerammen (c) på en sådan måde, at de to skrå flader overlapper,
- Indsæt ærmet (g) i det cirkulære hul i bordpladerammen (c) på den fremspringende gevind på en sådan måde, at den tidligere indsatte bordpladeaks (d) ikke flyttes,
- Skru monteringsommerfuglen (e) på den fremspringende gevind på bordpladeaksen (d) - stram ikke sommerfuglen for hårdt - stram den nok, så den ikke falder ud,
- Placer bordpladen (i) på den forberedte bordpladeramme. For at lette installationen af bordpladen, hold den med den ene hånd ved røret placeret på undersiden af bordpladen. Efter påføring af bordpladen, stram monteringsommerfuglen (e),
- Fastgør monteringsommerfuglen med skruen (f) i ramme hullet (a) og stram den.

Juster hældningen af bordpladen

- For at justere vinklen på bordpladen, løsner monteringsommerfuglen (e) placeret på siden af bordpladen.
- Efter indstilling af den korrekte vinkel, strammer monteringsommerfuglen (e).

Juster højden af bordpladen

- For at justere højden af bordpladen, løsner monteringsommerfuglen med skruen (f) placeret på baserammen (a).

- Efter indstilling af den korrekte højde, stram monteringsommerfuglen med skruen (f).

Bremser

- Lås hjulbremsene under brug af bordet.

4. Tekniske data

Dimensioner (længde x bredde)	60,5 cm x 40,2 cm
Bordpladens dimensioner	60 x 40 cm
Vinkeljustering af bordpladen	0° - 90°
Højdejustering	72 - 112 cm
Vægt	6,7 kg
Maks. kapacitet	10 kg
Hjuldiameter	1,50 "










5. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet bør ikke udsættes for direkte sollys, vand eller fugtighed.

6. Garantioplysninger

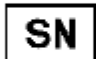Alle produkter distribueret af vores firma er dækket af en garanti, hvis vilkår er beskrevet i garantikortet, der er tilgængeligt på vores hjemmeside. Kontakt venligst forhandleren, hvor du købte produktet. Husk venligst, at købsbeviset (kvittering eller faktura) skal opbevares til garantiformål.

7. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		Manufacture date
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

