

BRUGSANVISNING

Firehjulet aluminiumsrollator

Produktkode: CARBON




1. Udførelse

En sammenklappelig firehjulet rollator, udført i et aluminiumsstel belagt m. farve m. metallisk glans. Udstyret m. et bredt polstret sæde, et blødt ryglæn og en indkøbskurv. Har højdejusterbare håndtag afsluttet m. ergonomiske greb og parkeringsbremse samt hjul m. et smalt tværsnit og en diameter på 8".

Rollatorens elementer:

- a. håndtag
- b. håndbremse
- c. låseskrue
- d. bremsekabler
- e. ryglæn
- f. låsepind
- g. tværstang
- h. tværstangbeslag
- i. indkøbskurv
- j. øverste bremsejustering
- k. nederste bremsejustering

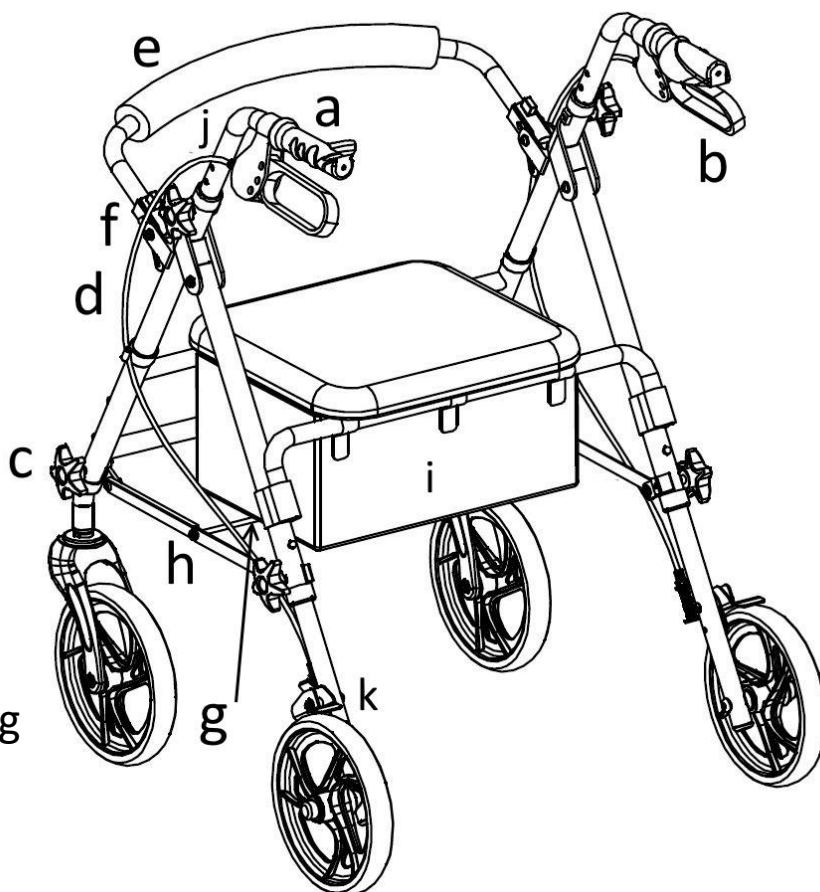

2. Anvendelse

En firehjulet rollator er et hjælpeudstyr beregnet for personer m. nedsat fysisk funktionsevne, der har brug for et stabilt greb og gangstøtte. Den anbefales også som hjælpemiddel til ældre personer m. dårlig balance, der forbedrer deres gangkomfort og sikrer dem mod fald. Takket være anvendelsen af rollatoren kan personer m. gangbesvær el. problemer m.

et komme op i stående stilling opretholde en aktiv hverdag. Rollatoren sikrer høj stabilitet, bedre støtte og sikkerhed under gangen.

3. Montering og justering af rollatoren

Monteringsdele:

- A. Rollatorstel
- B.1 Venstre støtteben til bagstel
- B.2 Højre støtteben til bagstel
- C.1 Venstre greb
- C.2 Højre greb
- D.1 Venstre støtteben til forstel
- D.2 Højre støtteben til forstel
- E. Låseskruer
- F. Ryglæn



Montering

- Fold rollatorstellet (A) ud ved at klappe begge tværstangbeslag fladt op (de udragende dele, der fastgør ryglænet, vender mod stallets/rollatorens front).

- Sæt venstre bagerste støtteben (B.1) ind i venstre bagerste hul i stellet ved at trykke på låsepinden (hjulet vender udad). Lås låsepinden i det valgte hul i stellet (stellet er forsynet m. to huller, alt efter den ønskede rollatorhøjde). Lås støttebenet fast ved at spænde låseskruen (E)
- Venstre bagerste støtteben (B.1) er forbundet m. venstre rollatorhåndtag (C.1) vha. et bremsekabel. Sæt venstre håndtag ind i venstre hul i stellet ved at indstille den ønskede håndtagshøjde. Bremsekablet føres udad og fastgøres i plastskinnen på stellet. Lås håndtaget fast ved at spænde låseskruen (E)
- Montér højre bagerste støtteben (B.2) og højre håndtag (C.2) på tilsvarende vis. Husk at spænde låseskruerne (E)
- Sæt venstre forreste støtteben (D.1) ind i venstre forreste hul i stellet ved at trykke på låsepinden. Lås pinden fast i hullet i stellet (stellet er forsynet m. to huller, alt efter den ønskede rollatorhøjde). Lås støttebenet fast ved at spænde låseskruen (E)
Bemærk: alle fire støtteben skal monteres til samme højde.
- Montér højre forreste støtteben (D.2) på tilsvarende vis. Husk at spænde låseskruen (E).
- Montér ryglænet (F) ved at sætte begge låsepinde i låst position.

Udfoldning og sammenfoldning af rollatoren

- For at folde den monterede rollator sammen skal du løfte sædet og trække i tværstangen, der er anbragt under indkøbskurven, og dernæst folde rollatorstellet sammen.
- For at folde den monterede rollator ud skal du klappe stellet op og trykke på tværstangen, der er anbragt under indkøbskurven, indtil stangbeslagene er klappet fuldt ud. Sænk dernæst sædet på plads.

Bremsefunktion

- For at standse rollatoren skal du flytte bremsestangen opad mod håndtaget, og dernæst holde den i denne position i et stykke tid.

- Under parkering el. når rollatoren bruges som sæde, skal du låse bremsen m. en bremseklemme ved at trække bremsehåndtaget nedad.
- For at frigøre bremsen, skal du trække bremsehåndtaget opad.

Højdejustering af håndtagene

For at justere håndtagene i højden skal du løsne låseskruerne, der er anbragt yderst på stellet, vælge den ønskede rørhøjde og spænde låseskruerne til igen.

Bemærk! Håndtagene skal indstilles i samme højde.

Justering af bremseser

Øverste bremsejustering: løsn kabelhåndtaget, træk passende længde af kablet ud og dernæst lås det fast ved at tilspænde klemmeskruen.

Nederste bremsejustering: løsn fastgørelsesskruen m. flad nøgle, træk i det sorte bremsekabel, så kablets stramning justeres, og spænd fastgørelsesskruen til igen.

4. Teknisk specifikation

Totalbredde	64 cm
Totallængde	66,5/72 cm
Sædebredde	45 cm
Totalhøjde	77-95 cm
Sædehøjde fra underlaget	49,5/54,5 cm
Vægt	7,2 kg
Maks. tilladt belastning	100 kg
Maks. tilladt belastning af kurven	5 kg
Stelfarve	sort

5. Bemærkninger og anvisninger

Timago International Group frasiger sig ethvert ansvar for u hensigtsmæssig anvendelse af rollatoren, manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvendelse af rollatoren i strid med formålet.

6. Vedligeholdelse

Rollatorstellet skal rengøres m. en fugtig klud, og dernæst tørres grundigt af. Det er ikke tilladt at bruge aggressive poleringsmidler på grund af risiko for beskadigelse af beskyttelseslagene. Fjern løbende alle urenheder fra de bevægelige dele af rollatoren (beslag, klemmeskruer, låse).










7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet bør ikke udsættes for direkte sollys, vand og fugt.

8. Garantioplysninger

Produktet er omfattet af garantien. Garantivilkårene er beskrevet i garantikortet, som du fik udleveret. Gem købsbeviset (kvittering el. faktura) til garantiformål.

9. Mærkning

	Referencenummer		Producent
	Partinummer		Produktionsdato
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs brugsanvisningen nøje igennem
	Producenten har vurderet produktets forenelighed m. de væsentlige krav, der stilles til medicinsk udstyr.		

Kontakt vores forhandlere for at gøre dig bekendt med hele vores sortiment.

For nærmere oplysninger se hjemmesiden **www.timago.com**

Tak fordi du har valgt Timago produktet!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa *[ApS og K/S]*

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polen

Tlf.: +48 33 499 50 00

Telefax: +48 33 499 50 11

E-mail: info@timago.com



09/2021(I)