

Brugsvejledning til elektrisk scooter Mobility 210

Varenummer: CN210A

1. Introduktion

Tak for at have valgt en elektrisk scooter fra ARDEA MOBILITY by Moretti. Vores elektriske scootere er designet til at opfylde dine behov for praktisk, sikker og komfortabel transport. Læs denne brugervejledning grundigt, inden du bruger din scooter, for at sikre korrekt brug og vedligeholdelse.

2. Anvendelsesformål

Denne elektriske scooter er beregnet til personer med mobilitetsproblemer. Den må kun anvendes som beskrevet i denne vejledning.

⚠️ **Vigtigt!**

- Scooteren må kun anvendes af personer med intakt fysisk og mental tilstand.
- Brugeren må ikke være påvirket af alkohol eller medicin.
- Producenten fraskriver sig ansvar for skader som følge af ukorrekt brug.
- Producenten forbeholder sig ret til ændringer uden varsel.

3. Sikkerhed

3.1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

- Læs denne manual grundigt inden brug.
- Hold produktet væk fra varmekilder.
- Brug ikke scooteren som passagersæde i et køretøj.
- Maksimal brugervægt: 149 kg.
- Scooteren er ikke egnet til blinde personer.
- Børn under 12 år må ikke anvende scooteren.
- Brug altid sikkerhedssele, hvis din model har en.
- Hold altid fødderne på scooteren, mens du kører.
- Undgå at bruge scooteren på glatte eller snedækkede veje.

4. Teknisk specifikation

- **Maksimal hastighed:** 8 km/t

- **Rækkevidde:** Op til 20 km
- **Batteritype:** 2 x 12V 20Ah
- **Motor:** 270W
- **Maksimal hældning:** 12°
- **Vægt:** 58 kg (inkl. batterier)
- **Sædehøjdejustering:** Ja
- **Hjulstørrelse:** Forhjul 8", baghjul 9"

5. Montering og klargøring

Følg disse trin for at klargøre scooteren:

1. **Udpakning:** Kontrollér, at alle dele er intakte og ubeskadigede.
2. **Montering af styr:** Justér styrets position og fastgør det sikkert.
3. **Montering af sæde:** Placer sædet på basen, og sørg for, at det er låst korrekt.
4. **Tilslutning af batterier:** Forbind batterierne korrekt til scooteren.
5. **Test funktioner:** Kontrollér lys, bremses og horn inden brug.

6. Batteriets holdbarhed og opladning

- Oplad altid batteriet efter hver brug for at forlænge levetiden.
- Undgå at lade batteriet løbe helt tør for strøm, da dette kan forkorte batteriets levetid.
- Opbevar batteriet i et tørt miljø med moderate temperaturer.
- Batteriets kapacitet kan gradvist falde over tid – hvis du bemærker en markant nedsat rækkevidde, kan det være nødvendigt at udskifte batteriet.

6.1 Sådan oplader du batteriet

1. Sluk scooteren og sæt opladerstikket i ladestikket på scooteren.
2. Sæt opladeren i en stikkontakt.
3. Når batteriet er fuldt opladet, sluk for opladeren og fjern den fra stikkontakten.
4. Tag opladerstikket ud af scooteren.
5. Batteriet bør oplades i mindst 6-8 timer for en fuld opladning.

⚠️ **Vigtigt!**

- Brug kun den originale oplader til at oplade batteriet.

- Undgå at udsætte scooteren for ekstreme temperaturer.

7. Brug af scooteren

1. Indsæt nøglen i tændingen og drej til "ON".
2. Vælg en passende hastighed ved at dreje hastighedsknappen.
3. Tryk på gashåndtaget for at bevæge dig fremad eller baglæns.
4. For at standse, slip gashåndtaget og aktiver bremsen.

8. Elektromagnetisk kompatibilitet

- Scooteren er testet for elektromagnetisk interferens.
- Undgå brug af scooteren i nærheden af stærke elektromagnetiske felter.
- Hold afstand til radiobølger, mikrobølger og stærke elektriske enheder.

9. Vedligeholdelse og rengøring

- Rengør scooteren med en fugtig klud og mild sæbe.
- Tjek dæktrykket regelmæssigt.
- Oplad batteriet efter hver brug.
- Kontrollér regelmæssigt alle elektriske forbindelser.

10. Opbevaring og transport

- Opbevar scooteren i et tørt og rent miljø.
- Ved længere tids opbevaring skal batteriet oplades regelmæssigt.
- Scooteren kan adskilles i mindre dele for lettere transport.

11. Problemløsning

Problem	Mulig årsag	Løsning
Scooteren starter ikke	Batteri afladet	Oplad batteriet
Scooteren kører ujævnt	Dæktrykket er for lavt	Pump dækkene op
Lyset virker ikke	Løs forbindelse	Kontrollér ledningerne
Scooter kører langsomt	Batteriet er gammelt	Udskift batteriet

12. Garanti og service

- Scooteren leveres med fabriksgaranti.

- Kontakt din forhandler ved behov for reparation.

Tak for at have valgt Mobility 210. Vi ønsker dig en sikker og komfortabel kørsel!