

BRUGERVEJLEDNING

Elastisk håndledsstøtte

Produktkode: TGO-C OSN 408



1. Karakteristika

Elastisk håndledsstøtte er lavet af sømløst ortopædisk kompressionsstof. Tommelfingerstøtten forhindrer båndet i at glide ned. Moderne og rumligt stof er luftgennemtrængeligt og fjerner overdreven varme og fugt, hvilket begrænser udviklingen af bakterieflora. Håndledsstøtten kan påføres enten på venstre eller højre hånd.

2. Anvendelse

Håndledsstøtte bruges til at stabilisere leddet og lindre smerter, der opstår ved fysiske belastninger, bl.a. i sport.

Indikationer for brug:

- Smertesyndrom i led forårsaget af betændelse, overbelastning og mikroskader
- Avancerede degenerative ændringer af radio-karpalled og håndledsled
- Mindre drejninger og spændinger
- Kronisk ustabilitet

Kontraindikationer:

Må ikke bruges i tilfælde af:

- Hudafskrabning
- Eksem
- Sår og andre hudskader
- Efter påføring af varmende gel eller salve
- Individuelle kontraindikationer, som blev bestemt af lægen under samtale og fysisk undersøgelse

3. Noter

Timago International Group påtager sig ikke ansvar for ukorrekt vedligeholdelse af produktet, manglende overholdelse af sikkerhedsbestemmelser og misbrug.

4. Monteringsvejledning

Træk i den elastiske støtte på håndleddet og sæt tommelfingeren ind i tommelfingerhullet. Stabiliser håndleddet med brug af en rundtgående rem fastgjort med velcro.

Note! Kun korrekt afstemt størrelse garanterer reduktion af smerte.

Note! Langvarig brug kan resultere i reduktion af muskeltonus og dysfunktion af lemmer.

5. Tekniske data

STØRRELSE	HÅNDÅDSOMRÅDE (CM)
S	13-15
M	15-18
L	18-20
XL	20-22

6. Opretholdelse

- Håndvask i varmt vand. Må ikke tørretumbles, kloreres, stryges, blegemiddel, renses, bruge tørretumbler.
- Tør ved stuetemperatur langt fra intensiv varmekilde.

Note! Vedligeholdelsesinformation kan findes på materialeetiketten.










7. Opbevarings og transportbetingelser

Produktet bør ikke udsættes for direkte sollys, vand og fugt.

8. Garantioplysninger

Produktet er omfattet af garantien. Garantivilkårene er beskrevet i garantikortet, som du fik udleveret. Gem købsbeviset (kvittering el. faktura) til garantiformål.

9. Mærkning

	Referencenummer		Producent
	Partinummer		Produktionsdato
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs brugsanvisningen nøje igennem
	Producenten har vurderet produktets forenelighed m. de væsentlige krav, der stilles til medicinsk udstyr.		

Kontakt vores forhandlere for at gøre dig bekendt med hele vores sortiment.

For nærmere oplysninger se hjemmesiden **www.timago.com**

Tak fordi du har valgt Timago produktet!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



01/2025 (I)

