

Samlevejledning til

DYONE indendørs letvægtsrollator |

Varenummer: RP689

1. Generel information

Denne rollator er designet til nem samling og foldning uden brug af værktøj. De fleste trin er intuitive, men hvis du oplever udfordringer, kan en ven eller et familiemedlem muligvis hjælpe dig.

2. Samling og foldning

2.1 Kontrol før samling

Før du samler rollatoren, skal du sikre dig følgende:

- At begge støttehåndtagsrør er korrekt indsat i rammen og fastgjort med låseknopper og vingemøtrikker. Der må ikke være nogen bevægelse.
 - At håndtagsrørene er sikkert låst i hovedstøttedelen med vingemøtrikker og knopper.
 - At der ikke hænger genstande på rammen, da dette kan forvride rørene og påvirke stabiliteten.
 - At du er opmærksom på risikoen for at klemme fingre eller tøj under åbning og lukning.
-

2.2 Før brug – Sikkerhedskontrol

Inden du tager rollatoren i brug, skal du altid tjekke følgende:

- ✓ Alle dele er korrekt låst.
 - ✓ Alle skruer er stramme.
 - ✓ Sædet er sikkert låst – hvis ikke, må du ikke trykke yderligere på bunden.
 - ✓ Sædelåsen er korrekt indsat.
 - ✓ Slidtilstand på mekaniske dele, så rollatoren er sikker at bruge.
-

3. Samlevejledning

3.1 Før du går i gang

1. Pak rollatoren forsigtigt ud.
 2. Kontrollér, om der er skader fra transporten.
 3. Kontakt din forhandler, hvis der er synlige skader.
-

3.2 Sådan åbner du rollatoren

1. Placer rollatoren på et plant underlag.
 2. Træk i den forreste del af rammen, mens du bruger bagbenene som støtte.
 3. Indsæt håndtagsrørene i rammen.
 4. Drej låseknopperne, indtil de sidder sikkert fast.
-

3.3 Sådan folder du rollatoren sammen

1. Brug de laterale stænger som løftestang.
 2. Fold rollatorens forreste del tilbage, indtil den er helt sammenfoldet.
-

3.4 Justering af håndtagshøjde

1. Løsn sideknopperne ved at dreje dem mod uret.
2. Justér håndtagene til den ønskede højde.
3. Stram knopperne igen ved at dreje dem med uret.
4. Gentag for det andet håndtag, og sørg for, at begge håndtag er i samme højde.