

BRUGSANVISNING

Toiletkørestol til transportformål

Produktkode: FS 692




1. Udførelse

En toiletkørestol til transportformål er udført i et pulvermalet stålstel. Udstyret m. vipbare armlæn, der gør det lettere for personer m. betydeligt nedsat funktionsevne at komme ind og ud af kørestolen. Kørestolen er udstyret m. et blødt sæde, polstret m. et vandtæt materiale, som er let af rengøre. Kørestolen har fire drejelige hjul, hvoraf de to bagerste hjul er forsynet m. bremser, vipbare benstøtter og en bækkenspand. Kørestolens konstruktion gør det muligt at køre ind over toilettet. **Sættet indeholder:** er kørestolsstel, et sæde, et ryglæn, højre benstøtte m. en fodplade, venstre benstøtte m. en fodplade, et sikkerhedsbånd, nøgle til justering af højden på benstøtterne og en bækkenspand m. et låg.

Kørestolens elementer:

- a. låsestifter til blokering af stellet
- b. sæde
- c. armlæn
- d. låsestift
- e. benstøtter
- f. bolt til montering af benstøtte
- g. klemmebremse
- h. bækkenspand

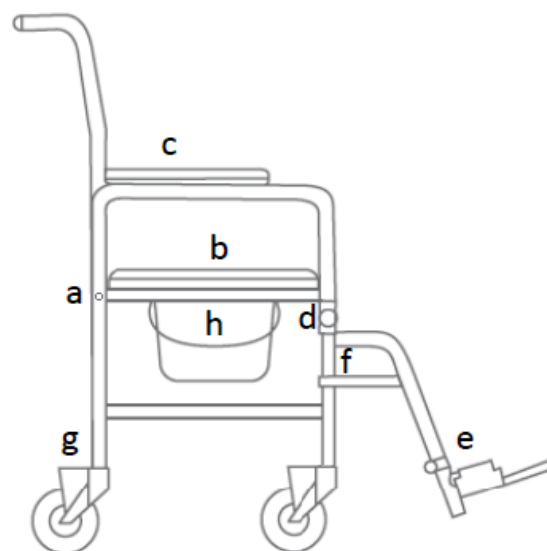

2. Anvendelse

En toiletkørestol til transportformål er et hjælpemiddel til personer, der har problemer m. selvstændig bevægelse og til personer m. nedsat funktion og bevægelsesbegrænsninger. Den er designet til indendørs brug og kan kun bruges m. ledsagerens hjælp.

Kørestolen har en transport- og toiletfunktion, da den er udstyret m. en bækkenstand, som er anbragt under sædet, og fire drejelige hjul. Den har til opgave at lette brugerens toiletrutiner. Den anbefales særligt til personer, der har bevægelsesproblemer pga.:

- lammelse
- overvægt el. sygelig undervægt
- degenerative forandringer i el. deformation af ben el. arme
- degenerative forandringer el. skader i led
- skader i el. amputation af ben el. arme
- hjerte- og karsygdomme, cirkulationsforstyrrelser

3. Montering

Trin 1. Træk låseklemmerne fra ryglænsstellet ud.

Trin 2. Før ryglænsrørene ind i begge dele af hovedstellet, og dernæst lås ryglænet m. låsestifterne.

Trin 3. Montér armlænet forrest på stellet ved at trykke på låsestifterne.

Trin 4. Montér højre og venstre benstøtte forrest på hovedstellet ved at sætte dem på de to bolte og dreje dem indad, indtil de er låst i position.

Trin 5. Montér og justér sikkerhedsbåndet på benstøtterne.

Trin 6. Før en bækkenspand u. låg ind i skinnerne, der er anbragt under sædet. (Kontrollér, at bækkenspanden er monteret korrekt).

Kørestolen er klar til brug.

BETJENING AF KØRESTOLEN

- Før hver brug af kørestolen skal du kontrollere bremsernes funktion, den konstruktionsmæssige tilstand af kørestolen og tilstanden af hjulene. Det skal endvidere kontrolleres, at de enkelte dele er monteret og justeret korrekt.
- Kørestolen er ikke udstyret m. breddejustering. Derfor skal du sikre dig, at bredden på kørestolen (45 cm) er tilpasset brugerens behov, før den tages i brug.

- Kørestolen er kun designet til at tilbagelægge korte strækninger under indendørsforhold. Kørestolen er ikke udstyret m. støddæmpere. Derfor frarådes det at bruge den i længere tid.

Bemærk! Kørestolen **må ikke** bruges, hvis der konstateres nogen som helst fejl el. mangler heri.

VIPNING AF ARMLÆN

- Tryk på låsestiften, og dernæst træk den forreste del af armlænet ud af smæklåsen og skub den nedad.
- For at låse armlænet skal det skubbes opad og monteres indtil låsestiften falder på plads.
- Armlænene **må ikke** bruges som støtte, når brugeren skal rejse sig. Bad om hjælp, om nødvendigt.

BREMSER

- For at blokere hjulene skal du trykke venstre og højre bremsehåndtag m. foden. For at afblokere hjulet skal håndtaget skubbes opad med foden.

BENSTØTTER

- Fodpladerne skal være indstillet lodret, mens brugeren kommer ind og ud af kørestolen. **Benstøtter må ikke bruges som støtte, mens brugeren kommer ind el. ud af kørestolen pga. risiko for, at kørestolen vælter og brugeren falder.**

INDSTIGNING I KØRESTOLEN

- Bremserne skal altid være aktiveret, mens brugeren sættes sig i el. stiger ud af kørestolen, skifter position el. under parkering.

- Kørestolen skal anbringes tættest muligt på forflytningsstedet, så den er kontakt m. sengen el. et andet sæde, der benyttes af kørestolsbruger, baghjulet og den forreste del af stellet. Hvis brugeren ikke er i stand til at forflytter sig til kørestolen selvstændigt, skal vedkommende flyttes over.
- Brugeren skal sætte sig dybest muligt i kørestolen, midt på sædet, så en bedre stabilitet af produktet sikres.

4. Teknisk specifikation

Totalbredde	55cm
Indvendig bredde	45 cm
Totaldybde	87 cm
Sædehøjde fra underlaget	53 cm
Totalhøjde	95 cm
Sædedimensioner	44 x 44 cm
Vægt	10,6 kg
Maks. belastning	100 kg
Dimensioner i sammenklappet tilstand	55 cm
Stelfarve	rød

5. Bemærkninger og anvisninger

Timago International Group frasiger sig ethvert ansvar for uheldig anvendelse af kørestolen, manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvendelse af kørestolen i strid med formålet.

6. Vedligeholdelse

Kørestolens elementer skal vedligeholdes regelmæssigt:

- Betrækket og pudsen kan rengøres i koldt vand m. en fugtet (ikke våd) klud, uden brug af rengøringsmidler. Vanskeligere pletter skal rengøres m. en svamp. Udvis forsigtighed ved vedligeholdelse af betrækket, så det ikke er vædet for meget. Betrækket tørres væk fra varmekilder.
- Plastdele skal rengøres m. en fugtet klud, evt. m. anvendelse rengøringsmidler til plast. Følg anvisningerne fra Producenten på området og sikkerhedsreglerne for brug af rengøringsmidler.
- Bækkenspanen skal tømmes og dernæst både bækkenspanen og toiletbrættet skal desinficeres efter hver brug. Brug toiletrengøringsmidler i henhold til anvisningerne fra producenten.










8. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet bør ikke udsættes for direkte sollys, vand og fugt.

9. Garantioplysninger

Produktet er omfattet af garantien. Garantivilkårene er beskrevet i garantikortet, som du fik udleveret. Gem købsbeviset (kvittering el. faktura) til garantiformål.

7. Mærkning

	Referencenummer		Producent
	Partinummer		Produktionsdato
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs brugsanvisningen nøje igennem
	Producenten har vurderet produktets forenelighed m. de væsentlige krav, der stilles til medicinsk udstyr.		

Kontakt vores forhandlere for at gøre dig bekendt med hele vores sortiment.

For nærmere oplysninger se hjemmesiden **www.timago.com**

Tak fordi du har valgt Timago produktet!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa *[ApS og K/S]*
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

Tlf.: +48 33 499 50 00
Telefax: +48 33 499 50 11
E-mail: info@timago.com



04/2021(II)