



K-Lite FE | K-Lite F

elektrisk sammenklappelig | manuelt sammenklappelig

BRUGERMANUAL



Model nr.: EQ10EA (UK) & EQ10EB (UK)

INDHOLDSFORTEGNELSE

I. INTRO.....	1
ANVENDELSESFORMÅL.....	2
SIKKER BETJENING OG FORHOLDSREGLER	3
II. TEKNISKE DATA.....	15
III. LÆR DIN ELEKTROMOBIL AT	17
1. BETJENINGSPANEL	18
2. INDSTILLING AF STYRESTANGENS HØJDE.....	23
3. INDSTILLING AF ARMLÆNENE.....	23
4. FOLD RYGLÆNET NED	24
5. SÆDEOPSTILLING	25
6. OPBEVARING AF AKKUPAKKEN.....	25
7. MONTERING OG DEMONTERING AF SÆDEPOSEN	26
IV. FOLDEMÅNDSIGATIONER	27
4.1 ELEKTRISK VERSION_K-Lite FE.....	27
4.2 MANUEL VERSION K-Lite F.....	30
V. SKUBNING OG TRANSPORT AF ELKØRETØJET	33
SKUBNING AF ELKØRETØJET.....	33
FOR AT SKUBBE ELBILEN.....	33
VI. KONTROL FØR KØRSEL.....	34
VII. BATTERI OG BATTERILADNING	36
BATTERIOPLADNING	37
VIII. Lithium-batteri.....	40
BETJENING.....	40
FEJLFINDING	40
IX. FEJLFINDING	43

OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE	43
----------------------------------	----

FEJLKODE	43
----------------	----

X. GARANTIBETINGELSER	44
-----------------------------	----

VIGTIGT!	44
----------------	----

ANSVARSBEGRÆNSNING	44
--------------------------	----

I. INTRO

Læs og følg alle instruktionerne i denne vejledning, inden du tager din el-scooter i brug for første gang. Hvis du finder oplysninger i denne vejledning, som du ikke forstår, eller hvis du har brug for yderligere hjælp til montering eller betjening, skal du kontakte din autoriserede forhandler.

Sikker brug af dit produkt afhænger af, at du nøje følger ADVARSELERNE, bemærkningerne og betjeningsvejledningen i denne manual. Virksomheden er ikke ansvarlig for skader eller personskader, der opstår som følge af manglende overholdelse af ADVARSELERNE, bemærkningerne og betjeningsvejledningen. Følgende symboler bruges i denne manual til at markere ADVARSELER og vigtige oplysninger.

Hvert af dem er meget vigtigt for din sikkerhed. Det anbefales på det kraftigste, at du læser og forstår dem alle.

Dette produkt kombinerer avanceret teknologi med modernitet. Det er ideelt til hurtig sammenfoldning og udfoldning og kan nemt opbevares i bagagerummet på din bil eller medbringes på rejser. Vi er sikre på, at dette produkts konstruktionsegenskaber, fremragende ydeevne og problemfri drift vil gøre din hverdag mere komfortabel.

Denne elektriske kørestol er velegnet til kørsel indendørs og på flade veje i nærheden af bygninger, men ikke på græs, grusveje, brosten, stejle stigninger, motorveje og ikke i regn eller sne.



ADVARSEL!

Manglende overholdelse af ADVARSELERNE i manualen kan medføre personskade.



OBS!

Manglende overholdelse af anvisningerne i manualen kan medføre skader på el-køretøjet.

ANVENDELSESFORMÅL

Denne elektromobil er velegnet til handicappede og ældre mennesker med gode kognitive evner og bevægelsesproblemer.

Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere denne manual uden forudgående varsel.

Håndbogen hjælper dig med at forstå, hvordan el-køretøjet fungerer. Desuden beskrives drift, vedligeholdelse og reparation. Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte din forhandler eller distributionspartner.

SIKKER BETJENING OG OVERHOLDELSE



ADVARSEL!

For at sikre din sikkerhed bedes du læse og overholde denne manual. For at sikre sikkerheden skal du være særlig opmærksom, når du kører på en el-scooter.



ADVARSEL!

Overhold følgende ADVARSELER for at undgå skader eller personskader som følge af forkert brug af din elektriske mobil. Brugeren er ansvarlig for at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger. Vi er ikke ansvarlige for personskader og/eller produktskader, der opstår som følge af forkert brug af den elektriske kørestol. Overhold alle gældende lokale færdselsregler. Det kan være svært for andre trafikanter at se dig, når du sidder i din elektriske kørestol. For din sikkerhed under kørsel er det meget vigtigt at bruge sikkerhedsudstyr såsom reflekser, reflekterende tøj, lys og sikkerhedssymboler.



ADVARSEL!

Konsulter regelmæssigt dit sundhedspersonale for at sikre, at der ikke er helbredsmæssige eller fysiske forhold, der kan begrænse eller påvirke din evne til at betjene din elektriske kørestol sikkert. Konsulter din læge, hvis du tager receptpligtig eller håndkøbsmedicin, eller hvis du har fysiske begrænsninger. Nogle former for medicin og fysiske begrænsninger kan påvirke din evne til at betjene din elektriske kørestol sikkert.



ADVARSEL!

Kør ikke din elektriske kørestol under indflydelse af alkohol, da dette kan påvirke din evne til at betjene din elektriske kørestol sikkert.

Hver elektrisk kørestol er forskellig. Sørg for at sætte dig ind i den korrekte betjening, inden du kører.

**ADVARSEL!**

Vipbeskyttelsen mindsker risikoen for at vælte bagover, hvilket kan medføre alvorlige skader.

**ADVARSEL!**

Prøv ALDRIG en ny køremanøvre alene.

**ADVARSEL!**

Brug kun el-kørestolen til det tilsigtede formål. Undgå enhver form for brug til f.eks. styrketræning, sport og atletik. At trække, flytte eller bugserer genstande kan medføre sikkerhedsrisici og overdreven belastning af el-kørestolen.

**ADVARSEL!**

Sæt dig aldrig på el-kørestolen, når den befinder sig i et kørende køretøj.

**ADVARSEL!**

Din elektromobil er kun beregnet til én fører. Transportér ikke passagerer på din elektromobil!

**ADVARSEL!**

Vi anbefaler på det kraftigste, at du ikke ryger cigaretter, mens du sidder på din elektriske kørestol. Hvis du alligevel vælger at gøre det, skal du overholde følgende sikkerhedsretningslinjer: Opbevar askebægerne i sikker afstand fra sædehynderne. Sørg altid for, at cigaretterne er helt slukkede, inden du smider dem ud.

**ADVARSEL!**

Sæt dig så langt tilbage som muligt på sædet på den elektriske kørestol, når du stiger ind og ud, ellers kan det medføre fald og personskader.

ADVARSEL! Brug ikke armlænene til at bære byrder. En sådan brug kan få el-kørestolen til at vælte, hvilket kan føre til, at du falder af el-kørestolen og kommer til skade.

ADVARSEL! Flyt aldrig hele din vægt over på fodstøtten. En sådan brug kan medføre, at el-kørestolen vælter, hvilket kan føre til, at du falder af el-kørestolen og kommer til skade.

**ADVARSEL!**

Brug ikke el-kørestolen i "frihjulstilstand" uden hjælp fra en ledsager, da dette kan føre til personskade. ADVARSEL! Når du sidder i el-kørestolen, bør du ikke bevæge dig rundt på egen hånd, da dette kan føre til skader. Kontakt din ledsager, hvis nødvendigt.

ADVARSEL! Stil aldrig el-kørestolen i "frihjul"-tilstand på en skråning, da dette kan føre til, at den ruller væk og forårsager personskader.

**ADVARSEL!**

Tilføjelse af tilbehør til din elektriske kørestol kan ændre visse specifikationer, såsom den samlede vægt, størrelsen og/eller tyngdepunktet på din elektriske kørestol. Vær opmærksom på, at nogle af disse ændringer kan beskadige genstande i din omgivelser.

**ADVARSEL!**

Du må ikke ændre sædets specifikationer. Brug ikke polstring eller puder. Dette kan medføre en ustabil siddestilling, hvilket kan føre til, at du falder af den elektriske kørestol.

**ADVARSEL!**

Vær forsigtig, når du bruger iltudstyr i nærheden af strømkredse eller brændbare materialer. Kontakt din iltleverandør for at få oplysninger om sikker håndtering.

**ADVARSEL!**

Du må ikke ændre kontrolindstillingerne. Der skal foretages eftersyn hos dit servicefirma hver 6. til 12. måned. Hvis du opdager, at nogle funktioner er ændret, skal du kontakte din serviceudbyder.

**ADVARSEL!**

EMI-RFI

Dette produkt er testet og godkendt ved et interferensniveau på 20 V/m. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.

**ADVARSEL!**

En ufuldstændig sammenklapningsproces beskadiger eller påvirker din el-scooter og kan også forårsage personskaade.

**ADVARSEL**

Når du rejser dig, må du ikke holde fast i styret eller støtte dig til det. eller læne dig!

**ADVARSEL!**

Det er muligt, at el-kørestolen pludselig standser under kørsel. Brug ikke el-kørestolen, hvis den opfører sig unormalt eller fejlagtigt.

**ADVARSEL!**

For at el-kørestolen ikke kommer ud af kontrol og bevæger sig af sig selv, må den ikke parkeres i "frihjul"-tilstand på en rampe.

**ADVARSEL!**

Hvis du har til hensigt at blive stående på samme sted i længere tid, skal du slukke for strømmen for at forhindre, at el-kørestolen bevæger sig ved et uheld.

**ADVARSEL!**

Undgå alt tilbehør, der kan forstyrre funktionen af kørearmens vippeknop, da det ellers kan føre til, at el-kørestolen bevæger sig uventet og utilsigtet.

**ADVARSEL!**

Under kørslen skal du holde dig selv, dit tøj og alle andre genstande væk fra dækkene. Lad ikke genstande slæbe bag el-kørestolen, når du kører.

Løst siddende tøj eller andre genstande kan sidde fast i dækkene, hjulene og/eller chassiset.

**ADVARSEL!**

Tilslut ikke andre enheder til el-kørestolens elektroniske system, og start ikke andre enheder med el-kørestolens batteri.

**ADVARSEL!**

Hold opladerstikkets kontakter rene og tørre og væk fra fugtige omgivelser for at undgå skader på det elektriske system og/eller personskader.

**ADVARSEL!**

Den passende opbevaringstemperatur for den elektriske kørestol er 15 grader ~ 40 grader. Langvarig opbevaring i omgivelser med lave eller høje temperaturer vil påvirke den elektriske kørestols funktionalitet.

**ADVARSEL!**

Kontroller altid de elektriske komponenter for korrosion, slitage eller beskadigelse, alle ledninger og tilslutninger for brud, og udskift dem om nødvendigt.

**ADVARSEL!**

Sikr altid el-kørestolen og dens batteri, når den transporteres. Batteriet skal fjernes fra el-kørestolen, pakkes og placeres separat. Transportér ikke el-kørestolen og/eller batterierne sammen med brandfarlige genstande.

**ADVARSEL!**

Hvis batteriet er defekt, må du ikke selv afmontere og reparere det. Kontakt virksomhedens autoriserede tekniske servicepersonale for at få batteriet repareret eller udskiftet.

**ADVARSEL!**

Brug ikke el-køretøjet under opladning.

Vælg en batteritype og kapacitet i overensstemmelse med de tekniske data, der er angivet i brugervejledningen.

**ADVARSEL!**

For at sikre korrekt funktion skal du bruge den udskiftelige batteri, der er leveret af den autoriserede forhandler.

**ADVARSEL!**

Beskyt altid batterierne mod frost. Hvis du bor i et koldt klima, skal du opbevare din el-scooter på en passende måde. Oplad aldrig et frossent batteri. Opladning af et frossent batteri kan beskadige det.

**ADVARSEL!**

Start ikke el-kørestolen med lavt batteriniveau, da det kan medføre, at den bliver stående.

Sænk hastigheden, når du drejer/kører i sving, undgå skarpe sving og hold et stabilt tyngdepunkt. For at undgå at vælte bør du ikke flytte din vægt i modsat retning af svinget. **ADVARSEL!** Kør din el-scooter lige ud med hjulene vinkelret på stigningen og/eller kantstenen, når du kører op ad bakker eller over kantsten; begge forhjul skal berøre stigningen/kantstenen samtidigt. For at mindske risikoen for at vælte skal du ikke køre skråt; sæt ikke først et hjul eller en side af el-kørestolen på stigningen/kantstenen. Vær altid yderst FORSIGTIG, når du kører op ad en stigning.

**ADVARSEL!**

Kør ikke el-kørestolen på potentielt farlige veje eller stier, herunder, men ikke begrænset til, veje, der er dækket af sne, is, græs eller blade.

**ADVARSEL!**

Ved nedkørsel af enhver rampe skal den laveste hastighed vælges. Hvis nedkørselshastigheden er hurtigere end forventet, skal du slippe kørearmens vippeknop for at standse el-kørestolen og derefter forsigtigt trykke på knappen for at kontrollere nedkørselshastigheden.

**ADVARSEL!**

Den maksimale stigningsvinkel er testet under kontrollerede forhold. Køreegenskaberne ved opkørsel påvirkes af din vægt, el-kørestolens hastighed og den vinkel, du nærmer dig stigningen i.

**ADVARSEL!**

Kør kun baglæns på flade veje, hvis det er muligt. Når du kører baglæns, skal du køre jævnt med lav hastighed. Stop regelmæssigt for at sikre dig, at der ikke er forhindringer på vejen. Vær særlig forsigtig på skråninger for at undgå at vælte.

**ADVARSEL!**

For at undgå overbelastning og mulig væltning af el-køretøjet må du ikke medbringe genstande, der vejer mere end 6,8 kg (15 lbs).

**ADVARSEL!**

Når du sidder på din elektriske kørestol, skal du undgå enhver bevægelse, der kan flytte din krops tyngdepunkt. Dette kan få den elektriske kørestol til at vælte.

**ADVARSEL!**

Selv en lille højdeforskel (mere end 2,5 cm) under en rampe kan blokere det forreste hovedhjul, hvilket kan få el-kørestolen til at vælte eller stoppe pludseligt.

**ADVARSEL!**

Ræk ikke ud over sædet og læn dig ikke fremover. Dette kan beskadige ryglænet og føre til et fald.

**ADVARSEL!**

Brug ikke armlænene til at bære byrder. En sådan brug kan få el-kørestolen til at vælte, hvilket kan føre til et fald fra el-kørestolen og personskader.

**ADVARSEL!**

Flyt ikke din vægt over på den ene side af fodområdet. En sådan brug kan medføre, at el-kørestolen vælter, hvilket kan føre til et fald fra el-kørestolen og personskader.

**ADVARSEL!**

Selvom din elektromobil kan køre over meget høje forhindringer, bør du ikke forsøge at køre over forhindringer, der er højere end 25 mm. Dette kan gøre elektromobilen ustabil. Kørsel over forhindringer kan medføre, at el-kørestolen vælter og forårsager alvorlige personskader. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan overvinde en forhindring på sikker vis, skal du bede om hjælp. Tag højde for dine evner og personlige begrænsninger. Det kan være nødvendigt at fjerne eller dække over terskler og anbringe ramper ved udgange og indgange for at kunne overvinde disse.

**ADVARSEL!**

Undgå at forsøge at overvinde forhindringer på skråninger. Stol ikke kun på et hjul, når du krydser forhindringer.

**ADVARSEL!**

Kør ikke på ujævnt terræn og/eller blødt underlag. Kør ikke i nærheden af højt græs, som kan vikle sig ind i undervognen.

**ADVARSEL!**

Undgå at køre på løst fyldt grus- og/eller sandbund.

**ADVARSEL!**

Brug ikke din el-scooter på eller i nærheden af jernbaneskiner eller jernbaneoverskæringer.

**ADVARSEL!**

Kør ikke med el-kørestolen tæt på bredden af åer, søer eller langs havet. Kryds aldrig vandveje med din el-kørestol.

**ADVARSEL!**

Beskyt din el-scooter mod åben ild.

**ADVARSEL!**

Hold din elektromobil tør og ren. Tag aldrig din elektromobil med i brusebad, badekar, svømmehal eller sauna. Regn, sne, salt, tåge/dug og isglatte/glatte overflader kan beskadige elektromobilens komponenter eller få stellet til at ruste for tidligt.

**ADVARSEL!**

Undgå længerevarende udsættelse for ekstrem varme eller kulde, da dette kan beskadige polstringen og de ikke-polstrede komponenter på el-kørestolen samt forårsage skader på batteriet og batterikomponenterne.

**ADVARSEL!**

Træk ikke din elektriske kørestol. Trækning kan overskride den maksimale hastighedsgrænse, hvilket kan beskadige kritiske komponenter i den elektriske kørestol.

**ADVARSEL!**

Vær særlig forsigtig, når du bærer el-kørestolen op og ned ad trapper. El-kørestolen skal klappes sammen, og det kan være nødvendigt, at flere personer hjælper til med fysisk kraft.

**ADVARSEL!**

Kør ikke med el-kørestolen på trapper eller rulletrapper.

**ADVARSEL!**

Sid aldrig på el-kørestolen, når den befinder sig i et kørende køretøj.

**ADVARSEL!**

For at sikre et sikkert skift: Sluk altid for strømmen, før du stiger på eller af din elektriske kørestol. Ellers kan du ved et uheld komme til at røre ved kørearmen og utilsigtet sætte din elektriske kørestol i bevægelse. Sørg for, at "frihjul"-håndtaget er låst fast; dette forhindrer, at elektromobilen bevæger sig, når du stiger af eller på. Du kan køre op eller ned i elevatoren med elektromobilen. Når du er i elevatoren, skal du slukke for elektromobilen og sætte dig stabilt, så den ikke bevæger sig.

**ADVARSEL!**

Placer ikke el-kørestolen på forsædet i en bil under transport. Den kan bevæge sig og forstyrre føreren.

**ADVARSEL!**

Lås altid el-kørestolen, så den ikke kan rulle eller bevæge sig.

**ADVARSEL!**

Fold ikke din elektriske kørestol sammen på stejle stigninger!

**ADVARSEL!**

Sørg for at holde en sikkerhedsafstand, når du klapper din el-scooter ud og sammen, for at undgå personskader!

**ADVARSEL!**

Når el-kørestolen ikke er i brug, skal batteriet tages ud.

**ADVARSEL!**

Kontakt din serviceudbyder, hvis der er løse dele på sædesystemet. Udskift straks slidte eller beskadigede polstringer.

**ADVARSEL!**

Vær bemærk , at vask vask af sædehynder kan nedsætte stoffets brandhæmmende egenskaber.

**ADVARSEL!**

Hæng ikke genstande på styret.

**ADVARSEL!**

Fjern opladeren, når batteriet er fuldt opladet.

**ADVARSEL!**

Efter justering af armlænene og inden brug skal du sikre dig, at armlænene er fast og sikkert fastgjort for at undgå farer.





ADVARSEL!

Radiobølgekilder såsom radiostationer, tv-stationer, amatørstationer (HAM), tovejsradioer og mobiltelefoner kan forstyrre styringen af motoriserede elektriske kørestole. Overholdelse af nedenstående advarsler bør mindske risikoen for utilsigtet løsning af magnetbremsen eller bevægelse af den elektriske kørestol, hvilket kan medføre alvorlige personskader.


- 1.) Tænd ikke bærbare personlige kommunikationsenheder såsom CB-radioer og mobiltelefoner, når den elektriske kørestol er tændt.
- 2.) Vær opmærksom på nærliggende sendere, såsom radio- eller tv-stationer, og forsøg at holde dig væk fra disse.
- 3.) Hvis der opstår en utilsigtet bevægelse eller løsning af bremsen, skal du slukke for el-kørestolen, så snart det er sikkert.
- 4.) Vær opmærksom på, at tilføjelse af tilbehør eller komponenter eller ændringer af el-kørestolen kan gøre den mere følsom over for forstyrrelser fra radiobølgekilder. (Bemærk: Der findes ingen enkel måde at vurdere virkningen af forstyrrelser på el-kørestolens samlede følsomhed.
- 5.) Indberet alle tilfælde af utilsigtet bevægelse eller løsning af bremsen til producenten af el-kørestolen og angiv, om der var en radiobølgekilde i nærheden.

II. TEKNISKE DATA


Modelbetegnelse	K-Lite FE / K-Lite F EQ10EA(UK) / EQ10EB (UK)
Maksimal belastbarhed	120 kg
Samlet højde (højeste - laveste)	935 mm - 800 mm
Samlet længde	990 mm
Samlet bredde	58 mm
Drivsystem	Baghjul med direkte drev (med udligningsgear)
Lithium-batteri	24 V 10 Ah
Batterioplader	eksternt
	Indgangsspænding: 100-240 VAC
	Udgangsspænding: 24 VDC
	Udgangsstrøm: 2A
Forhjul	Massivt gummi 8" / 200 mm
Baghjul	Massivt gummi 8" / 200 mm
Maksimal rækkevidde	15 km
Vægt af el-køretøj (uden batteri og sæde) / el-køretøj komplet	22,2 kg / 29,6 kg
Maksimal fremadgående hastighed	6 km/t
Maksimal hastighed baglæns	4,5 km/t
Vendekreds (radius)	1300 mm
Sædebredde / -dybde / -højde	420 mm x 400 mm x 410 mm
Foldemetode	Elektrisk (FE) / Manuel (F)

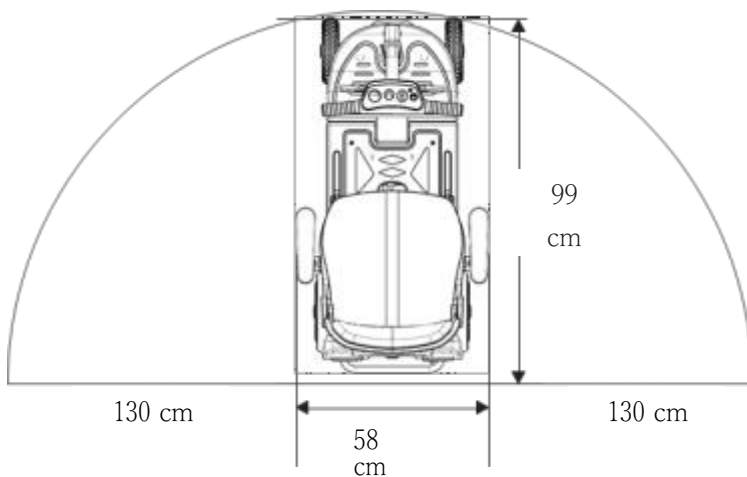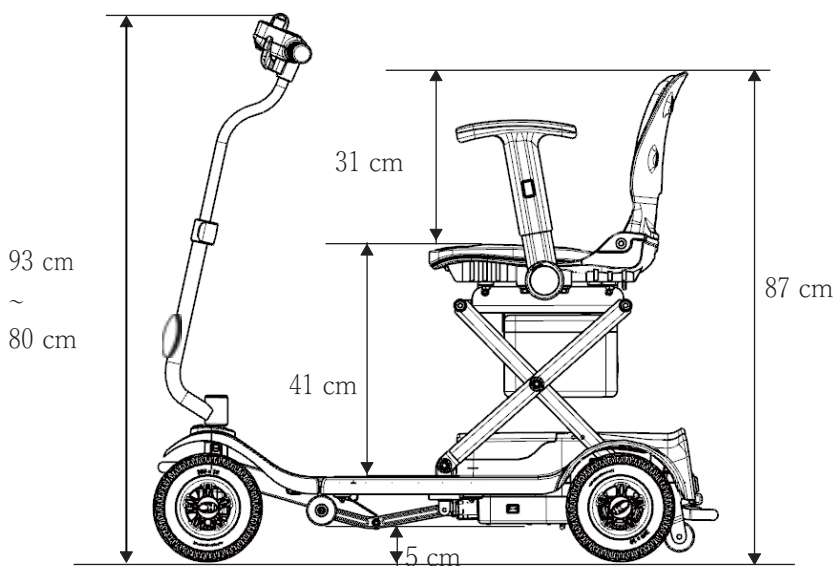


III. LÆR DIN ELEKTROMOBIL AT KENDE

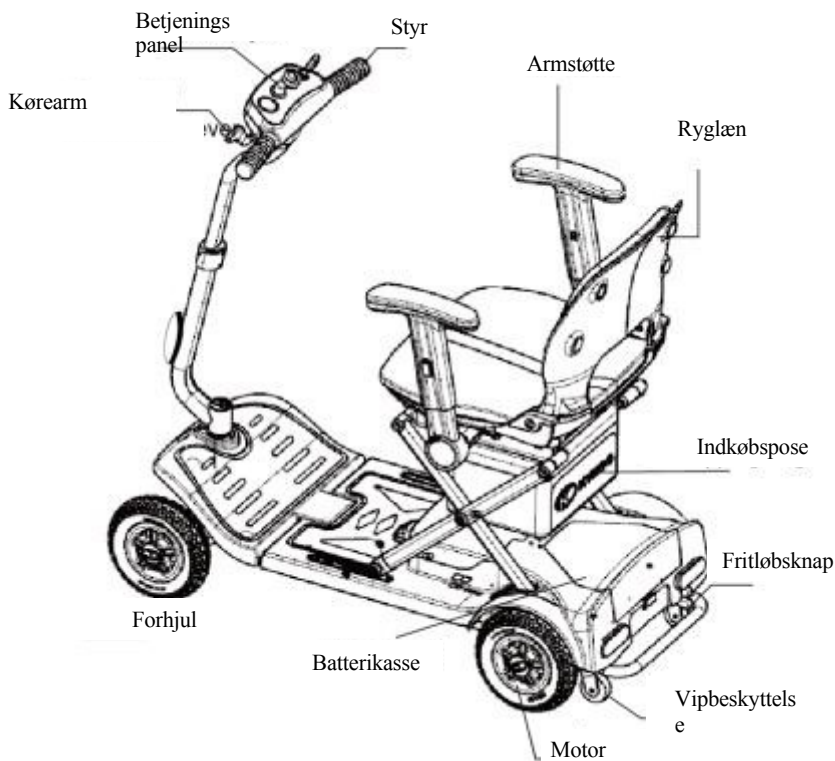


1. BETJENINGSPANEL

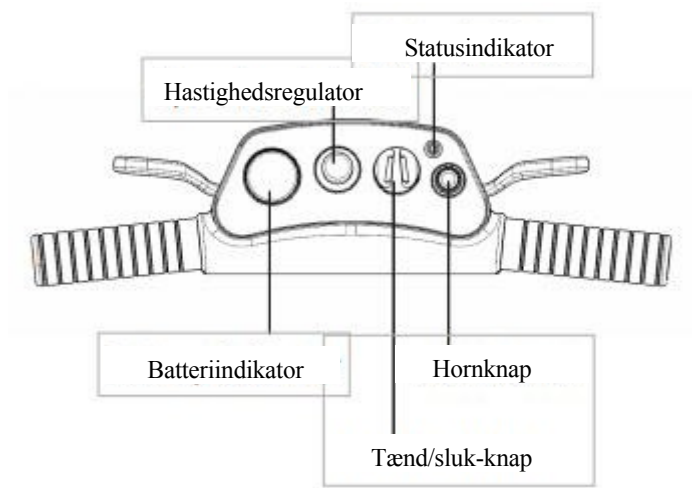

Indsæt nøglen og drej den til højre til "I", så tændes el-køretøjet.
Drej den til venstre til "0", så slukkes el-køretøjet.

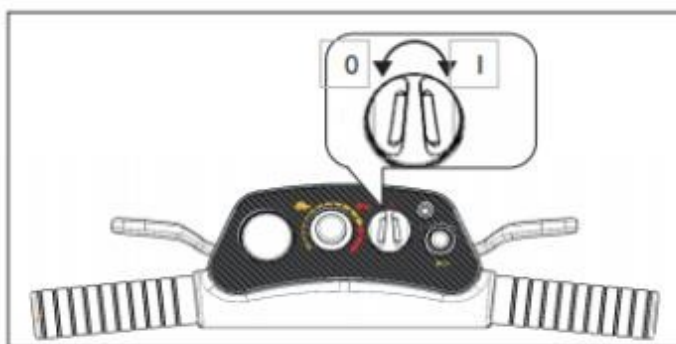

Bemærk: Hvis statusindikatoren blinker, når du tænder for el-kørestolen, kan det skyldes, at batteriet er svagt, eller at der er en fejl. Sluk for el-kørestolen, og oplad den, eller kontakt din autoriserede serviceudbyder.

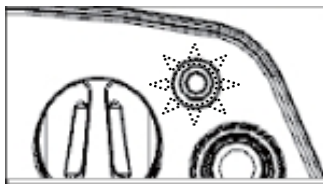


1.1 HASTIGHEDSKONTROL

Befindet sig i midten af betjeningspanelet. Den er designet som en master-hastighedsbegrænser, så du kan indstille den samlede hastighed for fremad- og bakkørsel, når du betjener kørearmen.


Du kan også justere din hastighed ved at ændre kørearmens vipningsvinkel. Tilpas din hastighed til omgivelserne.

Hvis du er usikker på køreforholdene, skal du køre med en lavere hastighed.

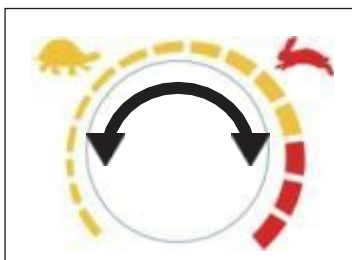


1.2 HORNKNAP

Når du trykker på knappen, afgiver hornet en akustisk signal. Brug den korrekt for at undgå ulykker og personskader.

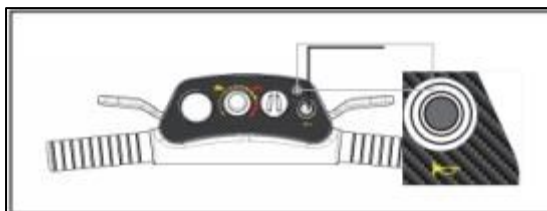

1.3 BATTERIINDIKATOR

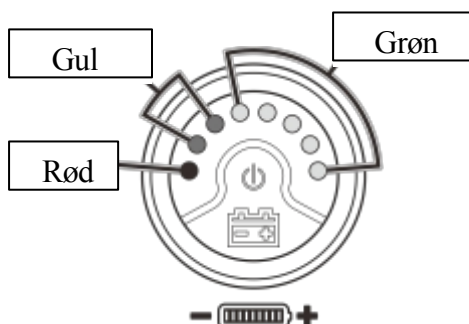

Når el-køretøjet står stille, vises der normalt mere tilgængelig effekt, end der faktisk er.

Visningen af batteristatus kan variere på grund af den varierende belastning under kørslen.

Når el-køretøjet accelererer eller kører op ad en bakke med tung last, kan batteriindikatoren status falde, hvilket indikerer, at dette ikke er den faktiske batteristatus.

Batteriet skal oplades straks, hvis kun den orange eller røde LED-lampe på batteriindikatoren lyser efter kørslen. Ellers vil batteriet blive beskadiget.

Bemærk: Hvis der vises mindre end 3 LED-batterilamper, blinker batteriindikatoren, hvilket betyder, at den skal oplades.

1.4 KØREHÅNDTAG



kør fremad



bak

Træk håndtaget med pegefingeren og langfingeren på højre hånd for at køre fremad og med venstre hånd for at køre baglæns.

Slip håndtaget for at standse el-kørestolen helt.




OBS!

Træk du ikke i begge sider af håndtaget, for at undgå skader.

1.5 TRÅDLØS FJERNBETJENING

(til elektrisk foldbar variant) Fremgangsmåde:


1. Tryk først på låseknappen
2. Tryk på knappen for at folde ud eller ind

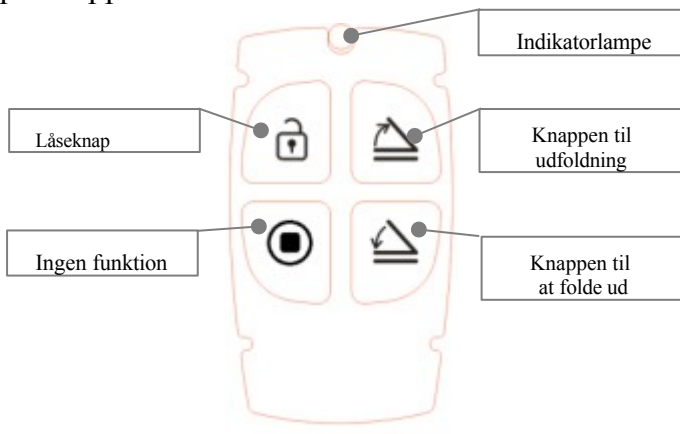

Hvis den trådløse fjernbetjening er beskadiget eller bortkommet, skal du kontakte din autoriserede serviceudbyder for at få hjælp til opsætning og genkøb.

1.6 HOVEDAFBRYDER


Hvis el-kørestolen ikke skal bruges i længere tid, skal du sætte hovedafbryderen på "0" for at undgå strømforbrug i standbytilstand, når den ikke er i brug.

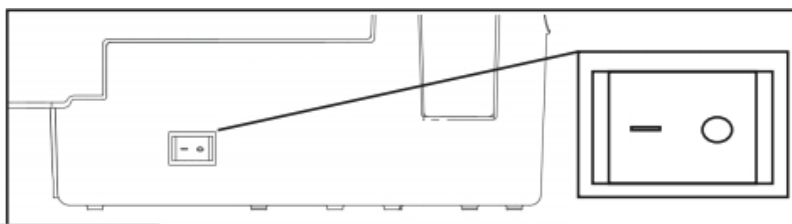

I : Tænd O:
Sluk

2. INDSTILLING AF STYRESTANGENS HØJDE

Tilpas styrhøjden efter dine egne behov. Åbn først styrspænderen, juster derefter styret op eller ned til den ønskede højde, og fastgør til sidst spænderen.


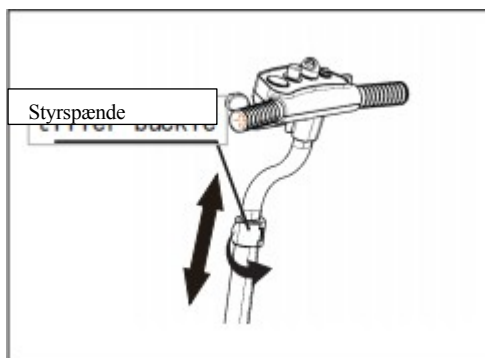


OBS!

Det er forbudt at bruge styret som støtte eller hjælp til at rejse sig for at undgå deformation eller beskadigelse.

3. INDSTILLING AF ARMLÆNENE:


Tryk på knappen på armlænet for at justere højden. Tryk den nederste justeringsknap ned for at justere drejevinklen.

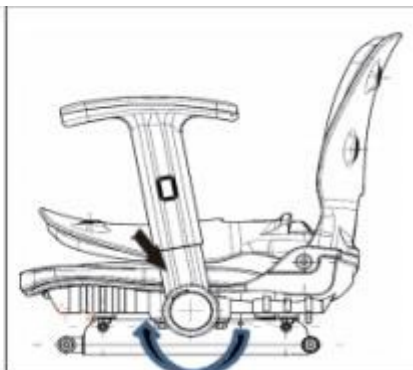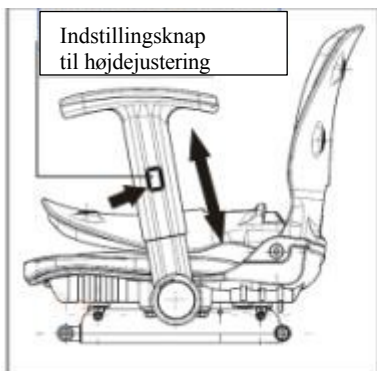


**OBS!**

Sørg for, at armlænet sidder fast, inden du bruger el-kørestolen, for at undgå enhver mulig fare.

Lås armlænet op for at justere bredden mellem armlænene.

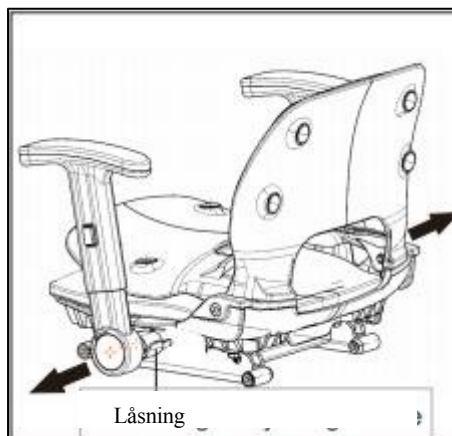
**4. FOLD RYGLÆNET NED**

Fold ryglænet ned med hånden.

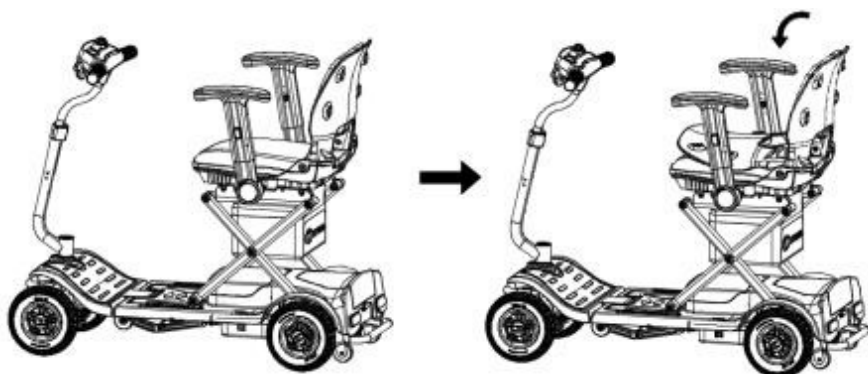

5. SÆDEOPSTILLING

Træk låsepinden ud som vist på billedet, skub sædet fremad i udløsningsspalten og løft det op for at fjerne sædet.

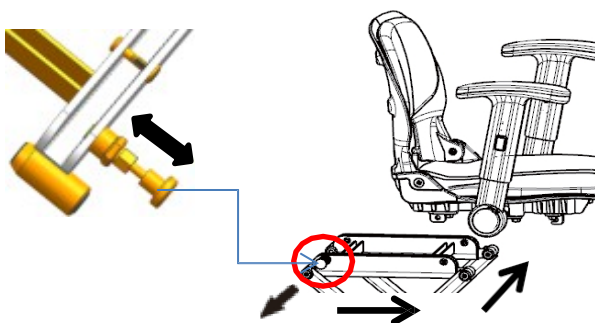

Bemærk: Pas på ikke at fjerne sædet for hurtigt, så det ikke falder ned eller du mister balancen. Ved samling skal du omhyggeligt rette sædet ind i spalten og låse det fast, sikre dig, at låsepinden er på plads igen, og prøve at bevæge sædet fremad/bagud for at kontrollere, at det sidder fast, inden du sætter dig på sædet igen.

6. OPBEVARING AF BATTERIPAKKEN

Tryk på trykstiften på forsiden af batterikassen som vist på billedet for at åbne låget, og læg derefter batteriet i.




7. MONTERING OG DEMONTERING AF SÆDEPOSEN

Før du monterer sædetasken, skal du fjerne sædet. Se afsnit

5. FJERNELSE AF SÆDET for at fjerne sædet.

1. Det længere stofbånd med velcrolukning på sædetasken skal være foran.
2. Sæt sædetasken ind fra bagsiden af køretøjet og fremad.
3. Åbn velcrolukningen på stofbåndene.
4. Vikl stofbåndene omkring sædebeslagene som vist på billedet nedenfor, og luk velcrolukningerne.

***Fjernelsen foregår i omvendt rækkefølge.**

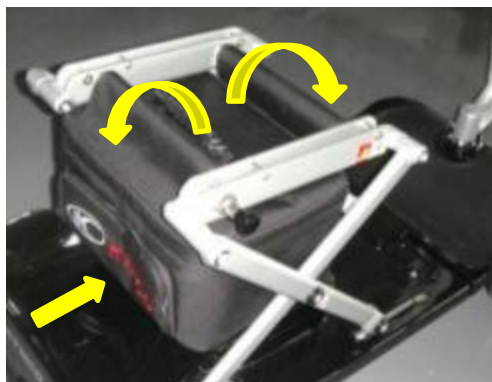

OBS!

- Lasten må ikke veje mere end 1 kg.
- Læg ikke genstande i, der er større end tasken, da det ellers kan påvirke kørselssikkerheden.
- Læg ikke skarpe genstande i posen, da den ellers kan blive punkteret.
- Læg ikke våde genstande i tasken, da den ellers kan blive beskadiget eller tilsmudset.
- Lad ikke værdifulde genstande ligge i posen, da den ikke har nogen tyverisikring.
- Sørg for, at lynlåsen er lukket, når du har lagt genstande i posen, da genstanden kan falde ud under kørslen.
- Udskift velcrolukningen, hvis den mister sin klæbeevne.
- Udskift lynlåsen, hvis den er ødelagt.


IV. FOLDINGSANVISNINGER:

4.1 ELEKTRISK VERSION_K-Lite FE

Før sammenklapning og udklapning: Tænd/sluk-knappen skal være i position KEY-OFF. Den elektriske kørestol skal være i normal driftsposition, dvs. med alle 4 hjul på gulvet, ryglænet klappet ned og armlænene klappet bagud.*Fjern sædetasken, før du klapper kørestolen sammen*

4.1.1 FJERNBETJENING:

- (A) Tryk på låseknappen. Efter en lydssignal er låsen åbnet. 【Knappen låses igen, hvis der ikke foretages nogen betjening inden for 30 sekunder】
- (B) Udklapning: Tryk længe på udklappingsknappen på fjernbetjeningen for at starte udklapningen. 【Stopper straks, når knappen slippes】
- (C) Tryk længe på foldetasten på fjernbetjeningen for at starte foldningen. 【Stopper straks, når tasten slippes】
- (D) Når den elektriske kørestol er fuldt udfoldet eller foldet sammen, lyder der tre signaltoner for at signalere, at udfoldnings-/sammenfoldningsprocessen er afsluttet.

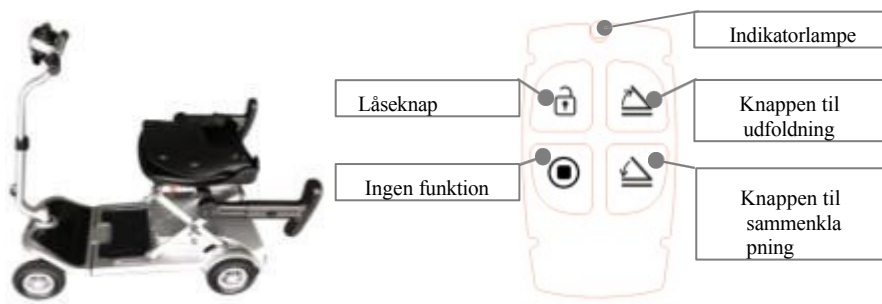

4.1.2 DRIFT MED INDFOLDNINGSKNAP

- (A) Tryk samtidigt på den røde og den blå knap for at låse op (systemet er låst op efter en biplyd) og slip derefter knapperne
- (B) **【Systemet låses igen, hvis det ikke betjenes inden for 30 sekunder.】**
- (C) Åbning: Tryk længe på den blå knap for at åbne.
【Stopper straks, når knappen slippes】 .
- (D) Indklapningsknap: Tryk længe på den røde knap for at klappe sammen.
- (E) **【Stopper straks, når knappen slippes】**
- (F) Når el-kørestolen er foldet helt ud eller sammen, lyder der tre signaltoner for at signalere, at udfoldnings-/sammenfoldningsprocessen er afsluttet.





Kør kun på din elektriske kørestol, når den er helt udfoldet og låst. I nødstilfælde skal du slippe knappen, så den elektriske kørestol øjeblikkeligt holder op med at folde sig ud eller sammen. Foldningsfunktionen stopper under opladningen. Undgå at stikke hånden ind i den elektriske kørestol, når den foldes sammen, for at undgå skader.



1. Sæt dig ikke på el-kørestolen under foldningen.
2. Under foldningen må der ikke komme genstande ind i el-kørestolens kabinet for at undgå fejl og skader.
3. Under foldningen må hoved, hænder, fødder, krop og børn ikke komme i nærheden af el-mobilens kabinet for at undgå skader.
4. **Fjern sædetasken inden foldningen for at undgå deformationer og skader.**

4.2 MANUEL VERSION K-Lite F

1. Når du klapper el-kørestolen sammen, skal du først klappe ryglænet ned, holde fast i styret med den ene hånd ② og lægge den anden hånd på sædet ③. Sæt derefter din fod på foldespaken ① og skub styret frem og tilbage, så el-kørestolen nu let kan klappes sammen. Tryk til sidst på styret, indtil det klikker fast i låst position, og foldningen er afsluttet.

2. Når du folder den elektriske kørestol ud, skal du træde på foldespaken ⑥ med foden og derefter skubbe styret opad ⑤. Til sidst skal du med den ene hånd på sædet ④ og den anden hånd på styret åbne det med lidt kraft, indtil du mærker, at det klikker på plads og foldes helt ud.


Illustration af sammenklapning



Illustration udfoldet





Illustration: Fuldstændig sammenklappet

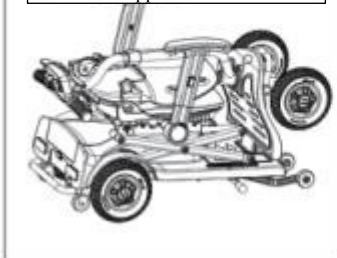



1. Sæt dig ikke på el-kørestolen under sammenklapningen.
2. Under foldningen må der ikke komme genstande ind i el-kørestolens kabine for at undgå fejl og skader.

Foldemål

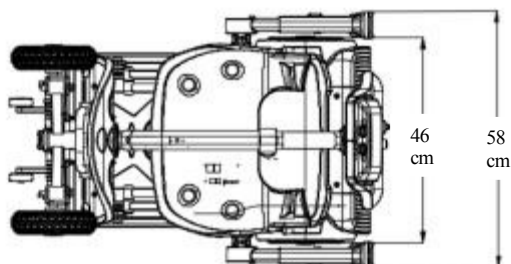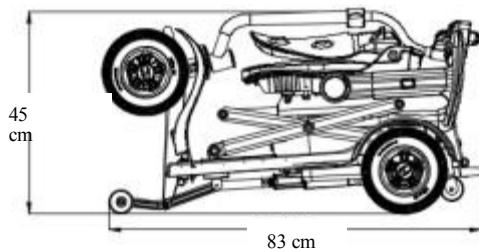

Flytning af el-kørestolen efter sammenklapning:

Når du har foldet el-kørestolen sammen, skal du holde styret med begge hænder som vist for at skubbe el-kørestolen (du kan også styre el-kørestolen let for at gøre det nemmere at manøvrere den, når den er foldet sammen).



OBS!

Når sikkerhedsanordningen registrerer, at el-kørestolen er i sammenklappet position og står oprejst, slukker den automatisk for strømmen.

For at bruge køretøjet skal du placere det vandret med alle fire hjul på gulvet.

Diagram over klemmeskyttelsespositionen



Bemærk

Som vist på billedet skal du undgå at stikke hånden ind mellem styret, sædet eller stellet, når du klapper el-kørestolen sammen, for at undgå skader.

V. SKUBNING OG TRANSPORT AF EL-KØRESTOLEN

1. Læs venligst sikkerhedsinstruktionerne i afsnit 3 om transport omhyggeligt.

SKUBNING AF EL-KØRETØJET

2. For at skubbe el-kørestolen skal du sætte den i "frihjulstilstand", hvilket kobler drivmotoren fra. Håndtaget

(1) er placeret nederst til højre på el-kørestolen under sædet.



ADVARSEL!

Når håndtaget trækkes op i friløbsfunktion, skal el-kørestolen stå på et plant underlag. Sæt dig ikke på el-kørestolen.


FOR AT SKUBBE ELKØRETØJET



= Frihjul

(A) (motoren er frakoblet).

Sluk for strømmen, træk nøglen ud, og træk derefter friløbshåndtaget opad for at skubbe el-kørestolen.

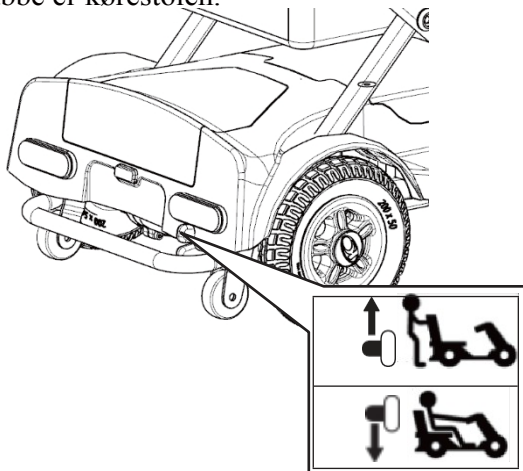



= Kørsel

Mode (B): (motoren er koblet til).

Tryk friløbsgrebet nedad for at sætte el-køretøjet tilbage i køreindstilling.

Elektromobilen skal altid være slukket, når den skubbes.

Skub ikke el-kørestolen for hurtigt. Hvis en forudindstillet hastighed overskrides, mens du skubber el-kørestolen, aktiverer drivmotoren et automatisk bremsesystem, der sænker el-kørestolens skubbehastighed. Efter hver indstilling, reparation eller vedligeholdelse og før brug skal du sikre dig, at hele konstruktionen er skruet fast – ellers kan der opstå personskader eller skader.

VI. KONTROL FØR KØRSEL:

Sørg for, at din el-scooter er i køremodus (ikke i "frihjul"-tilstand)	Kontroller, at håndtaget til "frihjul"-tilstand er i nede
Sædet er låst fast i den ønskede position	Bevæg sædet frem og tilbage for at sikre, at det er fastlåst.
Er batteriet opladet?	Kontroller batteriets opladningstilstand på betjeningspanelet
Fungerer bremsen?	Kontroller dette ved at køre langsomt og stoppe igen
Er dækkene og hjulene ubeskadigede?	Visuel kontrol af dæk og hjul

BRUG AF ELBILEN

Læs altid afsnittet "Sikker brug og overholdelse"

Inden kørsel skal du indstille sædet og styret i en behagelig position.

ADVARSEL!

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at det tager tid og øvelse at blive en dygtig og sikker fører af en elektrisk mobil.

ADVARSEL!

Vipbeskyttelsen mindsker risikoen for at vælte bagover, hvilket kan medføre alvorlige skader. Vær opmærksom på følgende tips for sikker kørsel:

6.1 Vær opmærksom på følgende tips for en sikker kørsel:

6.1.1. Din hastighed skal tilpasses kørselsforholdene.

6.1.2. Sænk altid farten, når du kører gennem følgende områder:

- Uoverskuelige områder
- Trange mellemrum
- Skarpe sving
- Hældninger
- Ramper

A. Tag en prøvetur på et område uden fodgængere eller et lukket område.

B. Hold hænderne på styret, når du kører på el-scooteren.

C. Når du kører på el-scooteren, skal du sørge for, at dine fødder forbliver inden for fodområdet.

VII. BATTERI OG BATTERILADNING

	Batteriet indeholder ætsende kemikalier.
	Der er fare for eksplosion!
	Brug ikke batterier med forskellige ampere-timekapaciteter (Ah).
	Hold værktøj og andre metalgenstande væk fra batteripolerne. Kontakt med værktøj kan forårsage elektrisk stød.
	Batteriet indeholder brændbart materiale. Udsæt det ikke for varmekilder som åben ild eller gnister. Transporter ikke batterier sammen med brandfarlige eller brændbare genstande.
	Bortskaffelse og genbrug – Kontakt din autoriserede serviceudbyder.

Nye batterier SKAL oplades fuldt ud (ca. 12 timer) inden første brug af enheden.

Oplad altid nye batterier inden første brug, da ellers forkortes batteriets levetid.

Som regel bør du oplade dine batterier så ofte som muligt for at sikre den længst mulige levetid og minimere den nødvendige opladningstid. Oplad dine batterier regelmæssigt, også selvom du ikke forventer at bruge enheden.



OBS!

Batteriet må ikke overlades, batteriet må ikke overdrevent afladet eller kortsluttes.

Batteriet må ikke lægges i vand, antændes, tabes eller på anden måde beskadiges.


Batteriet må ikke fjernes og udskiftes på anden måde.

Brug det tilhørende oplader til lithiumbatteriet. Brug ikke opladere til blybatterier eller andre opladere.


OPLADNING AF BATTERI

Bemærk du nøje følge rækkefølgen af tilslutning og frakobling af batteriopladeren.

- 1) Placer el-køretøjet i umiddelbar nærhed af en stikkontakt.

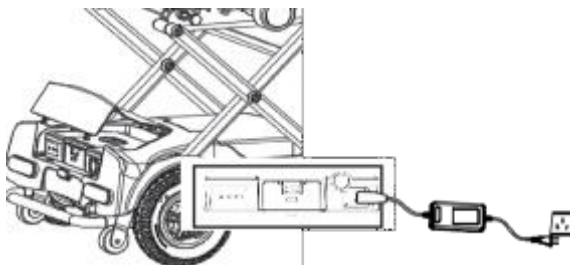

- 2) Sluk for el-køretøjet og tag nøglen ud.
- 3) Sørg for, at håndtaget til "frihjul"-tilstand er trykket ned i positionen "drift".

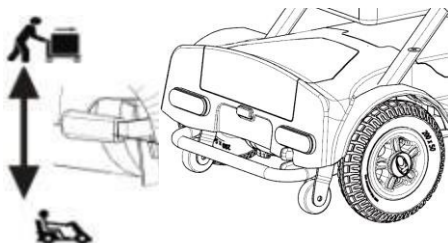


- 4) Til opladning om bord - Tryk på knappen, åbn bagdækslet og sæt batteriopladeren i batteriopladningsstikket på batterikassen.



Låsning af det bageste batterikabinet

- 5) Til ekstern opladning - Tryk på knappen på bagdækslet for at åbne bagdækslet. Tryk på låseknappen på batterikassen for at låse batterilåsemekanismen op. Træk batteriet ud ved håndtaget for at fjerne det. Batteriet kan nu oplades eksternt.

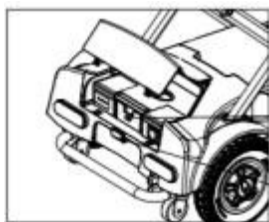


Låsning af
batterikassen

Knappen til
bagdæksel

Håndtag
til
batteripak
ker

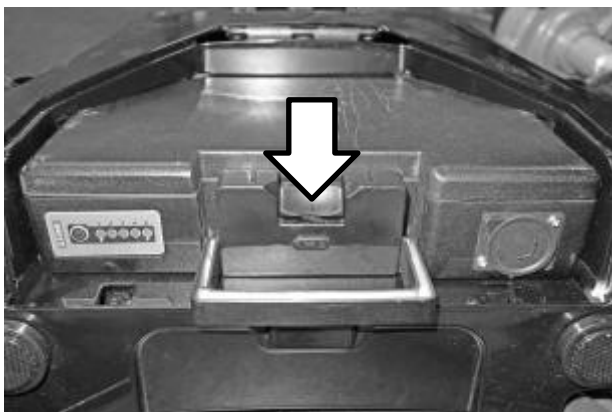

**OBS!**

Sørg for, at batteriets låsestift trykkes ned, så batteriet klikker fast, når det sættes i batteriholderen.

6) Sæt stikket på batteriopladeren i en stikkontakt (100Vac ~ 240Vac 47Hz~63Hz) og oplad batteriet.

7) Det anbefales at oplade batterierne i mindst 8 timer.

**OBS!**

Stikkontakten må ikke deles med andre apparater.

For at undgå fare for elektrisk stød må denne enhed kun tilsluttes et jordforbundet strømnet.

Tilslut aldrig opladeren via en forlængerledning.


**FORSIGTIG!**

Hvis din el-scooter ikke bruges i længere tid, skal den oplades regelmæssigt (1 gang om ugen). Hvis lithiumbatteriet ikke bruges i tre dage, går beskyttelsesanordningen i dvale. Strømforsyningen kan genstartes ved at trykke på tænd/sluk-knappen til batteriet, som findes på batterirummet tæt på batteriindikatoren!

VIII. LITHIUM-BATTERI

BETJENING

1. Tænding: Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at tænde batteriet.
2. Slukning: Tryk på tænd/sluk-knappen i 5 sekunder for at slukke.
3. Batteriet slukker automatisk, hvis det ikke har været opladet eller brugt i 72 timer.

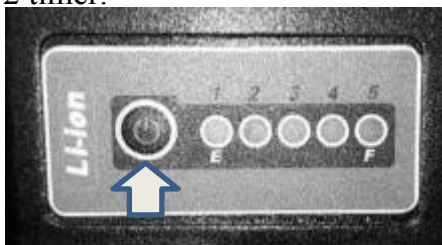

FEJLFINDING

Hvis der opstår et problem efter fejlfinding, skal du kontakte en autoriseret serviceudbyder.

STATUSINDIKATOR FOR BATTERIKASSENS BESKYTTELSE :

Indikator	Årsager	Fejlfinding
	Rødt lys og det fjerde grønne lys tændt: Beskyttelse ved høje temperaturer.	Vent, indtil batteriets temperatur er faldet til stuetemperatur, og enheden automatisk starter igen.
	Rødt lys og det tredje grønne lys tændt: Beskyttelse ved lave temperaturer.	Vent, indtil batteriets temperatur er steget til stuetemperatur, og enheden starter automatisk igen.
	Rødt lys og det første grønne lys tændt: Kortslutningsbeskyttelse.	Fjern kortslutningsproblemet. Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at tænde batteriet, når kortslutningsproblemet er afhjulpet.

STATUSVISNING AF STRØMFORSYNINGEN TIL BATTERIKASSEN :

	Rødt lys blinker: Kapacitet 0 %-9 % Rødt lys lyser: Kapacitet 10 %-19 %
	Det første grønne lys lyser: Kapacitet 20 %-39 % Det første grønne lys blinker: Opladning, Kapacitet 40 %-59 %
	De to første grønne lys lyser: Kapacitet 20 %-39 % Det første grønne lys lyser, det andet grønne lys blinker: Kapacitet 40 %-59 %
	Den tre tre grønne lamper lyser: Kapacitet 60 %-79 % ; De første to grønne lys lyser, det tredje grønne lys blinker: Opladning, kapacitet 60 %-79 %
	Fire grønne lys lyser: Kapacitet 80 %-100 %; de første tre grønne lys lyser, det fjerde grønne lys blinker: Opladning, kapacitet 80 %-99 %.

LED-SIGNALMEDDELELSE PÅ BATTERILADEREN UNDER OPLADNING:

RØD: Strøm tilsluttet, mens den er frakoblet batteriet ORANGE:

Opladning

GRØNT: Fuldt opladet



Efter opladning:

1. Træk stikket til batteriopladeren ud af stikkontakten.
2. Træk stikket til batteriopladeren ud af el-køretøjet.

IX. FEJLFINDING

Det er muligt at afhjælpe nogle enkle fejl/forstyrrelser selv!

Nogle enkle kontroller:

1. Kontroller, om hovedafbryderen er i den rigtige position.
2. Er batteriet fuldt opladet? (Se "Batteri og opladning")
3. Er batteriet og batteriholderen korrekt installeret og låst fast?
4. Er friløbsgrebet i positionen "Drift"?

OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE

Hvis du forsøger at køre el-kørestolen over en høj forhindring (f.eks. en kantsten) eller en stejl stigning, kan overbelastningsbeskyttelsen udløses og dermed afbryde strømforsyningen, hvis motoren overbelastes.

Udseende:

Den elektriske køretøj bliver kører langsomt og holder derefter . Kontrolsystemet slukker.

Sådan løser du problemet:

1. Sluk for el-kørestolen og lad den køle af i et par minutter.
2. Tænd for el-køretøjet, kør baglæns væk fra forhindringen og undvig derefter forhindringen.

FEJLKODE

Hvis ovenstående problem stadig ikke kan løses, eller LED-statusindikatoren på højre side af betjeningspanelet fortsat blinker, skal du kontakte din autoriserede serviceudbyder.



X. GARANTIOPLYSNINGER

K-Lite FE / F GARANTI

Modellerne *K-Lite FE / F* er dækket af en garanti på 24 måneder fra købsdatoen, med undtagelse af batteriet (6 måneder).

VIGTIGT!

I garantiperioden repareres eller udskiftes alle dele, der er blevet ubrugelige på grund af fabrikations- eller materialefejl, af din KYMCO HEALTHCARE-leverandør/forhandler.

- Dæk og alle genstande, der er udsat for slitage, samt genstande, der er blevet misbrugt, er undtaget fra garantien.
- Uautoriserede ændringer eller modifikationer medfører, at garantien bortfalder.
- Hvis der opdages en defekt eller fejl, skal din **KYMCO** Healthcare-leverandør/forhandler, hvor el-kørestolen er købt, straks underrettes.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Garantien dækker ikke de afledte omkostninger ved afhjælpning af mangler, især fragt- og rejseomkostninger, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter osv.

Producenten påtager sig intet ansvar for skader eller personskader, der opstår som følge af misbrug eller manglende overholdelse af instruktionerne i denne brugervejledning.

Fra KWANG YANG Motor Co., Ltd.

Første udgave, april 2020

Alle rettigheder forbeholdes. Enhver reproduktion eller uautoriseret brug uden skriftlig tilladelse fra KWANG YANG Motor Co., Ltd. er strengt forbudt.

T300- EQ10EA-

A1 T300-

EQ10EB-A1



KYMCO UK Limited (Healthcare
Division) 30 North Road
Bridgend Industrial Estate
Bridgend CF31 3TP
T: +44(0)1656 645755
E: sales@kymcouk.co.uk
W: www.kymcohealthcare.com



KWANG YANG MOTOR CO., LTD
NO.35 Wan Hsing Street, San Min District Kaohsiung
City, Taiwan, Republikken Kina

EQ10EA



(01)04713108141006

EQ10EB



(01)04713108141013

Distributør:



aktiv Deutschland Elektromobile GmbH & Co. KG

Gnutzer Str. 14

D-24589

Nortorf

Tlf.: +49(0)4392 / 913090

Fax: +49(0)4392 / 9130910

E-mail: info@aktivdeutschland.de

Internet: www.aktivdeutschland.de

Importør:



KYMCO LUX S.A.

Stephane Goeury

ZAE Robert

Steichen 5 Rue

Bommel

L-4940 Hautcharage, Luxembourg

Tlf.: +352(0)2634 571

Fax: +352(0)2634 5757

E-mail: stephane.goeury@kymcolux.com

Internet: www.kymcolux.com

Producent:

KWANG YANG MOTOR CO., LTD
NO.35 Wansing St., Sanmin District,
Kaohsiung City, 80794 Taiwan, (R.O.C.)
Telefon: 886-7-3822526
Fax: 886-7-3950021