

BRUGSANVISNING



Ortopædisk pude

Produktkode: CPAP DREAM

Ortopædisk pude

Produktkode: ORTO DREAM

Ortopædisk benpude m. to funktioner

Produktkode: SPACER

1. Udførelse

CPAP DREAM

Puden er profileret og fremstillet i hukommelseskum og dermed giver brugerne af CPAP-apparater bedst komfort. Specialopbygningen af puden modvirker, at slangen flytter på masken om natten. Betrækket er m. lynlås og lavet af et blødt, luftgennemtrængeligt stof af højeste kvalitet.

ORTO DREAM

Puden er fremstillet i hukommelseskum og dermed giver god støtte og holder den cervikale del af ryggen og hovedet i sund position under søvn. Puden har et blødt betræk m. lynlås, lavet af et kvalitetsstof, der er kendetegnet ved blødhed og god luftgennemtrængelighed.

SPACER

Den todelte pude er fremstillet i hukommelseskum, der tilpasser sig kroppen og sikrer uovertruffen komfort. Den kan foldes sammen el. åbnes. Puden har et blødt betræk m. lynlås, lavet af et kvalitetsstof, der er kendetegnet ved blødhed og god luftgennemtrængelighed.

2. Anvendelse

CPAP DREAM

Puden er beregnet til personer, der lider af søvnapnø og bruger CPAP-apparatet. Den støtter komfortabelt dit hoved m. en CPAP-maske under søvnapnøbehandlingen. Specialudskæringerne giver en bedre tilpasning af

masken, og det anvendte hukommelseskum støtter hovedet og tilpasser sig til kroppens form.

Puden hjælper m. at lindre problemer, der skyldes ukorrekt nakke- og hovedposition under søvn (rygsmerter, muskelspændinger, myrekryb og sovende fornemmelse i arme og ben, mv.). Puden kan bruges profylaktisk for at få en bedre nattesøvn.

ORTO DREAM

Puden hjælper m. at holde den cervikale del af ryggen i en sund position. Den tilpasser sig til den naturlige cervikale krumning og dermed lindrer muskelspændinger i nakken. Puden er beregnet til personer, der har brug for stabil støtte til hovedet og nakken under søvn. Samtidigt reducerer den trykket på kroppen. Puden hjælper m. at lindre problemer, der skyldes ukorrekt nakke- og hovedposition under søvn (rygsmerter, muskelspændinger, myrekryb og sovende fornemmelse i arme og ben, mv.). Puden kan bruges profylaktisk for at få en bedre nattesøvn.

SPACER

Puden modvirker smerter i knæleddene og anbefales til personer efter hofteprotesekirurgi. I sammenfoldet form hjælper puden m. at holde bækkenet og hofterne i sund position, hvilket lindrer spændinger, smerter og modvirker træthed i benene. Den kan også åbnes og bruges til støtte af knæ og underben mhp. at sikre en korrekt kropssposition.

Puden hjælper m. at holde leddene i sund position og forbedrer blodcirkulationen i benene. Den kan også bruges profylaktisk hos patienter m. risiko for liggesår.

3. Kontraindikationer

Personer m. alvorlige sygdomme el. permanente forandringer i den cervikale del af ryggen skal rådføre sig m. læge el. fysioterapeut før puden tages i brug (vedrører CPAP DREAM og ORTO DREAM).

4. Bemærkninger

Timago International Group frasiger sig ethvert ansvar for u hensigtsmæssig anvendelse af produktet, manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvendelse af produktet i strid med formålet.

5. Tekniske parametre

Model	CPAP DREAM	ORTO DREAM	SPACER
Størrelse	50 x 30 x 10 cm	60 x 40 x 12 cm	25 x 20 x 15 cm
Gęstość	45D	45D	45D
Sammensætning	Betræk: Bomuld 90%, Polyester 10% Fyld: Termoelastisk skum	Betræk: Polyester 100% Fyld: Termoelastisk skum	Betræk: Polyester 100% Fyld: Termoelastisk skum
Betræk	gennemtrængelig for vanddamp, lynlås	gennemtrængelig for vanddamp, lynlås	gennemtrængelig for vanddamp, lynlås
Farve	Hvid	Hvid	Grå

6. Vedligeholdelse

- Betrækket skal håndvaskes i lunkent vand, uden centrifugering. Må ikke kloreres, stryges, bleges, tørretumbles el. renses kemisk.
- Tørres ved stuetemperatur væk fra stærke varmekilder.

Bemærk! Vedligeholdelsesoplysningerne er anført mærket.










7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet bør ikke udsættes for direkte sollys, vand og fugt.

8. Garantioplysninger

Produktet er omfattet af garantien. Garantivilkårene er beskrevet i garantikortet, som du fik udleveret. Gem købsbeviset (kvittering el. faktura) til garantiformål.

9. Mærkning

	Referencenummer		Producent
	Partinummer		Produktionsdato
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs brugsanvisningen nøje igennem
	Producenten har vurderet produktets forenelighed m. de væsentlige krav, der stilles til medicinsk udstyr.		

Kontakt vores forhandlere for at gøre dig bekendt med hele vores sortiment.
For nærmere oplysninger se hjemmesiden **www.timago.com**
Tak fordi du har valgt Timago produktet!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa [ApS og K/S]
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

Tlf.: +48 33 499 50 00
Telefax: +48 33 499 50 11
E-mail: info@timago.com



07/2023(I)