

BRUGSANVISNING

3-i-1 bruse- og toiletstol med transportfunktion

Produktkode: SANI-TIM




1. Egenskaber

Bruse- og toiletstolen er fremstillet af en aluminiumsramme med pulverlakering. Den har opklappelige armlæn, som gør det nemt for personer med nedsat mobilitet at komme ind og ud af stolen. Stolen er udstyret med et PU-sæde med kile, forreste svingbare 5" hjul med bremses, bageste 24" massive hjul med quick-release funktion og aftagelige fodstøtter. Stolen har desuden et håndtag til ledsageren og en sanitetsbeholder. Konstruktionen gør det muligt at placere stolen over et toiletsæde.

Sættet indeholder: Stol – højre og venstre ramme med hjul, ryglæn med armlæn, sæde med kile, højre og venstre fodstøtte, sanitetsbeholder med låg, baghjul 24" (2 stk.), øvre og nedre forreste forbindelsesrør, bageste forbindelsesblok, skruer med dækhætter (6 stk.), låseknapper (2 stk.) og unbrakonøgle.

Elementer på stolen:

- A. Håndtag
- B. Ryglæn
- C. Armrest
- D. Sæde
- E. Sanitetsbeholder
- F. Fodstøtte
- G. Lås til opklappelige armlæn
- H. Parkeringsbremse
- I. 5" hjul med bremse
- J. Baghjul 24" med drivring
- K. Quick-release mekanisme

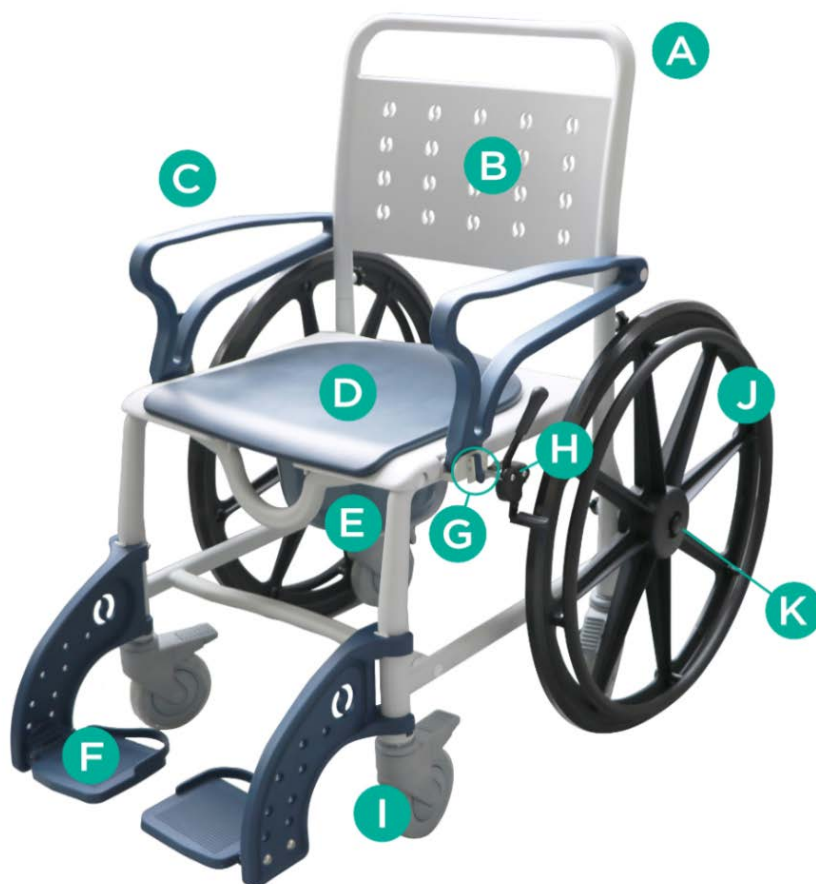

2. Anvendelse

Bruse- og toiletstole er beregnet til personer, der har svært ved at bevæge sig selvstændigt, samt til patienter med funktionsnedsættelser eller nedsat mobilitet.


Stolen er kun beregnet til indendørs brug. Den fungerer både som bruse- og toiletstol takket være den fugtbestandige aluminiumsramme og sanitetsbeholderen under sædet. Den letter den daglige hygiejne. Stolen anbefales især til personer med nedsat mobilitet forårsaget af lammelser, overvægt eller undervægt, deformiteter i lemmerne, degenerative sygdomme, ledsader, skader eller amputationer samt hjerte-kar- eller kredsløbssygdomme.

3. Montering

1. For at forhindre, at rammen bevæger sig under montering, skal bremserne låses ved at trykke bremsehåndtagene ned.
2. Forbind højre og venstre ramme med rørene ved hjælp af skruer og unbrakonøgle (billede 1). Sæt derefter dækhætterne på monteringshullerne (billede 2).



3. Monter sædet øverst på rammen. Skub sanitetsbeholderen ind under sædet bagfra.
4. **Monter baghjulene:** Indsæt quick-release mekanismen (K) i åbningen til baghjulet. Sørg for, at den midterste ring inde i åbningen er centreret og ikke dækker åbningen (billede 3 og 4). Indsæt mekanismen i åbningen, mens du samtidig trykker på den sorte hætte (billede 5). Når mekanismen sidder på hjulet, sættes det ind i åbningen på stolens bagramme, mens du igen trykker på den sorte hætte. En korrekt monteret mekanisme skal gå gennem åbningen på den anden side af rørstrukturen (billede 6). Gentag på den anden side.

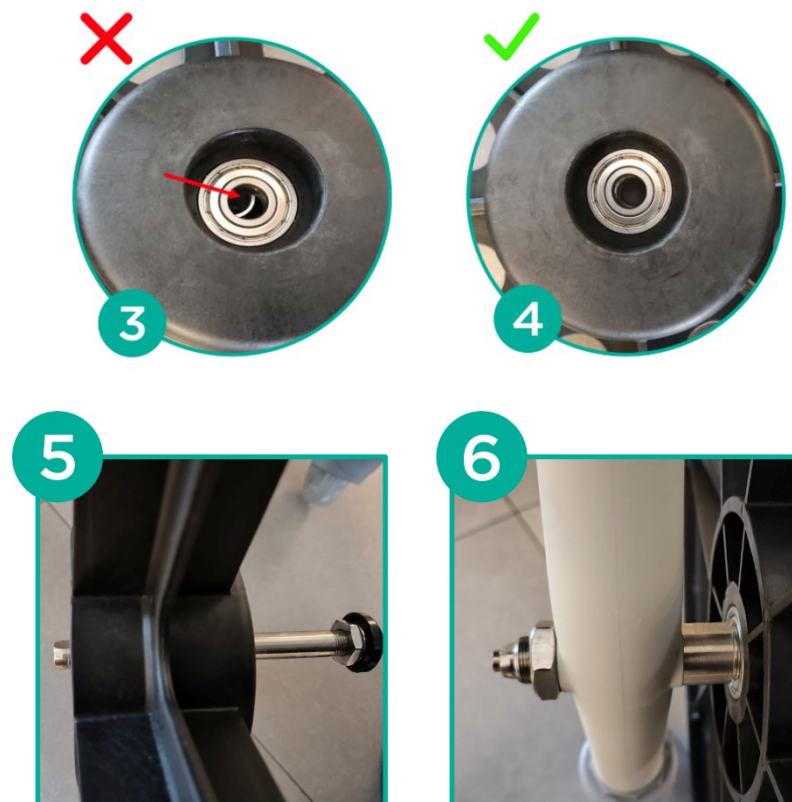

5. Placer ryglænets rør på stolens ramme og fastgør dem med låseknapper. Tryk på armlænets lås og sænk armlænene, indtil de klikker på plads.
6. Fastgør fodstøtterne på stolens forreste rammedele (billede 2).



BETJENING AF STOLEN

- Kontroller parkeringsbremsen, konstruktion og hjulenes tilstand. Kontroller, at alle dele er korrekt samlet og justeret.
- Før brug skal du sikre, at stolens bredde passer til brugeren, da stolen ikke har breddejustering.
- Stolen er beregnet til korte afstande og kun til indendørs brug. Den har ingen støddæmpning, så langvarig brug frarådes.

BEMÆRK! Brug ikke stolen, hvis der opdages fejl eller mangler.

OPKLAPPELIGE ARMLÆN

- Tryk på låsen (G) under armlænet, og løft armlænet forsigtigt op.

- Brug ikke armlænet som støtte ved oprejsning. Hvis hjælp er nødvendig – bed om assistance.

QUICK-RELEASE FUNKTION FOR BAGHJUL

- Baghjulene på 24" kan nemt fjernes takket være quick-release funktionen, hvilket gør det muligt at bruge stolen som bruse- eller toiletstol. For at fjerne baghjulet trykkes der på den sorte hætte på quick-release mekanismen (K), og hjulet tages ud.
- For at montere det igen trykkes der på den sorte hætte, og mekanismen føres tilbage i åbningen på stolens bagramme.

BREMSER

- For at låse forhjulene trykkes pedalerne ned med foden. For at frigøre hjulene løftes pedalen op.
- For at låse baghjulene trækkes parkeringsbremsens håndtag fremad. For at frigøre hjulet trækkes håndtaget i den modsatte retning.

AT SÆTTE SIG I STOLEN

- Det er vigtigt at låse bremserne, når brugeren sætter sig, rejser sig eller skifter position.
- Stolen skal placeres så tæt som muligt på det sted, hvor overflytningen sker. Den bør røre sengen eller det sæde, brugeren flyttes til. Hvis brugeren ikke kan flytte sig selvstændigt, skal overflytningen udføres med hjælp.
- Brugeren skal sidde så langt tilbage i midten af sædet som muligt for at undgå ustabilitet.
- Træd ikke på fodstøtten ved ind- eller udstigning – dette kan beskadige stolen.

4. Tekniske data

Samlet bredde	68,5 cm
Indvendig bredde	50 cm
Samlet dybde	104 cm
Sædehøjde fra gulv	52 cm
Samlet højde	100 cm*
Sædemål	50 x 45 cm
Vægt	22 kg

Maksimal belastning	120 kg
Rammefarve	hvid

* højde målt med 24" hjul

5. Bemærkninger

Timago International Group er ikke ansvarlig for forkert brug af produktet eller manglende overholdelse af sikkerhedsregler.

6. Rengøring og vedligeholdelse

Udfør regelmæssig vedligeholdelse af stolens dele:

- Sædet kan rengøres med en fugtig klud og koldt eller lunkent vand uden brug af rengøringsmidler. Vanskelige pletter kan fjernes med en svamp.
- Plastdele skal rengøres med en fugtig klud og egnede rengøringsmidler til plast. Følg producentens instruktioner og sikkerhedsforanstaltninger.
- Tøm og desinficér toiletbeholderen og toiletsædet efter hver brug. Brug rengøringsmidler i henhold til producentens anbefalinger.

7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet må ikke udsættes for direkte sollys, vand eller fugt.

8. Garantiinformation

Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er dækket af en garanti, hvis betingelser er beskrevet i garantikortet, som findes på vores hjemmeside. Kontakt venligst forhandleren, hvor du har købt produktet. Husk at opbevare købsbeviset (kvittering eller faktura) for at kunne gøre brug af garantien.

9. Mærkater

	Referencenummer		Producent
	Batchnummer		UDI-kode
	Serienummer		Medicinsk udstyr

	Bemærk		Læs venligst brugsanvisningen
	Producenten har kontrolleret overensstemmelsen med væsentlige krav til medicinsk udstyr.		

Vores komplette sortiment af produkter fås hos vores distributører. Læs mere på:
www.timago.com. Tak fordi du valgte Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



10/2025 (I)