

BRUGSANVISNING

Sengegærde

Produktkode: HandyGrip




1. Egenskaber

Sengegærdet er fremstillet af holdbart, pulverlakeret stål. Det har et skumhåndtag og en lomme til småting. Gærdet leveres med skruer og en sikkerhedsrem, der giver brugeren ekstra stabilitet og komfort.

Sættet indeholder: sengegærde med lomme, skruer, sikkerhedsbælte.

Håndlistens elementer:

- A. Håndtag
- B. Rammefoldemekanisme
- C. Lomme til genstande
- D. Nedre ramme
- E. Øvre ramme

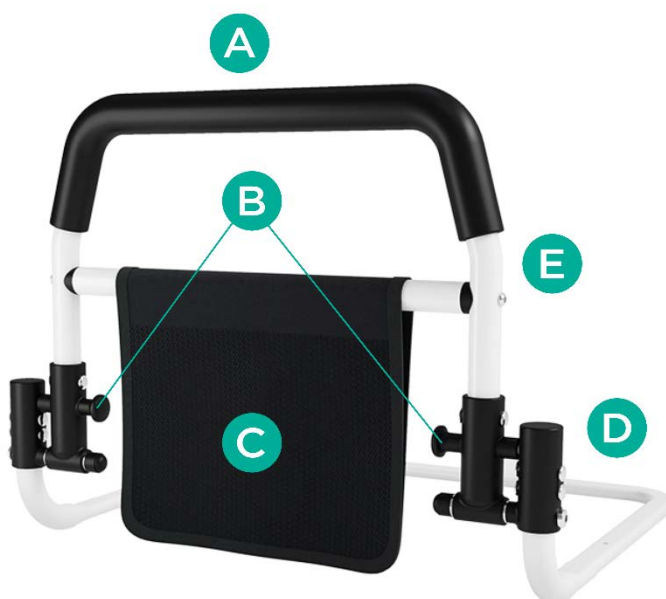

2. Anvendelse

Sengegærdet er designet til at yde støtte ved opståen eller skift fra liggende til siddende stilling i sengen. Gærdet anbefales til personer med nedsat mobilitet, der hindrer dem i at udføre daglige aktiviteter uden hjælp. Sengegærdet anbefales til brug både under pleje på medicinske institutioner og i hjemmet.

3. Samling

Trin 1. Tag sengegærdet ud af kassen og fold det ud, indtil du hører et klik.

Trin 2. Placer sengegærdets underramme på sengens bund, med overrammen vendt udad.

For ekstra sikkerhed bør sengegærdet monteres ved hjælp af to metoder:

- Skruer, der følger med sættet: Placer den nederste ramme på sengestel og fastgør den med skruer ved hjælp af en skruetrækker eller boremaskine.
- Sikkerhedsbælte, der følger med sættet: Placer den nederste ramme på sengestel og fastgør den med bæltet omkring sengestel.

Trin 3. Placer madrassen på sengen, så den dækker sengegærdets underramme.

Sengegærdet er klar til brug.

SAMMENKLAPPELSE/UDKLAPPELSE

Sengegærdet kan foldes sammen, hvilket gør det nemmere for brugeren at opbevare eller transportere det, hvis det er nødvendigt:

- For at folde gelænderet sammen til transport skal du tage fat i rammens foldemekanisme (B) og trække udad, så gelænderets øverste ramme sænkes.
- For at folde rammen ud skal du tage fat i den øverste ramme ved håndtaget og løfte den op, indtil

4. Tekniske data

Samlet højde	44 cm
Samlet bredde	57 cm
Samlet dybde	50 cm
Håndtagslængde	38 cm
Mål efter sammenfoldning	50 x 57 x 14,5 cm
Tykkelse på underrammerør	1,2 cm
Vægt	2,00 kg
Maks. vægtpacitet	136 kg

5. Bemærkninger

Timago International Group påtager sig ikke ansvaret for forkert brug af produktet, manglende overholdelse af sikkerhedsbestemmelser og misbrug.

6. Vedligeholdelse

Rengør rammen og tasken regelmæssigt med en fugtig klud uden brug af rengøringsmidler. Tør grundigt af. Svære pletter på tasken kan rengøres med en svamp.

7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet må ikke udsættes for direkte sollys, vand eller fugt.

8. Garantiinformation










Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er dækket af en garanti, hvis betingelser er beskrevet i garantikortet, som findes på vores hjemmeside. Kontakt

venligst forhandleren, hvor du har købt produktet. Husk at opbevare købsbeviset (kvittering eller faktura) for at kunne gøre brug af garantien.

9. Hændelser med medicinsk udstyr

Enhver alvorlig hændelse, der involverer et medicinsk udstyr, skal rapporteres til producenten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat i Den Europæiske Union, hvor brugeren eller patienten har bopæl.

10. Mærkater

	Referencenummer		Producent
	Batchnummer		UDI-kode
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs venligst brugsanvisningen
	Produktet opfylder Den Europæiske Unions lovgivningsmæssige krav til medicinsk udstyr (MDR 2017/745).		

Vores komplette sortiment af produkter fås hos vores distributører. Læs mere på: www.timago.com. Tak fordi du valgte Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



04/2026(I)