

BRUGSANVISNING

Sammenklappelig brusestol til vægmontering

Produktkode: JMC-C 5105



1. Udførelse

En vægmonteret brusestol består af et sæde, som er lavet af holdbart PVC, ben m. gummifødder m. antiskrid og monteringsbeslag, der muliggør vægmontering. Den sammenklappelige konstruktion gør gangstativet pladsbesparende, når du ikke bruger det. Takket være den trinvis højdejustering på benene, kan stolen tilpasses til brugerens specifikke højde. Stolen er lavet af materialer m. øget modstandsdygtighed over for fugt.

Leveringen omfatter: En stol og et monteringsæt (ekspansionsbolte m. en nøgle).

Bemærk! Ved leveringen medfølger der kun ekspansionsbolte af standardtype. Inden du går i gang med montering af stolen kontroller, på hvilket underlag den skal monteres for at vælge ekspansionsbolte af passende type afhængigt af underlaget (mursten, hulsten, gipskartonplade)

Bestanddele:

- A. monteringsbeslag
- B. monteringshuller
- C. et sæde
- D. pinde til højdejustering
- E. fødder m. antiskrid



2. Anvendelse

En brusestol er et hjælpemiddel, der gør det nemmere for brugeren at udføre de daglige hygiejnerutiner. Den anbefales til personer m. nedsat fysisk funktionsevne, der gør det umuligt el. vanskeligt for vedkommende selvstændigt

at udføre dagligdags aktiviteter. Stolen er designet til brug i brusebad, i badekar, på badeværelset og i andre vådrum, under hjemlige forhold og på hospitalet.

3. Montering

Trin 1. Inden stolen monteres, skal den tilpasses til brugerens specifikke højde. For at justere stolen i højden, skal du trykke på låsepinden og vælge den ønskede benhøjde, og dernæst låse det i position. Højden på benene justeres trinvist for hver 2,5 cm.

Bemærk! Låsepindene i begge ben skal være indstillet til samme højde.

Trin 2. Markér de steder på væggen, hvor monteringsbeslagene skal sidde. Markér 8 monteringshuller.

Trin 3. Bor de 8 monteringshuller, som du har markeret, i væggen,

Trin 4. Fastgør monteringsbeslagene på væggen m. 8 dertil egnede ekspansionsbolte – valg af ekspansionsbolte afhænger af underlaget (mursten, hulsten, gipskartonplade)

Bemærk! Undlad at bruge stolen, hvis benene ikke hviler stabilt på underlaget.

4. Teknisk specifikation

Sædedimensioner	32-40 cm
Højdejustering	42-52 cm
Vægt	2,15 kg
Maks. belastning	136 kg

5. Bemærkninger og anvisninger

Timago International Group frasiger sig ethvert ansvar for u hensigtsmæssig anvendelse af stolen, manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvendelse af stolen i strid med formålet.

6. Vedligeholdelse

- Stolen skal rengøres regelmæssigt i vand, m. en svamp og blide rengøringsmidler til plast.
- **Undlad at bruge:** aggressive poleringsmidler, stærke rengøringsmidler, slibemidler, blegemidler, benzin el. nogen som helst opløsningsmidler til rengøring (der er risiko for beskadigelse af stellet, synlige mangler, og som konsekvens heraf – bortfald af garantien).

- Kontrollér regelmæssigt: tilspændingen af skruerne, tilstanden af låsestifter til højdejustering, tilstanden af rørene (for evt. brud). Det anbefales at kontrollere gummifoden regelmæssigt. Er foden slidt, skal den udskiftes med en ny.

7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet må ikke udsættes for direkte sollys, vand eller fugt.

8. Garantiinformation

Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er dækket af en garanti, hvis betingelser er beskrevet i garantikortet, som findes på vores hjemmeside. Kontakt venligst forhandleren, hvor du har købt produktet. Husk at opbevare købsbeviset (kvittering eller faktura) for at kunne gøre brug af garantien.

9. Mærkater

	Referencenummer		Producent
	Batchnummer		UDI-kode
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs venligst brugsanvisningen
	Producenten har kontrolleret overensstemmelsen med væsentlige krav til medicinsk udstyr.		

Vores komplette sortiment af produkter fås hos vores distributører. Læs mere på: **www.timago.com**. Tak fordi du valgte Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



08/2025(II)