

BRUGERVEJLEDNING

Aluminium firehjulet rollator med knæstøtte

Produktkode: Knee Walker



1. Egenskaber

Firehjulet rollator med knæstøtte er lavet af en aluminiumsramme belagt med metallisk maling. Rollatoren er udstyret med en aftagelig taske, fodstøtte og en justerbar knæstøtte. Den har højdejusterbart styr med anatomiske håndtag, bremses på baghjulene og smalle hjul med en diameter på 8".

Sættet indeholder: sammenklappelig ramme, knæstøtte, universel fodstøtte, knop til fodstøtte, taske, 3 korte låseskruer og 1 lang låseskrue.

Rollatorens dele

- A. Håndbremses
- B. Styr
- C. Knæstøtte
- D. Låseskruer
- E. Bremsekabel
- F. Længdejustering
- G. Fodstøtte
- H. Knop til fodstøtte
- I. Sikkerhedsspænde
- J. Taske med reflekser



2. Anvendelse

Rollatoren er designet til patienter med nedsat mobilitet, som har behov for stabil støtte. Den anbefales også til ældre og personer med skader på underekstremiteterne som en hjælp til at holde balancen, øge komforten ved bevægelse og sikre beskyttelse mod fald. Brugen af rollatoren har en positiv indvirkning på tilbagevenden til aktivitet efter skader. Den garanterer bedre stabilitet, støtte og sikkerhed under bevægelse.

BEMÆRK! Rollatoren bør ikke bruges af personer med problemer eller skader i knæleddet på grund af det høje tryk, der påføres dette område under brug.

3. Montering




Udfoldning og sammenklapning af rollatoren



- Fold rollatoren ud, fastgør del A til del B, indtil du hører et klik fra låsebolten. Fastgør rammen med låseskruerne.

BEMÆRK! Længden mellem del A og B kan justeres. For at justere, løsnes låseskruen og tages ud, tryk derefter låsebolten ind på begge sider og justér rammen til passende længde. Fastgør rammen med låseskruen derefter.

- Fastgør baghjulene ved at indsætte den lange låseskruen i åbningen bag på del B. Den korrekt monterede låseskruen skal gå igennem alle 4 åbninger i del B (fig. 2). Stram låseskruen.
- Skub stangen frem, indtil styrets bund er helt forbundet med rollatorens bund (vandret position). Stram sikkerhedsspændet (se fig. 3–5).

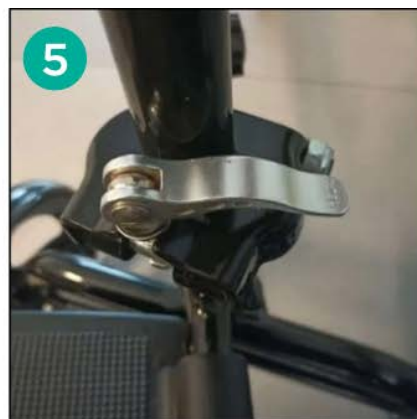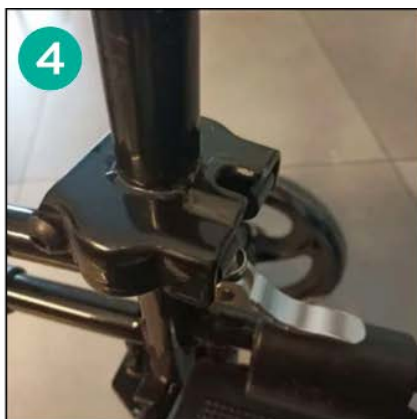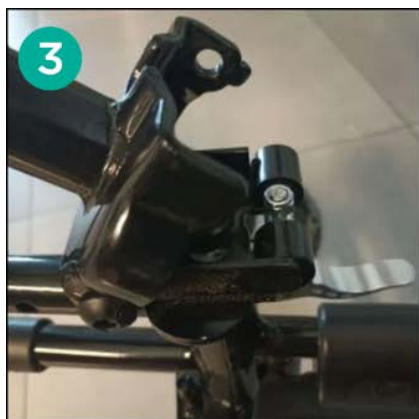

- Fastgør styret ved at trække det op til den ønskede længde. Før låseskruen gennem åbningen foran og spænd med knoppen på den anden side.
- Fastgør knæstøtten i åbningen i del B. Vælg den passende højde og fastgør den med låseskruen.
- Fastgør fodstøtten med den medfølgende skrue.



- Skub tasken ind i de øverste åbninger på den særlige plade foran på stangen. Tryk tasken nedad for at fastgøre den (fig. 6). For ekstra sikkerhed, fastgør velcrobåndet bag på tasken omkring rammen.

BEMÆRK! En ekstra indsats af hårdt materiale findes i bunden af tasken. Brug velcrobåndene til at fastgøre den.

- For at folde rollatoren sammen, gentag ovenstående trin i omvendt rækkefølge. Husk at: fjerne alle låseskruer, adskille del A fra del B, fjerne knæstøtten og folde styret ned i vandret position.

BEMÆRK! Når du folder styret sammen, skal du sørge for at låse sikkerhedsspændet op og trække det til siden for at adskille stangens bund fra rammen.

BREMSER

- For at standse rollatoren skal du trykke på begge bremsehåndtag samtidigt.

HØJDEJUSTERING AF STYR

- For at justere højden på styret skal du løsne låseskruerne på ydersiden af rammen, vælge den ønskede højde og spænde skruerne igen.

4. Tekniske data

Samlet bredde	44 cm
Knæstøtte dimensions	35 x 18 cm
Samlet længde	84-89 cm
Sædehøjde fra jorden	45,5-58 cm
Justerbar højde på styret	89-119 cm
Vægt	9,6 kg

Maksimal belastning	136 kg
Rammens farve	sort

5. Bemærkninger

Timago International Group er ikke ansvarlig for forkert brug af rollatoren, manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne eller misbrug.

6. Vedligeholdelse

Rengøring

- Rengør rammen med en fugtig klud og tør den grundigt.
- Brug ikke stærke rengøringsmidler, da det kan beskadige beskyttelsesbelægningen.
- Fjern regelmæssigt snavs fra bevægelige dele af rollatoren (hængsler, spændeskruer, låse).

7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet må ikke udsættes for direkte sollys, vand eller fugt.

8. Garantiinformation

Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er dækket af en garanti, hvis betingelser er beskrevet i garantikortet, som findes på vores hjemmeside. Kontakt venligst forhandleren, hvor du har købt produktet. Husk at opbevare købsbeviset (kvittering eller faktura) for at kunne gøre brug af garantien.

9. Mærkater

	Referencenummer		Producent
	Batchnummer		UDI-kode
	Serienummer		Medicinsk udstyr

	Bemærk		Læs venligst brugsanvisningen
	Producenten har kontrolleret overensstemmelsen med væsentlige krav til medicinsk udstyr.		

Vores komplette sortiment af produkter fås hos vores distributører. Læs mere på: **www.timago.com**. Tak fordi du valgte Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



06/2025(I)