

BRUGSANVISNING

Skummadras med vaskbart, dampgennemtrængeligt betræk

Produktkode: MOON-TIM



Før produktet tages i brug, skal denne brugsanvisning læses. Brugsanvisningen indeholder oplysninger, der er nødvendige for sikker og korrekt anvendelse af produktet samt vejledning i vedligeholdelse og rengøring. Brug af produktet, der ikke er i overensstemmelse med denne brugsanvisning, kan medføre alvorlige komplikationer. Brugsanvisningen bør opbevares på et let tilgængeligt sted.

1. Egenskaber

Madrassen er fremstillet af polyuretanskum og leveres med et vaskbart, dampgennemtrængeligt betræk med lynlås.

2. Anvendelse

Skummadrassen bidrager til korrekt støtte af kroppen i de forskellige dele af rygsøjlen og påvirker desuden reguleringen af muskelspænding i hvile. Den anvendes under behandling, rekonvalescens eller rehabilitering samt til permanent immobiliserede patienter.

3. Kontraindikationer for brug:

- Brug ikke produktet, hvis det ikke passer til sengens ramme.
- Brug ikke produktet til andre formål end det tilsigtede.
- Brug ikke produktet i nærheden af åben ild eller på en varm overflade. Dette kan forårsage alvorlig skade på brugeren og føre til alvorlige helbredsskader.

4. Bemærkninger



Producenten påtager sig ikke ansvar for forkert vedligeholdelse af produktet, manglende overholdelse af sikkerhedsregler eller forkert anvendelse.

- Huden på kontaktstedet skal være ren.
- Det er nødvendigt regelmæssigt at kontrollere patientens hudtilstand.
- Brugers position bør ændres regelmæssigt for at undgå dannelse af liggesår/sår.
- Brug ikke skarpe genstande eller udstyr, der kan beskadige betrækket.
- Madrassen skal tilpasses sengens størrelse.
- Oprethold høj hygiejne af madrasbetrækket: rengør og/eller vask det.

- Hvis produktet ikke længere er egnet til brug, skal det bortskaffes. Før bortskaffelse skal produktet rengøres for at eliminere risikoen for kontaminering.
- Hvis der opstår uønskede symptomer som følge af brugen af produktet, skal dette rapporteres til producenten og til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren eller patienten er bosat.

5. Udpakning og tilpasning

- Når du modtager madrassen, skal du åbne emballagen forsigtigt for ikke at beskadige madrassen.
- Læg madrassen på en plan overflade og vent, indtil alle deformationer, der er opstået under transporten, vender tilbage til deres oprindelige form.
- Madrassen skal tilpasses patientens seng for at kunne opfylde sine funktioner fuldt ud.

6. Tekniske data

PARAMETRE	MOON-TIM
Længde	200 cm
Bredde	90 cm
Højde	10 cm
Maksimal belastning	100 kg

7. Rengøring og vedligeholdelse

- Vask ikke skummadrassen.
- Vask betrækket efter at have fjernet skumindsatsen med et mildt vaskemiddel ved temperaturer op til 90°C.
- Betrækket kan steriliseres ved temperaturer op til 120°C.
- Betrækket kan desinficeres med op til 60 % alkoholopløsning.
- Brug ikke blegemidler eller kemikalier.
- Må ikke kemisk renses.
- Brug ikke kemikalier, der indeholder klor.
- Det anbefales at tørre i udfoldet tilstand.
- Undgå kraftig tilsmudsning.

8. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet må ikke udsættes for direkte sollys, vand eller fugt.

9. Garantiinformation

Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er dækket af en garanti, hvis betingelser er beskrevet i garantikortet, som findes på vores hjemmeside. Kontakt venligst forhandleren, hvor du har købt produktet. Husk at opbevare købsbeviset (kvittering eller faktura) for at kunne gøre brug af garantien.










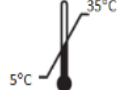
REKLAMATIONER OMFATTER IKKE:


- Mekaniske skader (slid, ridser).
- Skader som følge af normal brug.
- Defekter som følge af forkert tilpasning af madrassen til sengen.
- Defekter som følge af manglende overholdelse af brugsbetingelser eller rengørings- og vedligeholdelsesanvisninger.
- Misfarvning af betrækket.
- Brugerkomfort.

10. Hændelser med medicinsk udstyr

Enhver alvorlig hændelse, der involverer et medicinsk udstyr, skal rapporteres til producenten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat i Den Europæiske Union, hvor brugeren eller patienten har bopæl.

11. Mærkater

	Referencenummer		Producent
	Batchnummer		UDI-kode
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs venligst brugsanvisningen
	Udløbsdato		Tilladt opbevaringstemperatur

	Opbevares på et tørt sted		Beskyttes mod sollys
	Beskyttes mod sollys		Emballagen skal bortskaffes som affald
	Produktet opfylder Den Europæiske Unions lovgivningsmæssige krav til medicinsk udstyr (MDR 2017/745).		

Vores komplette produktsortiment er tilgængeligt hos vores distributører. Læs mere på: www.timago.com. Tak fordi du valgte Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



04/2026 (I)