

BRUGSANVISNING

Bade- og toiletstol

Produktkode: Movano



1. Egenskaber

Bade- og toiletstolen er fremstillet af holdbart PP-materiale (polypropylen). Den har højdejusterbare aluminiumsben med skridsikre gummifødder. Justeringen gør det muligt at tilpasse stolen til patientens individuelle behov. Ryglæn og sæde er udstyret med bløde, aftagelige puder. Sidearmmlæn øger stabiliteten og sikkerheden under brug. Stolen er udstyret med en let udtrækkelig toiletpand af plast med låg.

Sættet indeholder: sæderamme, ryglæn, armlæn (2 stk.), ben med fødder (4 stk.), sædepude, rygpude og toiletpand med låg.

Toiletstolens dele:

- A. ryglæn
- B. rygpude
- C. armlæn
- D. sædepude
- E. sæderamme
- F. ben
- G. skridsikre fod
- H. toiletpand



2. Anvendelse

Bade- og toiletstolen er et hjælpemiddel, der gør det lettere for brugeren at udføre hygiejniske aktiviteter. Den anbefales til personer, som har vanskeligt ved at bevæge sig selvstændigt, eller som har funktions- og bevægelsesbegrænsninger, der forhindrer eller vanskeliggør selvstændig

udførelse af dagligdagens aktiviteter. Stolen har toiletfunktion takket være toiletspanden under sædet. Den letter brugerens daglige fysiologiske behov og plejeaktiviteter. Stolen anbefales også til brug i brusebad og badekar både i hjemmet og på hospitaler.

3. Montering, justering og brug

MONTERING

Trin 1: Vend stolens ramme på hovedet, og sæt benene i monteringshullerne. Benene har låsestifter – tryk stiften ind, før benet sættes i, og lås derefter benet.

Trin 2: Juster benenes højde med justeringsstifterne.

Trin 3: Vend stolen rigtigt, og stil den på gulvet.

Bemærk: For at sikre stabilitet skal alle fire ben være indstillet i samme højde og stå fast på gulvet.

Trin 4: Sæt ryglænet i monteringshullerne i sæderammen (monteringslås).

Trin 5: Sæt begge armlæn i monteringshullerne i sæderammen (monteringslås).

Trin 6: Sæt toiletspanden med låg ind i åbningen i sæderammen.

Trin 7: Sæt rygpuden i monteringshullerne i ryglænet (3 monteringsclips).

Trin 8: Læg sædepuden på stolens sæde – pudens form gør den nem at placere korrekt.

HØJDEJUSTERING

For at justere stolens højde skal du trykke benenes justeringsstifter ind, vælge den ønskede højde og derefter låse den indstillede højde med stiften. Benene kan justeres i trin på 2,5 cm.

Bemærk: Alle ben skal være indstillet i samme højde og stå fast på gulvet.

BRUG

Løft sædepuden, og tag derefter låget af toiletspanden. Sæt låget på spanden efter brug, og læg sædepuden tilbage på sædet.

Bemærk! Husk at tømme toiletspanden efter hver brug.

4. Tekniske data

Samlet bredde	56 cm
Samlet dybde	48 cm

Ryglænets højde	35 cm
Sædehøjde fra gulvet	41-53 cm
Samlet højde fra gulvet	76-88 cm
Sædemål	46 x 43 cm
Vægt	5,1 kg
Maksimal belastning	150 kg
Farve	grå

5. Bemærkninger

Timago International Group påtager sig intet ansvar for ukorrekt brug af produktet, manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne eller misbrug.

6. Vedligeholdelse

Kontrollér regelmæssigt stolens tekniske tilstand:

- Rengør toiletstolen regelmæssigt med vand og milde rengøringsmidler. Tør den grundigt.
- Brug ikke stærke poler- eller rengøringsmidler, slibemidler, blegemiddel, benzin eller opløsningsmidler til rengøring (det kan beskadige rammen, forårsage synlige fejl og dermed medføre tab af garantirettigheder).
- Tøm og desinficér toiletspanden og toiletsædet efter hver brug.

7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet må ikke udsættes for direkte sollys, vand eller fugt.

8. Garantioplysninger

Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er omfattet af en garanti, hvis vilkår er beskrevet i garantikortet på vores hjemmeside. Kontakt den forhandler, hvor produktet blev købt. Husk, at købsbeviset (kvittering eller faktura) skal opbevares af hensyn til garantien.

9. Mærkning

	Katalognummer		Producent
---	---------------	---	-----------

	LOT-nummer		UDI-kode
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs brugsanvisningen
	Produktet opfylder de gældende EU-retlige krav til medicinsk udstyr (MDR 2017/745)		

Hele vores produktsortiment fås hos vores distributører. Læs mere på: www.timago.com. Tak, fordi du valgte Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



08/2025 (I)