

BRUGSANVISNING

Kørestolspude

Produktkode: SitWELL

Kørestolspude

Produktkode: ErgoTIM



Læs denne vejledning, inden du bruger produktet. Vejledningen indeholder oplysninger, der er nødvendige for sikker og korrekt brug af produktet, samt vedligeholdelse og rengøring. Brug af produktet i strid med brugsanvisningen kan medføre alvorlige komplikationer. Vejledningen skal opbevares et let tilgængeligt sted.

1. Egenskaber

Puden er fremstillet af polyurethanskum og leveres med et vandtæt, dampgennemtrængeligt betræk med lynlås.

2. Anvendelse

Puden anbefales til brug i kørestol, lænestol, stol eller bil. Den giver komfort, jævn vægtfordeling og fri luftcirkulation, hvilket hjælper med at forhindre tryksår, hæmorider og åreknuder. Ideel til daglig brug og rejser.

3. Kontraindikationer for brug:

- Brug ikke enheden, hvis den ikke er kompatibel med kørestolen.
- Brug ikke produktet til andet end dets tilsigtede anvendelse.
- Brug ikke produktet i nærheden af åben ild eller på en varm overflade. Det kan forårsage alvorlige skader på brugeren og føre til alvorlige helbredsskader.

4. Bemærk



Producenten påtager sig ikke ansvaret for forkert vedligeholdelse af produktet, manglende overholdelse af sikkerhedsbestemmelser og forkert brug.

- Huden på forbindelsesstedet skal være ren.
- Det er nødvendigt at kontrollere patientens hudtilstand regelmæssigt.

- Brugerens position bør ændres regelmæssigt for at undgå dannelse af sår/læsioner.
- Brug ikke skarpe genstande og udstyr, der kan beskadige betrækket.
- Pudene skal passe til sædets størrelse. Oprethold en høj hygiejnestandard for pudebetrækket: rengør og/eller vask det.

Hvis produktet ikke længere er egnet til brug, skal det bortskaffes. Inden bortskaffelse skal produktet rengøres for at eliminere risikoen for kontaminering.

Hvis der opstår uønskede symptomer som følge af brugen af udstyret, skal dette indberettes til producenten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren eller patienten er bosiddende.

5. Udpakning og montering

- Når du modtager forsendelsen med pudene, skal du åbne den forsigtigt for ikke at beskadige pudene.
- Læg pudene på en plan overflade og vent, til alle deformationer, der er opstået under transporten, er vendt tilbage til sin oprindelige form.
- Pudene skal monteres på patientens sæde for at kunne udføre sine funktioner fuldt ud.

6. Tekniske data

PARAMETRE	MODEL	
	SitWELL	ErgoTIM
Længde	40 cm	40 cm
Bredde	43/46 cm	46 cm
Højde	5 cm	7 cm
Maks. vægtpacitet	120 kg	120 kg
Konstruktion	Perforeret overflade	"pindsvin"-type overflade

7. Rengøring og vedligeholdelse

- Skumindsatsen må ikke vaskes.
- Vask betrækket efter at have fjernet skumindsatsen i et mildt rengøringsmiddel ved temperaturer op til 90 ° °C.

- Betrækket kan steriliseres ved temperaturer op til 120 °C.
- Betrækket kan desinficeres med en opløsning af op til 60 % alkohol.
- Brug ikke blegemiddel eller kemikalier.
- Rengør ikke kemisk.
- Brug ikke klorholdige kemikalier.
- Det anbefales at tørre betrækket i udfoldet tilstand.
- Undgå kraftig tilsmudsning.

8. Opbevarings- og transportbetingelser.

Produktet må ikke udsættes for direkte sollys, vand eller fugt.

9. Garantioplysninger

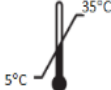
Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er dækket af en garanti, hvis vilkår er beskrevet i garantibeviset, der findes på vores hjemmeside. Kontakt den forhandler, hvor du har købt produktet. Husk, at købsbeviset (kvittering eller faktura) skal opbevares med henblik på garantien.

KLAGER ER IKKE GÆLDENDE FOR:

- Mekaniske skader (slid, ridser).
- Skader som følge af naturlig brug.
- Defekter som følge af forkert størrelse af sædehynden
- Defekter som følge af manglende overholdelse af brugsbetingelserne eller rengørings- og vedligeholdelsesmetoden.
- Misfarvning af betrækket.
- Komfort ved brug.

10. Mærker

	Referencenummer		Producent
	LOT-nummer		Unikke enhedsidentifikationer
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs venligst brugsanvisningen

	Udløbsdato		Tilladt opbevaringstemperatur
	Opbevares tørt		Beskyt mod sollys
	Emballagen kan genbruges		Emballagen skal bortskaffes i skraldespanden
	Producenten har kontrolleret, at de væsentlige krav til medicinsk udstyr er overholdt.		



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



12/2025(I)