

BRUGERVEJLEDNING

Rund badestol, drejeligt sæde, værktøjsfri montering

Produktkode: TGR-R KP-O 5021




1. Egenskaber

Badestolen har et aluminiumsstel og et drejeligt sæde fremstillet af slidstærkt PVC. Takket være de højdejusterbare ben kan stolen tilpasses brugerens højde, mens de skridsikre dupsko giver større stabilitet og sikkerhed. Desuden er stolen udstyret med et værktøjsfrit (TF) system, som gør monteringen nem.

Sættet indeholder: sæde, basisrør (2 stk.), højdejusterbare ben (4 stk.), monteringskrue (5 stk.).

Badestolens dele:

- A. Sæde
- B. Basisrør
- C. Højdejustering – låsestift
- D. Skridsikre dupsko

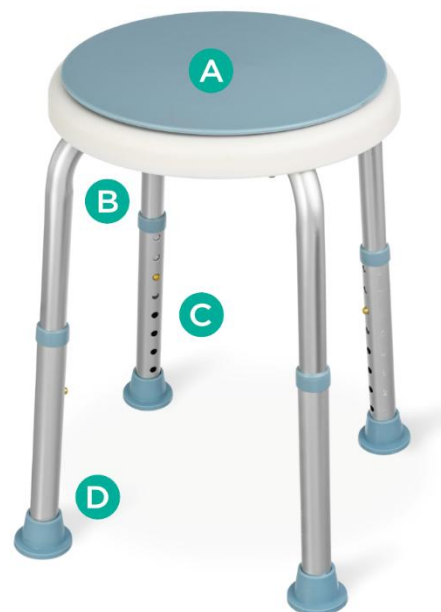

2. Anvendelse

Badestolen er et hjælpemiddel, der hjælper brugeren med at udføre personlige hygiejneaktiviteter. Stolen anbefales til personer med nedsat mobilitet, som forhindrer eller vanskeliggør selvstændig udførelse af daglige aktiviteter. Stolen kan bruges i brusebadet, i badekarret, på badeværelser og i andre fugtige rum i hjemmet og på hospitaler.

3. Montering

Trin 1. Placer sædet med undersiden opad på en plan overflade.

Trin 2. Fastgør de krydsede basisrør til sædet med fire monteringskrue med plast- og metalskiver. Skru den lyse vingskrue med skiver fast i midten.

Trin 3. Forbind basisrørene med benene.

HØJDEJUSTERING

- For at justere stolens højde skal du trykke på låsestiften, vælge den ønskede højde på benet og derefter låse det igen. Gentag fremgangsmåden på de øvrige ben. Benene kan justeres i intervaller på 2,5 cm.

Bemærk! Alle ben skal indstilles til samme højdeniveau.

4. Tekniske data

Højde	34,5-52 cm
Sædediameter	32 cm
Vægt	1,95 kg
Maksimal belastning	110 kg

5. Bemærkninger

Timago International Group påtager sig intet ansvar for forkert brug af produktet, manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne eller misbrug.

6. Vedligeholdelse

- Rengør badestolen regelmæssigt udelukkende med vand, en svamp og milde rengøringsmidler til plastmaterialer, såsom sæbe. Tør den grundigt.
- **Brug ikke** stærke rengøringsmidler, skuremidler, blegemiddel, benzin eller opløsningsmidler til rengøring (det kan beskadige stellet, forårsage synlige fejl og dermed medføre bortfald af garantien).
- Kontrollér mindst én gang hver tredje måned rørenes og låseskruernes tilstand samt at skruerne er spændt.
- Det anbefales at kontrollere gummidupskoene regelmæssigt. Hvis de er slidte, skal de udskiftes med nye.

7. Opbevarings- og transportforhold

Produktet må ikke udsættes for direkte sollys, vand eller fugt.

8. Garantioplysninger

Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er omfattet af en garanti, hvis vilkår er beskrevet i garantibeviset på vores hjemmeside. Kontakt den forhandler, hvor produktet blev købt. Bemærk, at købsbeviset (kvittering eller faktura) skal opbevares af hensyn til garantien.

9. Mærkning

	Referencenummer		Producent
---	-----------------	---	-----------

	LOT-nummer		UDI-kode
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs venligst brugsanvisningen
	Producenten har kontrolleret, at produktet opfylder de væsentlige krav til medicinsk udstyr.		

Hele vores produktsortiment fås hos vores distributører. Læs mere på: **www.timago.com**. Tak, fordi du valgte Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



08/2025 (IV)