

BRUGSANVISNING

Sengebord

Produktkode: TableTIM



1. Egenskaber

Sengebordet har en C-formet metalramme og en bordplade med trælook. Det er udstyret med en justerbar bordplade og hjul med bremser, så det nemt kan flyttes og placeres over sengen.

Bordets dele:


- A. Ramme
- B. Fod med hjul
- C. Bordpladeramme
- D. Monteringsskrue
- E. Bordplade
- F. Højdejustering



2. Anvendelse

Sengebordet er beregnet til brug direkte over patientens seng og giver en flade til at spise, læse eller skrive på, mens patienten ligger i sengen. Produktet er beregnet til brug både ved pleje på behandlingssteder og i hjemmet.

3. Montering og justering

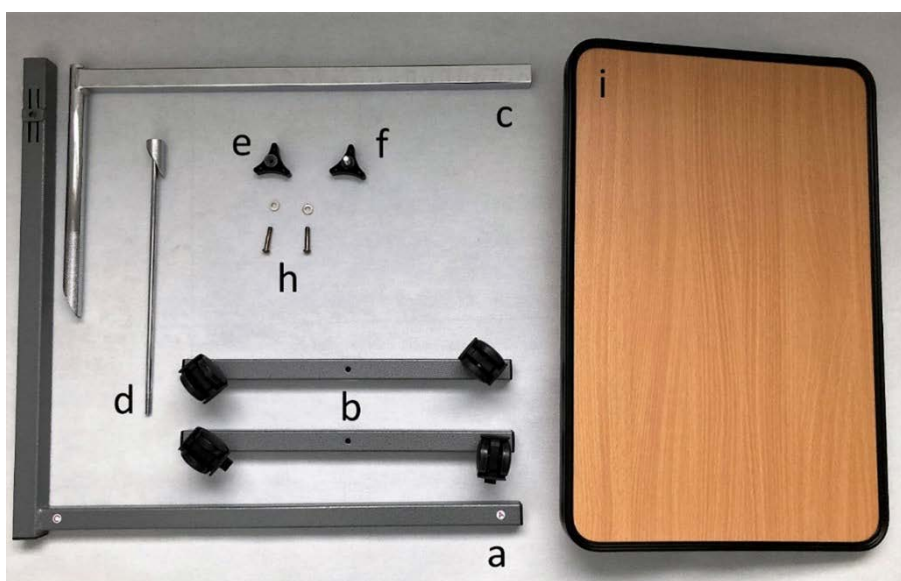

1. Fastgør begge fødder med hjul (b) til hovedrammen (a) ved at matche de tilsvarende bogstavmarkeringer – placér f.eks. bogstavet »A« på rammen ud for »A« på foden, og gør det samme for »B«, »C« og »D«.
2. Når foden er monteret, stilles bordet oprejst på de fire hjul, og hjulbremserne aktiveres for at stabilisere det under den videre montering.
3. Sæt bordpladerammen (c) ind i den firkantede åbning i hovedrammen (a).
4. Sæt bordpladens tap (d) ind i det skrå affasede hul i bordpladerammen (c), så de to skrå flader flugter.
5. Skru monteringsvingemøtrikken (e) på det fremspringende gevind på bordpladens tap (d). Spænd den ikke for hårdt; den skal blot sidde fast nok til ikke at falde af.
6. Placér bordpladen (i) på den klargjorte bordpladeramme. Hold røret under bordpladen med den ene hånd for at gøre monteringen lettere. Spænd monteringsvingemøtrikken (e), når bordpladen er placeret.
7. Fastgør til sidst monteringsvingemøtrikken med skruen (f) i det dertil beregnede hul i hovedrammen (a), og spænd den.

JUSTERING AF BORDPLADENS HÆLDNING

- For at justere bordpladens vinkel løsnes monteringsvingemøtrikken (e) på siden af bordpladen.
- Spænd monteringsvingemøtrikken (e), når den korrekte vinkel er indstillet.

JUSTERING AF BORDPLADENS HØJDE

- For at justere bordpladens højde løsnes monteringsvingemøtrikken med skrue (f) på basisrammen (a).
- Spænd monteringsvingemøtrikken med skrue (f), når den korrekte højde er indstillet.

BREMSER

- Lås hjulbremserne, mens bordet er i brug.

4. Tekniske data

Mål	60,5 x 40,2 cm
Bordpladens mål	60 x 40 cm
Justering af bordpladens vinkel	0° - 90°
Højdejustering	72-112 cm

Vægt	6,7 kg
Maksimal belastning	10 kg
Hjuldiameter	1,50"

5. Bemærkninger

Timago International Group påtager sig intet ansvar for ukorrekt brug af produktet, manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne eller misbrug.

6. Vedligeholdelse

Produktet skal rengøres med en fugtig klud og derefter tørres grundigt. Slibende rengøringsmidler må ikke anvendes, da de kan beskadige de beskyttende belægninger. Snavs skal regelmæssigt fjernes fra produktets bevægelige dele (f.eks. hængsler, spændeskruer og låsemekanismer).

7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet må ikke udsættes for direkte sollys, vand eller fugt.

8. Garantioplysninger

Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er omfattet af en garanti, hvis vilkår er beskrevet i garantikortet på vores hjemmeside. Kontakt den forhandler, hvor produktet blev købt. Husk, at købsbeviset (kvittering eller faktura) skal opbevares af hensyn til garantien.

9. Hændelser med medicinsk udstyr

Enhver alvorlig hændelse, der involverer medicinsk udstyr, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i den EU-medlemsstat, hvor brugeren eller patienten er bosiddende.

10. Mærkning

	Katalognummer		Producent
	LOT-nummer		UDI-kode
	Serienummer		Medicinsk udstyr

	Bemærk		Læs brugsanvisningen
	Produktet opfylder EU's lovkrav til medicinsk udstyr (MDR 2017/745).		

Hele vores produktsortiment fås hos vores distributører. Læs mere på: **www.timago.com**. Tak, fordi du valgte Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



08/2026 (I)