



Gribetænger

BRUGSANVISNING

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. KODER	SIDE 3
2. INTRODUKTION.....	SIDE 3
3. TILSIGTET BRUG.....	SIDE 3
4. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING.....	SIDE 3
6. ANVENDTE SYMBOLER	SIDE 4
7. GENEREL BESKRIVELSE	SIDE 4
8. FØR HVER BRUG	SIDE 5
9. ADVARSLER OM BRUG	SIDE 5
10. BRUGSMÅDE	SIDE 6
11. VEDLIGEHODELSE.....	SIDE 6
12. RENGØRING OG DESINFEKTION.....	SIDE 6
12.1 Rengøring.....	Side 6
12.2 Desinfektion	Side 6
13. GENERELLE BETINGELSER FOR BORTSKAFFELSE	SIDE 6
14. RESERVEDELE OG TILBEHØR	SIDE 6
15. TEKNISKE EGENSKABER	SIDE 7
15.1 AU120 Gribetang med drejeligt og magnetisk hoved - 67 cm.....	Side 7
15.2 AU121 Gribetang med drejeligt hoved med sugekopper og underarmsstøtte - 55 cm	Side 7
15.3 AU122 Gribetang med drejeligt hoved - 71 cm	Side 8
15.4 AU123 Gribetang - 74 cm	Side 8
16. GARANTI.....	SIDE 9
17. REPARATIONER	SIDE 9
17.1 Reparation under garantien.....	Side 9
17.2 Reparation af et produkt, der ikke er dækket af garantien	Side 9
17.3 Ikke-defekte produkter	Side 9
18. RESERVEDELE.....	SIDE 9
19. UNDTAGELSESKLAUSULER	SIDE 9

CE Medicinsk udstyr i klasse I

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/745
af 5. april 2017 om medicinsk udstyr

1. KODER

- AU120** - Gribetang med drejeligt og magnetisk hoved - 67 cm
AU121 - Gribetang med drejeligt hoved med sugekopper og underarmsstøtte - 55 cm
AU122 - Gribetang med drejeligt hoved - 71 cm
AU123 - Gribetang - 74 cm

DA

2. INTRODUKTION

Tak, fordi du har valgt et tilbehør fra serien MOPEDIA by Moretti S.P.A. Morettis gribetænger er designet og fremstillet til at opfylde alle dine behov for praktisk, korrekt og sikker brug. Denne vejledning indeholder små tips til korrekt brug af dit valgte tilbehør og værdifulde råd til din sikkerhed. Læs hele denne vejledning omhyggeligt, før du tager gribetangen i brug. Hvis du er i tvivl, så kontakt din forhandler, som vil kunne hjælpe og rådgive dig korrekt.

3. TILSIGTET BRUG

Morettis gribetænger er designet til at gøre det lettere for personer med motoriske vanskeligheder i hænder og fingre at gribe om genstande.

ADVARSEL!



- Det er forbudt at bruge følgende enhed til andre formål end dem, der er defineret i denne vejledning.
- Moretti S.p.A. fralægger sig ethvert ansvar for skader, der skyldes forkert brug af enheden eller anden brug end den, der er angivet i denne vejledning.
- Producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i enheden og den følgende vejledning uden forudgående varsel for at forbedre dens egenskaber.

4. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MORETTI SpA. erklærer på eget ansvar, at de produkter, der er fremstillet og markedsført af MORETTI SpA. og som tilhører serien af GRIBETÆNGER, er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i forordningen om MEDICINSK UDSTYR 2017/745 af 5. april 2017. Til dette formål garanterer og erklærer MORETTI SpA under eget ansvar følgende:

1. Disse enheder opfylder de generelle krav til sikkerhed og ydeevne, som krævet i bilag I til forordning 2017/745 som foreskrevet i bilag IV til nævnte forordning.
2. De pågældende enheder er IKKE MÅLEINSTRUMENTER.
3. Disse enheder er IKKE BEREGNET TIL KLINISKE UNDERSØGELSER.
4. Disse enheder sælges i IKKE-STERIL emballage.
5. Disse enheder skal betragtes som klasse I i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag VIII til ovennævnte forordning.
6. MORETTI SpA opbevarer og stiller den tekniske dokumentation, der beviser overensstemmelse med forordning 2017/745, til rådighed for de kompetente myndigheder i mindst 10 år fra datoen for fremstilling af det sidste parti.

Bemærk: De komplette produktkoder, producentens registreringsnummer (SRN), den grundlæggende UDI-DI-kode og eventuelle henvisninger til anvendte standarder kan findes i den EU-overensstemmelseserklæring, som MORETTI SPA udsteder og gør tilgængelig via sine kanaler.

5. GENERELLE ADVARSLER

- Se denne vejledning for korrekt brug af enheden.
- Rådfør dig med din læge eller terapeut om korrekt brug af enheden.
- Hold det emballerede produkt væk fra enhver varmekilde, da emballagen er lavet af pap.
- Tilbehørets levetid bestemmes af sliddet på de dele, der ikke kan repareres og/eller udskiftes.
- Vær altid forsigtig, når der er børn til stede.
- Brugeren og/eller patienten skal indberette alle alvorlige hændelser i forbindelse med udstyret til fabrikanten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

6. ANVENDTE SYMBOLER

	Produktkode
	Unik enhedsidentifikator
	CE-mærkning
	Producent
	Produktionsbatch
	Læs brugsanvisningen
	Medicinsk udstyr
	Betingelser for bortskaffelse

7. GENEREL BESKRIVELSE

Moretti S.p.A.'s sortiment af gribetænger består af 4 modeller, alle med aluminiumskonstruktion, plastgreb beklædt med skridsikkert gummi og ergonomiske håndtag.

AU120 Gribetang med drejeligt hoved, magnet og krog - 67 cm



Kan justeres vandret, lodret eller i mellempositioner. Udstyret med en savtakket ende for bedre at kunne gribe selv små genstande; udstyret med en lille krog i den øverste ende for at kunne nå tøj eller andre genstande og en lille magnet til at tiltrække metalgenstande.

AU121 Gribetang med drejeligt hoved med sugekopper og underarmsstøtte - 55 cm



Kan justeres vandret, lodret eller i mellempositioner. Den har særlige gafler, der består af skridsikre sugekopper, som gør det muligt at samle en lang række genstande op. Det ergonomiske håndtag giver mulighed for bedre udnyttelse af håndkraften og et mere effektivt greb i enhver situation. Underarmsstøtten, der er egnet til personer med nedsat håndfunktionalitet, hjælper med at understøtte vægten af den grebne genstand. Derudover har håndtaget en knap, der gør det muligt at låse gaflerne i lukket position, når genstanden er grebet, hvilket kræver mindre indsats og mindre tid.

DA

AU122 Gribetang med drejeligt hoved - 71 cm



Kan justeres vandret, lodret eller i mellempositioner. Udstyret med en skridsikker gummibelagt gaffel, der giver et sikkert greb om enhver genstand.

AU123 Gribetang - 74cm



Udstyret med savtaktede ender for bedre at kunne gribe selv små genstande.

8. FØR HVER BRUG

- Kontrollér altid de pågældende mekaniske deles slitage for at sikre, at enheden kan bruges i fuld sikkerhed for personer og ejendom.
- Kontrollér, at enheden er samlet korrekt.

9. ADVARSLER OM BRUG

- Forsøg ikke at gribe fat i særligt tunge genstande (over 2 kg), da det vil være vanskeligt at løfte dem sikkert på grund af længden på den enhed, du bruger (dette kan resultere i, at den pågældende genstand falder ned, går i stykker og bringer personer i fare).

10. BRUGSMÅDE

Det er meget enkelt at bruge Moretti S.p.A.'s gribetænger. Du skal blot holde enheden og forsigtigt bringe den tæt på et objekt og derefter trykke på kontrolhåndtaget i håndtagets højde for at gribe fat i den pågældende genstand. Når genstanden er flyttet og placeret på en sikker overflade, skal du slippe kontrolhåndtaget for at sætte genstanden ned igen.

På modellerne AU120 og AU121 er det muligt at placere gaflerne vandret, lodret eller i mellempositioner i forhold til håndtaget. For at dreje gaflerne er det nødvendigt at tage fat i klemmehåndtaget med den ene hånd og gaflen med den anden hånd. Drej håndtaget til den ønskede position, og sørg for, at alt forbliver helt samlet. AU121-modellen har en knap på håndtaget, der gør det muligt at låse gaflerne i lukket position, når genstanden er grebet, hvilket kræver færre kræfter og mindre tid.

I AU122-modellen er det muligt at orientere gaflerne vandret, lodret og i mellemposition i forhold til håndtaget. For at dreje gaflerne er det nødvendigt at tage fat i klemmehåndtaget med den ene hånd og gaflen med den anden hånd. Træk og drej håndtaget til den ønskede position, og sørg for, at alt forbliver helt samlet.

11. VEDLIGEHOLDELSE

Tilbehør fra MOPEDIA by Moretti-serien bliver omhyggeligt kontrolleret og CE-mærket, når de kommer på markedet. Af hensyn til patienters og lægers sikkerhed anbefales det at få produktets egnethed kontrolleret af producenten eller et autoriseret laboratorium mindst hvert andet år. I tilfælde af reparationer må der kun anvendes originale reservedele og tilbehør.

12. RENGØRING OG DESINFEKTION

12.1 Rengøring

Brug kun en fugtig klud og mild sæbe. Tør derefter godt før brug.

12.2 Desinfektion

Hvis det er nødvendigt at desinficere produktet, skal du bruge et almindeligt neutralt desinficerende rengøringsmiddel.

Bemærk: Undgå absolut at bruge syreholdige, alkaliske eller opløsningsmiddelholdige produkter som acetone eller fortynder. Opbevares væk fra kilder til lys, varme og fugtighed

13. GENERELLE BETINGELSER FOR BORTSKAFFELSE


Brug aldrig normale kommunale affaldssystemer til bortskaffelse af enheden. I stedet anbefales det, at enheden bortskaffes via de kommunale økologiske øer til planlagt genbrug af de anvendte materialer.

14. RESERVEDELE OG TILBEHØR

For reservedele og tilbehør henvises udelukkende til Morettis generelle katalog.

15. TEKNISKE EGENSKABER

15.1 AU120 Gribetang med drejeligt og magnetisk hoved - 67 cm

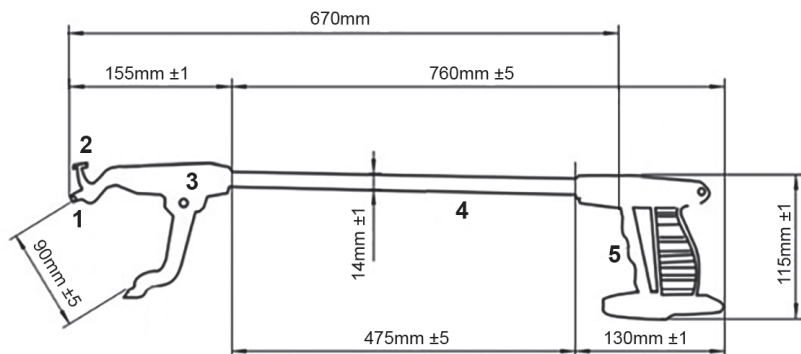


1. Magnet
2. Krog
3. Drejeligt hoved
4. Hovedrør
5. Udløserhåndtag

Tekniske specifikationer

- Rør: anodiseret aluminium
- Indvendig belægning af griber: skridsikkert gummi
- Håndtag: nylon
- Udløser: ABS

15.2 AU121 Gribetang med drejeligt hoved med sugekopper og underarmsstøtte - 55 cm

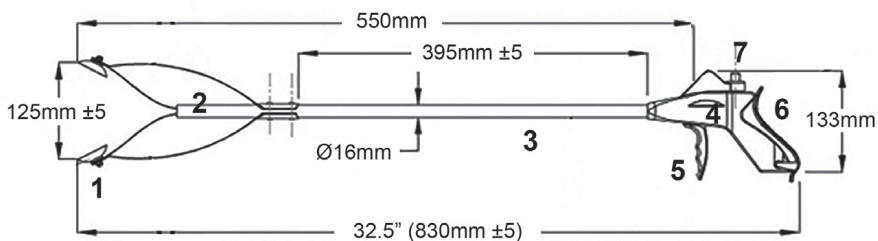


1. Sugekopper
2. Drejeligt hoved
3. Hovedrør
4. Håndtag
5. Udløser
6. Underarmsstøtte
7. Låseknop

Tekniske specifikationer

- Rør: anodiseret aluminium
- Hoved: med sugekop af gummi
- Håndtag: ergonomisk af ABS
- Underarmsstøtte: af PC (polykarbonat)
- Gaffelbredde: 215 mm
- Udløser: ABS og TPR (thermo poly rock)

15.3 AU122 Gribetang med drejeligt hoved - 71 cm

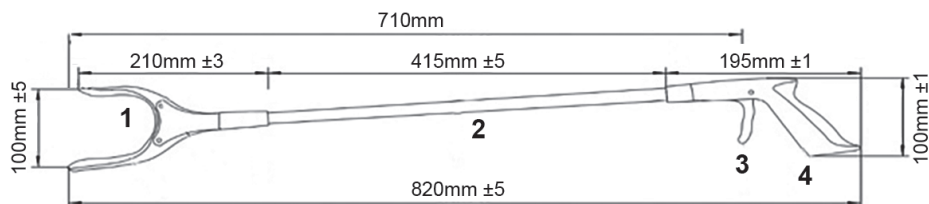


DA

1. Hoved
2. Hovedrør
3. Udløser
4. Håndtag

Tekniske specifikationer

- Rør: anodiseret aluminium
- Hoved: med ABS-dele dækket af blødt gummi
- Håndtag: ergonomisk i PP (polypropylen) og TPR (termo poly rock)
- Gaffelbredde: 100 mm
- Udløser: PP (polypropylen)

15.4 AU123 Gribetang - 74 cm

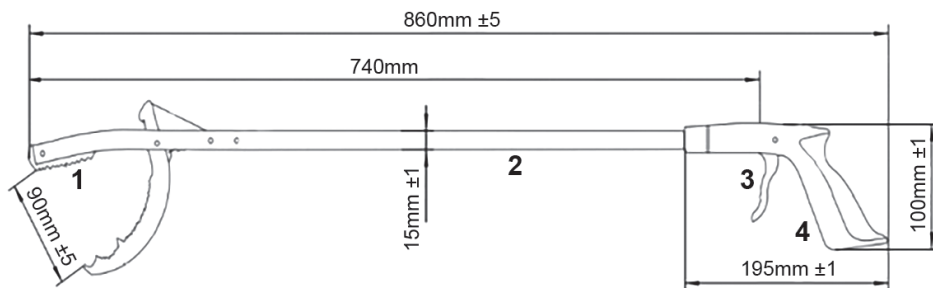

1. Hoved
2. Hovedrør
3. Udløser
4. Håndtag

Tekniske specifikationer

- Rør: anodiseret aluminium
- Hoved: med skridsikkert gummi
- Håndtag: ergonomisk i PP (polypropylen) og TPR (termo poly rock)
- Gaffelbredde: 90 mm
- Udløser: PP (polypropylen)

16. GARANTI

Alle Moretti-produkter er garanteret mod materiale- og fabriktionsfejl i en periode på 2 (to) år fra produktets salgsdato, med forbehold for eventuelle undtagelser og begrænsninger, der er angivet nedenfor. Denne garanti er ikke gyldig i tilfælde af forkert brug, misbrug eller ændring af produktet og ved manglende overholdelse af brugsanvisningen. Den korrekte brug af produktet er beskrevet i brugervejledningen. Moretti er ikke ansvarlig for eventuelle skader, personskader eller andet, der er forårsaget af eller relateret til installation og/eller brug af udstyret, der ikke er i nøje overensstemmelse med instruktionerne i installations-, monterings- og betjeningsvejledningerne.

Moretti garanterer ikke Moretti-produkter mod skader eller defekter under følgende forhold: naturkatastrofer, uautoriseret vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, skader som følge af problemer med strømforsyningen (hvis relevant), brug af dele eller komponenter, der ikke er leveret af Moretti, manglende overholdelse af retningslinjer og brugsanvisninger, uautoriserede ændringer, forsendelsesskader (bortset fra den oprindelige forsendelse fra Moretti) eller manglende udførelse af vedligeholdelse som angivet i vejledningen.

Bærbare komponenter er ikke dækket af denne garanti, hvis skaden kan tilskrives normal brug af produktet.

17. REPARATIONER

17.1 Reparation under garantien

Hvis et Moretti-produkt har materiale- eller produktionsfejl i garantiperioden, vil Moretti sammen med kunden vurdere, om produktfejlen er dækket af garantien. Moretti kan efter eget skøn udskifte eller reparere artiklen under garantien, enten hos en specificeret Moretti-forhandler eller i sine egne lokaler. Arbejdsomkostninger i forbindelse med reparation af produktet kan afholdes af Moretti, hvis det fastslås, at reparationen er omfattet af garantien. Reparation eller udskiftning fornyer eller forlænger ikke garantien.

17.2 Reparation af et produkt, der ikke er dækket af garantien

Et produkt, der ikke er dækket af garantien, kan kun returneres til reparation efter forudgående tilladelse fra Morettis kundeservice. Arbejds- og forsendelsesomkostninger i forbindelse med en reparation, der ikke er dækket af garantien, skal betales fuldt ud af kunden eller forhandleren. Reparationer på produkter, der ikke er dækket af garantien, er garanteret i 6 (seks) måneder fra den dag, hvor det reparerede produkt modtages.

17.3 Ikke-defekte produkter

Kunden vil blive underrettet, hvis Moretti efter at have undersøgt og testet et returneret produkt konkluderer, at produktet ikke er defekt. Produktet vil blive returneret til kunden, og kunden vil være ansvarlig for returforsendelsesomkostningerne.

18. RESERVEDELE

Originale Moretti-reservedele er garanteret i 6 (seks) måneder fra den dag, hvor reservedelen modtages.

19. UNDTAGELSESKLAUSULER

Bortset fra som udtrykkeligt angivet i denne garanti og i det omfang, det er tilladt ved lov, giver Moretti ingen andre erklæringer, garantier eller betingelser, udtrykkelige eller underforståede, herunder erklæringer, garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse og ikke-interferens. Moretti garanterer ikke, at brugen af Moretti-produktet vil være uafbrudt eller fejlfri. Varigheden af eventuelle underforståede garantier, der kan være pålagt af juridiske bestemmelser, er begrænset til garantiperioden inden for grænserne af de juridiske bestemmelser. Nogle stater eller lande tillader ikke begrænsninger i varigheden af en underforstået garanti eller udelukkelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader i forbindelse med forbrugerprodukter. I sådanne stater eller lande gælder visse undtagelser eller begrænsninger i denne garanti muligvis ikke for dig. Denne garanti kan ændres uden varsel.



DA

GARANTIBEVIS

Produkt _____

Købt den _____

Forhandler _____

Vej _____ Sted _____

Solgt til _____

Vej _____ Sted _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriago (Arezzo) Tlf. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com