



MOPEDIA®

DA

MA RP505_RP523_RP547_RH547 02 B DA_03-2025

Rollatorer I Aluminium

BRUGSANVISNING

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. KODER	SIDE 3
2. INTRODUKTION	SIDE 3
3. TILSIGTET BRUG.....	SIDE 3
4. EU-OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING	SIDE 3
5. ADVARSLER.....	SIDE 4
5.1 Generelle advarsler	side 4
5.2 Advarsler om brug	side 4
5.3 Advarsler om stabilitet.....	side 4
5.4 Advarsler om montering	side 4
6. ANVENDTE SYMBOLER	SIDE 5
7. FØR HVER BRUG	SIDE 5
8. MONTERINGSVEJLEDNING	SIDE 5
8.1 Før montering	side 5
8.2 Montering og demontering af RP505.....	side 5
8.2.1 Justering af håndtag.....	side 5
8.3 Montering af RP523	side 6
8.3.1 Justering af sæde.....	side 6
8.3.2 Justering af håndtag.....	side 6
8.3.3 Lukning af rollatoren.....	side 6
8.3.4 Sæde.....	side 6
8.4 Montering af RP547 og RH547	side 6
8.4.1 Justering af sæde.....	side 7
8.4.2 Justering af håndtag.....	side 7
8.4.3 Sæde.....	side 7
9. BRUGSMÅDE.....	SIDE 7
10. BREMSER	SIDE 7
10.1 Brug af bremsen.....	side 7
10.2 Bremselås (parkeringsbremse)	side 7
11. VEDLIGEHOLDELSE	SIDE 7
12. RENGØRING	SIDE 8
13. PLEJE AF HJUL.....	SIDE 8
14. TEKNISKE EGENSKABER	SIDE 8
15. GENERELLE BETINGELSER FOR BORTSKAFFELSE	SIDE 8
16. RESERVEDELE/TILBEHØR	SIDE 8
17. GARANTI	SIDE 9
17.1 Reparationer.....	side 9
17.2 Reservedele.....	side 9
17.3 Undtagelsesklauseler	side 9

CE Medicinsk udstyr i klasse I

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/745
af 5. april 2017 om medicinsk udstyr

1. KODER

RP505 Indendørs aluminiumsrollator SOLE

RP523 Ultralet aluminiumsrollator GALATEA

RP547 Aluminiumsrollator med højdejusterbart sæde FEBE

RH547 Aluminiumsrollator Febe HD

2. INTRODUKTION

Tak, fordi du har valgt en aluminiumsrollator fra serien MOPEDIA by Moretti S.p.a. Rollatorerne MOPEDIA by Moretti S.p.a er designet og fremstillet til at opfylde alle dine behov for praktisk, korrekt og sikker brug. Denne vejledning indeholder små tips til korrekt brug af din valgte enhed og værdifulde råd til din sikkerhed. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning i sin helhed, før du bruger den rollator, du har købt. Hvis du er i tvivl, så kontakt din forhandler, som vil kunne hjælpe og rådgive dig korrekt.

3. TILSIGTET BRUG

Denne rollator er beregnet til personer med bevægelsesvanskeligheder og kan bruges som et hjælpemiddel til at lette gang. Rollatoren giver større stabilitet, støtte og sikkerhed, når man går. Under alle omstændigheder kan den ikke bruges af personer med synligt svag hånd- og/eller armfunktion og personer med balanceproblemer. Vi anbefaler kun brug på overflader, hvor alle hjul rører jorden. Den bør ikke bruges i stenet terræn eller på skrå flader, da rollatoren kan blive ustabil. Hjælpe midlet er ikke beregnet til at transportere mennesker eller andet materiale.

ADVARSEL!



- Det er forbudt at bruge følgende enhed til andre formål end dem, der er defineret i denne vejledning.
- Moretti S.p.A. fraskriver sig ethvert ansvar for skader som følge af forkert brug af enheden eller ved anden brug end den, der er angivet i denne vejledning.
- Producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i enheden og den følgende vejledning uden forudgående varsel for at forbedre dens egenskaber.

4. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MORETTI SpA erklærer på eget ansvar, at de produkter, der er fremstillet og markedsført af MORETTI SpA. og tilhører serien af ROLLATOR - MOPEDIA, er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i forordningen om MEDICINSK UDSTYR 2017/745 af 5. april 2017. Til dette formål garanterer og erklærer MORETTI SpA under eget ansvar følgende:

1. Disse enheder opfylder de generelle krav til sikkerhed og ydeevne, som krævet i bilag I til forordning 2017/745 som foreskrevet i bilag IV til nævnte forordning.
2. De pågældende enheder er IKKE MÅLEINSTRUMENTER.
3. Disse enheder er IKKE BEREGNET TIL KLINISKE UNDERSØGELSER.
4. Disse enheder sælges i IKKE-STERIL emballage.
5. Disse enheder skal betragtes som klasse I i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag VIII til nævnte forordning.
6. MORETTI SpA opbevarer og stiller den tekniske dokumentation, der beviser overensstemmelse med forordning 2017/745, til rådighed for de kompetente myndigheder i mindst 10 år fra datoen for fremstilling af det sidste parti.

Bemærk: De komplette produktkoder, producentens registreringsnummer (SRN), den grundlæggende UDI-DI-kode og eventuelle henvisninger til anvendte standarder kan findes i den EU-overensstemmelseserklæring, som MORETTI SPA udsteder og gør tilgængelig via sine kanaler.

5. ADVARSLER

5.1 Generelle advarsler

- Installer eller brug IKKE produktet, før du har læst og forstået denne brugsanvisning. Hvis du ikke forstår advarslerne, forholdsreglerne og instruktionerne, skal du kontakte en sundhedsfaglig person, forhandler eller teknisk personale, før du forsøger at installere produktet, for at undgå skader eller personskade;
- Rollatoren bør kun bruges af patienter med de rette motoriske færdigheder for at sikre en sikker brug;
- Rådfør dig med din læge eller terapeut for at afgøre, om produktet er egnet, den korrekte justering og brug af rollatoren;
- Ens læge eller terapeut bør hjælpe med højdejusteringen af rollatoren for at opnå maksimal støtte, korrekt aktivering af bremsen, og korrekt tilpasning generelt;
- Rollatorer er ikke beregnet til selvkørende brug;
- Brugeren og/eller patienten skal indberette alle alvorlige hændelser i forbindelse med udstyret til fabrikanten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

5.2 Advarsler om brug

1. Sørg altid for, at bremsekablet er korrekt fastgjort.
2. Kontrollér altid, at bremsen fungerer korrekt efter hver højdejustering for at undgå for stor fri bøjning af kablet.
3. Hvis man ikke følger disse enkle advarsler, kan det resultere i personskade.
4. Rollatoren må kun bruges på et fast, fladt underlag. Brug ikke rollatoren til at gå op ad trapper!
5. Læn dig altid til de to håndtag for at holde balancen.
6. Vær særlig opmærksom på våde, isede eller snedækkede overflader.
7. Overbelast ikke rollatoren.
8. Brug ikke rollatorsædet (hvor det er monteret) til at transportere varer eller personer; sædet er beregnet som brugersæde med parkeringsbremsen aktiveret;
9. Alle hjul skal være i kontakt med gulvet hele tiden under brug for at sikre korrekt balance i rollatoren og maksimal sikkerhed.
10. Parkeringsbremsen skal trækkes, før sædet tages i brug.

Bemærk: Når rollatoren bruges i en stationær position, skal parkeringsbremsen være låst

5.3 Advarsler om stabilitet

- Rollatoren giver hjælp til en person, der vejer op til 136 kg, inklusive taskebelastning.
- Tasken/kurven har en vægtgrænse på 5 kg. Overbelast ikke for at undgå ubalance og risiko for at vælte.

5.4 Advarsler om montering

- Når du har samlet eller åbnet rollatoren, skal du sikre dig, at sædestøtten er låst på begge sider, og kontrollere, at sikkerhedsanordningen er fastgjort i den korrekte position.
- Kontrollér, at begge håndtagsstøtter er sat korrekt ind i strukturen og sikret med låseknapperne, der er låst fast i hovedstøtten med de relevante vingemøtrikker og -knapper uden bevægelse.
- Hæng ikke noget op i rollatorens stel for at undgå, at rørene forvrides og for at undgå at påvirke rollatorens stabilitet.

Bemærk: Pas på at få fingre og/eller tøj i klemme, når du åbner og lukker

6. ANVENDTE SYMBOLER



Produktkode



Unik enhedsidentifikator



CE-mærkning



Producent



Produktionsbatch



Læs brugsanvisningen



Medicinsk udstyr



Betingelser for bortskaffelse



Maksimal kapacitet

DA

7. FØR HVER BRUG

Tjek altid, før du bruger enheden:


- At alle dele af rollatoren er forsvarligt låst;
- Kontrollér, at alle skruer er spændt;
- Sørg for, at sædet er korrekt låst (hvis ikke, skal du trykke sædet længere ned mod stellet);
- Kontrollér, at sædelåsen er korrekt indsat;
- Kontrollér, at den normale bremse og parkeringsbremsen fungerer korrekt;

8. MONTERINGSVEJLEDNING

8.1 Før montering

Pak produktet ud, og kontrollér, at det ikke er blevet beskadiget under transporten. Hvis rollatoren er beskadiget, skal du kontakte din nærmeste forhandler.

8.2 Montering og demontering af RP505

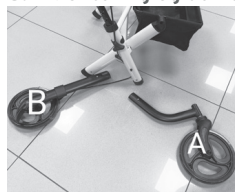

- Åbn rollatoren og kurven, indtil plastikflgen klikker på plads
- Sæt forhjulene A og baghjulene B ind i de relevante huse
- Placer den gennemsigtige plastbakke oven på kurven

For at afmontere og lukke den skal du følge trinnene i omvendt rækkefølge.



ADVARSEL! Sørg for, at drejeknapperne sidder godt fast i hullerne. Sørg altid før brug for, at rollatoren ikke har tendens til at folde under påvirkning af en lille sideværts kraft. Pas på ikke at vride bremsekablerne, når du forbinder styr og hjul.

8.2.1 Justering af håndtag


For at justere håndtaget skal du skru drejeknapperne af og fjerne plastikindsatserne på begge sider. Hæv eller sænk derefter håndtaget til den ønskede højde ved at udøve samme kraft på begge sider, sæt plastikindsatsen på plads igen, og skru knoppen på, og sørg for, at hullet er tydeligt synligt.



ADVARSEL!

Denne rollator giver dig ikke mulighed for at sidde på den forreste overflade, der består af kurven og bakken, så det er strengt forbudt at sidde på den

8.3 Montering af RP523

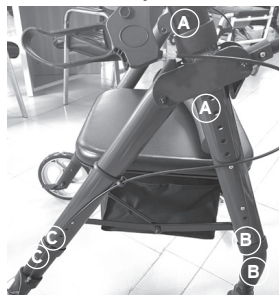

- Indsæt benene og håndtagene i de relevante huse, ved at matche bogstaverne på delene af korrekt
- Sæt ryglænet ind i de relevante åbninger ved at trykke på sidestifterne

DA

8.3.1 Justering af sæde



- For at justere sædet skal du justere forhjulene A ved at fjerne stiftene fra hullerne og sætte dem på plads igen, når den ønskede højde er nået;
- For baghjul B tryk på sideknapperne og placer hjulet i den ønskede højde ved at klikke på dem



ADVARSEL!

Juster hjulene, så sædet altid er parallelt med jorden

8.3.2 Justering af håndtag

Skrue knopperne af, og tag dem ud af hullet, vælg den ønskede højde, og sæt dem i hullet igen ved at skrue dem fast.



ADVARSEL!

Sørg for, at drejeknapperne sidder godt fast i hullerne. Sørg altid før brug for, at rollatoren ikke har tendens til at folde under påvirkning af en lille sideværts kraft.

8.3.3 Lukning af rollatoren

Løft metalhåndtaget under sædet, og træk det opad.

8.3.4 Sæde


Før du sætter dig ned, skal du placere rollatoren på et fladt, fast underlag og derefter låse bremserne. Sørg for, at parkeringsbremsen er korrekt aktiveret, og at rollatoren er i en stabil position.



ADVARSEL!

Sæt dig ned, og fordel din vægt over hele sædet. Sid ikke og skub kun på den ene side.

8.4 Montering af RP547 og RH547

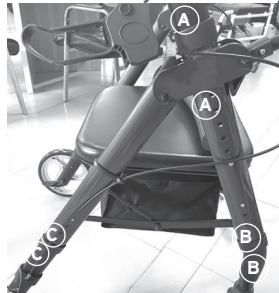

- Sæt benene og håndtagene i de relevante huse, og match korrekt med bogstaverne på produktdele
- Sæt ryglænet ind i de relevante åbninger ved at trykke på sidestifterne


ADVARSEL!

Kontrollér altid før brug, at rollatoren ikke har tendens til at folde under påvirkning af en lille sideværts kraft. Pas på ikke at vride bremsekablerne, når du forbinder styr og hjul.

8.4.1 Justering af sæde

For at justere sædet er det nødvendigt at trykke på låsetapperne på for- og baghjulene og skubbe dem til den ønskede højde

8.4.2 Justering af håndtag

Tryk på sideknapperne, og placer håndtaget i den ønskede højde ved at klikke på dem

8.4.3 Sæde

Før du sætter dig ned, skal du placere rollatoren på et fladt, fast underlag og derefter låse bremserne. Sørg for, at parkeringsbremsen er korrekt aktiveret, og at rollatoren er i en stabil position.


ADVARSEL!

Sæt dig ned, og fordel din vægt over hele sædet. Sid ikke og skub kun på den ene side.

9. BRUGSMÅDE

- Begynd at skubbe, når du står med begge hænder på håndtagene;
- Sørg for, at dine hænder er tørre, før du bruger rollatoren, så du ikke glider;
- Gå oprejst med blikket vendt fremad, ikke nedad;
- Skub ikke rollatoren for langt væk fra kroppen, det kan føre til fald og utilstrækkelig belastning;
- Brug ikke rollatoren til at forcere trin, der er større end 20 mm;
- Ved udendørs brug bør man foretrække fortove, der er korrekt forberedt i henhold til reglerne for fjernelse af arkitektoniske barrierer;
- Brug de bageste fodstøtter til at overvinde små forhindringer, hvis de findes til at hæve rollatorens front

10. BREMSER

Bremsernes korrekte funktion afhænger af slid og snavs på hjulene. Kontrollér bremsernes og hjulenes tilstand før hver brug.

10.1 Brug af bremsen

For at bremse rollatoren skal du trække bremsegrebene opad med fingrene, indtil rollatoren sænker farten eller stopper. Slip bremsehåndtagene for at fortsætte med at flytte rollatoren.

10.2 Bremselås (parkeringsbremse)

Tryk bremsegrebene ned med håndfladen, når du hører et "klik", er hjulene på låst. Løft bremsehåndtagene for at frigøre dem fra stoppositionen.


ADVARSEL!

Når brugeren står stille, skal bremserne være låst

11. VEDLIGEHOLDELSE

Enhederne i MOPEDIA by Moretti S.p.A.-serien bliver grundigt kontrolleret og CE-mærket, når de kommer på markedet. Af hensyn til patientens og lægens sikkerhed anbefales det at få rollatorens egnethed kontrolleret af producenten eller et autoriseret laboratorium mindst hvert andet år. I tilfælde af reparationer må der kun anvendes originale reservedele og tilbehør. Produktets levetid afhænger af brug, vedligeholdelse, opbevaring og rengøring.

12. RENGØRING

Brug kun en fugtig klud med neutrale rengøringsmidler til at rengøre delene. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, og metalbørster eller slibende eller skarpe genstande, da de kan beskadige produktet.

13. PLEJE AF HJUL

1. Rengør hjulene med lunkent vand og et neutralt rengøringsmiddel. Tørres af med en ren klud.
2. Smør hjulene med jævne mellemrum.

14. TEKNISKE EGENSKABER

SOLE-serien										
Produktkode	RP505									
Bakke	25x39 cm									
Struktur	Aluminium									
GALATEA-serien										
Produktkode	RP523									
Sæde	37x24 cm									
Struktur	Aluminium									
Serie	FEBE					FEBE HD				
Produktkode	RP547					RH547				
Sæde	35x35 cm					60x40 cm				
Struktur	Aluminium									
Mål og vægt										
										
RP505	75	86 97	69 bakke	57	40	95x56x34cm	6,8	20	20	136 kg
RP523	70 80	85 102	54 61	64	47	95x58x33cm	7,4			
RP547	70 80	80 99	50 57	63	47	90x62x39cm	8			
RH547	80	80 100	50 57	70	55	110x70x39cm	10	25	25	180 kg

Målene er i cm og kan variere med $\pm 0,5$ cm.

* Maksimalt fodaftryk

15. GENERELLE BETINGELSER FOR BORTSKAFFELSE

Brug aldrig normale kommunale affaldssystemer til bortskaffelse af enheden. Det anbefales, at enheden bortskaffes via de kommunale økologiske øer til planlagt genbrug af de anvendte materialer.

16. RESERVEDELE/TILBEHØR

For reservedele og tilbehør henvises til Moretti S.p.A.'s hovedkatalog.

17. GARANTI

Alle Moretti-produkter er garanteret mod materiale- og fabrikationsfejl i en periode på 2 (to) år fra produktets salgsdato, med forbehold for eventuelle undtagelser og begrænsninger, der er angivet nedenfor. Denne garanti er ikke gyldig i tilfælde af forkert brug, misbrug eller ændring af produktet og ved manglende overholdelse af brugsanvisningen. Den korrekte brug af produktet er beskrevet i brugervejledningen.

Moretti er ikke ansvarlig for eventuelle skader, personskader eller andet, der er forårsaget af eller relateret til installation og/eller brug af udstyret, der ikke er i nøje overensstemmelse med instruktionerne i installations-, monterings- og betjeningsvejledningerne.

Moretti garanterer ikke Moretti-produkter mod skader eller defekter under følgende forhold: naturkatastrofer, uautoriseret vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, skader som følge af problemer med strømforsyningen (hvis relevant), brug af dele eller komponenter, der ikke er leveret af Moretti, manglende overholdelse af retningslinjer og brugsanvisninger, uautoriserede ændringer, forsendelsesskader (bortset fra den oprindelige forsendelse fra Moretti) eller manglende udførelse af vedligeholdelse som angivet i vejledningen. Bærbare komponenter er ikke dækket af denne garanti, hvis skaden kan tilskrives normal brug af produktet.

17.1 Reparationer

Reparation under garantien: Hvis et Moretti-produkt har materiale- eller produktionsfejl i garantiperioden, vil Moretti sammen med kunden vurdere, om produktfejlen er dækket af garantien. Moretti kan efter eget skøn udskifte eller reparere artiklen under garantien, enten hos en specificeret Moretti-forhandler eller i sine egne lokaler. Arbejdsomkostninger i forbindelse med reparation af produktet kan afholdes af Moretti, hvis det fastslås, at reparationen er omfattet af garantien. Reparation eller udskiftning fornyer eller forlænger ikke garantien.

Reparation af et produkt, der ikke er dækket af garantien: Et produkt, der ikke er dækket af garantien, kan kun returneres til reparation efter forudgående tilladelse fra Morettis kundeservice. Arbejds- og forsendelsesomkostninger i forbindelse med en reparation, der ikke er dækket af garantien, skal betales fuldt ud af kunden eller forhandleren. Reparationer på produkter, der ikke er dækket af garantien, er garanteret i 6 (seks) måneder fra den dag, hvor det reparerede produkt modtages.

Ikke-defekte produkter: Kunden vil blive underrettet, hvis Moretti efter at have undersøgt og testet et returneret produkt konkluderer, at produktet ikke er defekt. Produktet vil blive returneret til kunden, og kunden vil være ansvarlig for returforsendelsesomkostningerne.

17.2 Reservedele

Originale MORETTI-reservedele er garanteret i 6 (seks) måneder fra den dag, hvor reservedelen modtages.

17.3 Undtagelsesklausuler

Bortset fra som udtrykkeligt angivet i denne garanti og i det omfang, det er tilladt ved lov, giver Moretti ingen andre erklæringer, garantier eller betingelser, udtrykkelige eller underforståede, herunder erklæringer, garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse og ikke-interferens. Moretti garanterer ikke, at brugen af Moretti-produktet vil være uafbrudt eller fejlfri. Varigheden af eventuelle underforståede garantier, der kan være pålagt af juridiske bestemmelser, er begrænset til garantiperioden inden for grænserne af de juridiske bestemmelser. Nogle stater eller lande tillader ikke begrænsninger i varigheden af en underforstået garanti eller udelukkelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader i forbindelse med forbrugerprodukter. I sådanne stater eller lande gælder visse undtagelser eller begrænsninger i denne garanti muligvis ikke for dig. Denne garanti kan ændres uden varsel.



DA

GARANTIBEVIS

Produkt _____

Købt den _____

Forhandler _____

Vej _____ Sted _____

Solgt til _____

Vej _____ Sted _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriana (Arezzo) Tlf. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

[illegible]

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com