

SIT GO

OPTIMA PLUS | BC-EC8002-HD



BRUGERMANUAL TIL ELEKTRISK KØRESTOL

CE | MD

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Introduktion
2. Forholdsregler for sikker brug
3. Tekniske specifikationer og struktur
4. Montering, justering og sammenklapning
5. Brug, betjening og fejl
6. Vedligeholdelse
7. Transport og opbevaring
8. Garanti



1. Introduktion

1.1 Produktbeskrivelse

Søger du en bedre hverdag med mere mobilitet? Den elektriske kørestol Sitgo OPTIMA PLUS giver dig netop dette. Stolen kombinerer avanceret teknologi med et moderne design. Du kan nemt samle stolen. Du kan også adskille den hurtigt. Dette gør stolen perfekt til transport i bilen. Chassiset består af forstærket kulfiber. Materialet gør kørestolen meget stærk. Det gør også stolen ultralet.

1.2 Anbefalet brug

Stolen hjælper personer med nedsat mobilitet.

- Du må maksimalt belaste stolen med 200 kg.
- Du kan bruge stolen indendørs og udendørs på flade overflader.
- Du skal undgå græs, grusveje og stejle bakker. Du skal også undgå regn og sne.

1.3 Yderligere information

Læs manualen grundigt før første brug. Du opnår sikker brug ved at følge instruktionerne i denne manual. Virksomheden dækker ikke skader, hvis du bruger stolen forkert. Har du spørgsmål? Kontakt din forhandler i dag!

2. Forholdsregler for sikker brug

Følg disse enkle regler. De beskytter dig, og de beskytter stolen.

- **Eksklusiv brug:** Stolen er kun til én person. Du må ikke bruge stolen til sport eller tung last.
- **Armlæn og fodstøtter:** Du må ikke bruge armlænet til at løfte dig selv. Du må ikke stå med fuld vægt på fodstøtten. Dette forhindrer skader.
- **Ændringer:** Du må ikke ændre stolen. Uautoriseret tilbehør ødelægger produktet.
- **Vand:** Du må aldrig køre i regnvejr. Du må ikke køre på våde gulve.
- **Skråninger:** Du må ikke køre på stejle bakker. Bakken må maksimalt hælde 6 grader. Du må aldrig køre over forhindringer, der er højere end 25 mm.
- **Manuel tilstand:** Du må kun bruge manuel tilstand med hjælp fra en ledsager.
- **Elektrisk sikkerhed:** Hold opladeren ren og tør. Du må aldrig oplade et vådt batteri.

3. Tekniske specifikationer og struktur

3.1 Dimensioner og egenskaber

Egenskab	Værdi	Egenskab	Værdi
Samlede dimensioner	113 x 71,5 x 105 cm	Batteri	24V/30AH
Sammenklappede dimensioner	41,5 x 70,5 x 86 cm	Batterivægt	3 kg
Sædehøjde	56 cm	Oplader	Output 5Ah
Sædebredde	49,5 cm	Maks. belastning	200 kg
Ryglænsøjde	50 cm	Maks. hastighed	6 km/t
Bremselængde	1500 mm	Maks. rækkevidde	25 km (flad vej)
Venderadius	900 mm	Motorer	24V/250W x 2
Maks. hældning anbefalet	6° (aldrig over 10°)	Baghjul	12" massiv magnesium
Samlet vægt	18,6 kg (uden batteri)	Forhjul	8" massiv magnesium

3.2 Hovedkomponenter

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Ryglæn | 1. Motor |
| 2. Sædepude | 2. Brems håndtag |
| 3. Batteri | 3. Anti-vippe hjul |
| 4. Joystick | 4. Fodstøtte |
| 5. Justerbare armlæn | 5. Ramme / Chassis |
| 6. Forhjul og baghjul | |

4. Montering, justering og sammenklapning

4.1 Montering

Vil du gøre stolen klar til brug? Følg disse trin:

1. Tag kørestolen ud af kassen.
2. Træk fodstøtten fremad.
3. Hold ryglænet med den ene hånd. Hold sædet med den anden hånd. Træk delene fra hinanden. Du vil høre et klik, når låsen er fastgjort.

4. Tilslut joysticket, og placer det på det ønskede armlæn.
5. Placer batteriet under sædet, og sørg for at det er fuldt opladet.
6. Tænd stolen, og kontroller funktionen.
7. Læg puden på sædet. Nu er du klar til at køre!


Bemærk: Kontroller altid låsen, før du sætter dig.

4.2 Justeringer

- **Joystick:** Tilpas joysticket til din arm. Løsn knappen. Flyt joysticket. Stram knappen igen.
- **Bremsehåndtag:** Skub håndtaget bagud for elektrisk tilstand. Skub håndtaget fremad for manuel tilstand.
- **Armlæn:** Tryk på låseknappen for at vippe armlænet op eller ned.
- **Fodstøtte:** Juster fodstøttens dybde for at finde en behagelig position.



Pestillo cierre (Låsemekanisme)

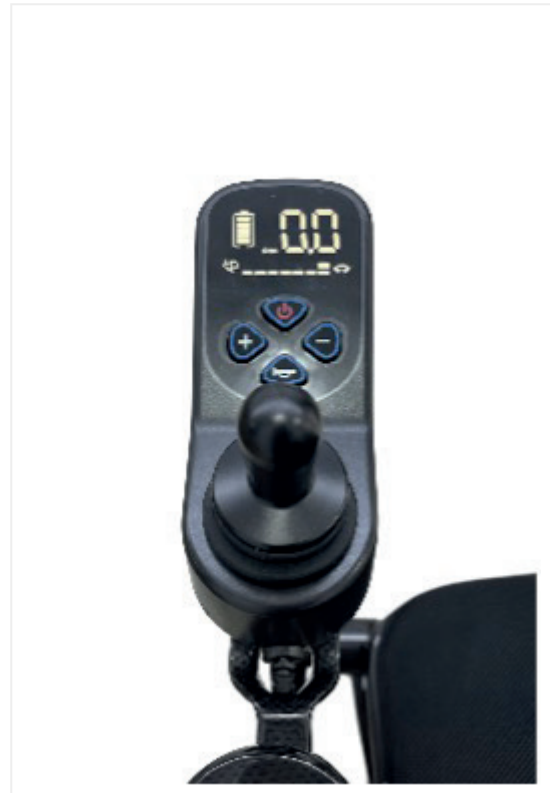

Joystick betjeningspanel

4.3 Sammenklapning

1. Træk i låsen bag på stolen.
2. Vip sædet opad.
3. Klap fodstøtten op. Fastgør fodstøtten med tape under transport.

5. Brug, betjening og fejl

5.1 Brug af Joystick

Joysticket styrer din kørestol. Det er nemt at betjene.

- **Tænd/sluk:** Tryk på knappen for at starte.
- **Indikatorer:** Skærmen viser strøm og hastighed.
- **Hastighed:** Brug knapperne til at ændre farten.
- **Styring:** Bevæg pinden i den ønskede retning.
- **Horn:** Brug hornet for at advare i trafikken.

Lås joysticket: Hold tænd-knappen nede i 5 sekunder.

Lås op igen: Hold horn-knappen nede i 5 sekunder.

5.2 Opladning af batteriet

- **Første gang:** Oplad batteriet helt i 6-8 timer før første tur.
- **Daglig opladning:** Sluk stolen. Sæt opladeren i joysticket. Sæt derefter opladeren i stikkontakten. Et rødt lys viser opladning. Et grønt lys viser et fuldt batteri.

Advarsel: Du må aldrig køre i stolen under opladning.

5.3 Almindelige fejl

- **Kode C4:** Bremsen er i manuel tilstand. *Løsning:* Skub bremsehåndtaget bagud.
- **Kode LC:** Joysticket er låst. *Løsning:* Hold horn-knappen nede i 5 sekunder.

Kontakt dit serviceværksted ved andre fejl.

6. Vedligeholdelse

En velholdt stol giver en god tur. Alle lejer i hjul og motor er forseglede. Du behøver ikke at smøre dem.

- **Dagligt:** Kontroller batteriet og bremsen. Test kørslen.
- **Månedligt:** Tjek ledninger og hjul.
- **Halvårligt:** Gennemgå alle dele for slid.
- **Årligt:** Få et værksted til at efterse motor og skruer.
- **Batteri:** Vi anbefaler opladning hver dag, hvis det er muligt.

7. Transport og opbevaring

7.1 Transport

Pas godt på din stol på rejsen! Transportér stolen i den originale kasse. Fjern batteriet, og pak det ind i bobleplast. Læg aldrig tunge ting på en sammenklappet stol.

7.2 Opbevaring

Opbevar stolen et rent og tørt sted. Temperaturen skal ligge mellem -10°C og 40°C . Fjern batteriet ved længere tids opbevaring. Oplad batteriet en gang om måneden.

8. Garanti

Vi leverer god kvalitet. Vi giver dig en stærk garanti.

- **Stolens komponenter:** 3 års garanti.
- **Chassis (ramme):** 5 års garanti.
- **Batteri og oplader:** Mindst 1 års garanti.

Garantien dækker ikke i disse tilfælde:

- Uautoriserede personer ændrer produktet.
- Du bruger uoriginale dele.
- Du bruger stolen til forkerte formål.
- Du overskrider vægtgrænsen.
- Stolen får stød, falder eller bliver våd.
- Sliddele som hjul og polstring forringes ved normalt brug.
- Du kører i sand, vandpytter eller mudder.

- Du lader batteriet stå uden strøm i lang tid.

Symbol	Betydning
SN / UDI	Serienummer / Unik enhedsidentifikation
[i]	Se brugsanvisningen
CE	CE-mærkat
MD	Medicinsk udstyr
EU REP	Repræsentant i EU
!	Advarsel
kg	Maksimal tilladt vægt

FABRIKANT:

NINGBO BAICHEN MEDICAL DEVICES Co.,LTD.

Adresse: Room 903, Diqu Building, 666 Taikang Middle Road, Ningbo, Zhejiang, Kina

EU-Repræsentant:

SUNGO Europe B.V.

Fascinatia Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, Holland

Importør:

Guimi Evomedical, S.L.

Av Sant Esteve 157, 08211 Castellar del Valles, Barcelona, Spanien