

## BRUGSANVISNING

### Trehjulet aluminiumsrollator

Kod produkt: RAPID




#### 1. Udførelse

En sammenklappelig trehjulet rollator, udført i et let aluminiumsstel, belagt m. metallisk lak. Udstyret m. højdejusterbare skubbehåndtag m. anatomiske greb og en bremse m. en parkeringsklemme. Rollatoren har hjul m. et smalt tværsnit og en diameter på 8" samt en indkøbstaske m. lynlås.

#### Rollatoren består af:

- a. håndtag
- b. bremse
- c. bremsekabel
- d. låsepin til blokering af håndtaget
- e. indkøbstaske
- f. velcrobånd
- g. låsepin til blokering af benet
- h. bremsejustering

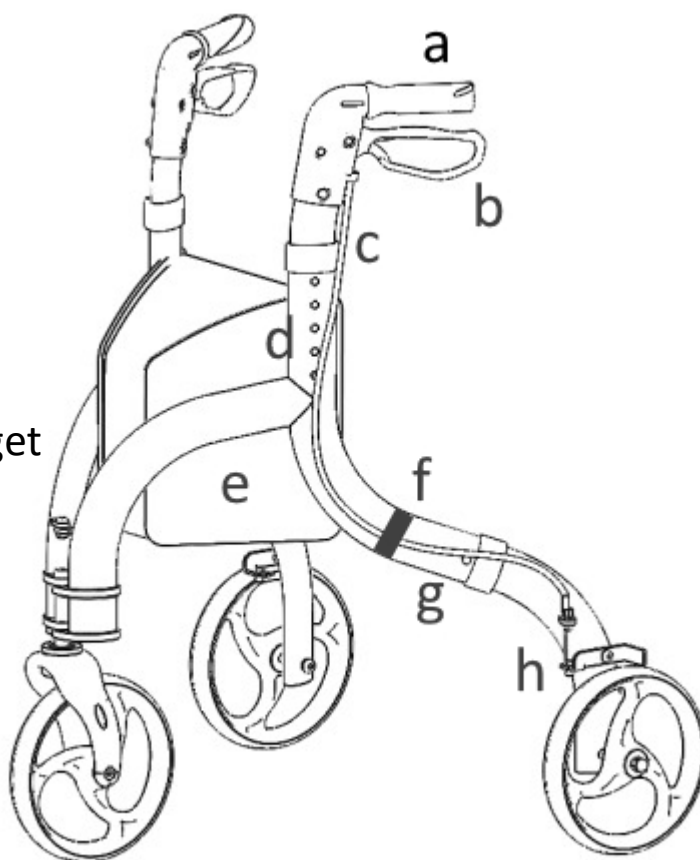

#### 2. Anvendelse

En trehjulet rollator er et hjælpeudstyr beregnet for personer m. nedsat fysisk funktionsevne, der har brug for et stabilt greb og gangstøtte. Den anbefales også som hjælpemiddel til ældre personer m. dårlig balance, der forbedrer deres gangkomfort og sikrer dem mod fald. Takket være anvendelsen af rollatoren kan personer m. gangbesvær el. problemer m. et komme op i stående stilling opretholde en aktiv hverdag. Rollatoren sikrer høj stabilitet, bedre støtte og sikkerhed under gangen.

### 3. Montering, opklapning, sammenklapning og justering af rollatoren


#### Monteringsdele:

- A. rollatorstel
- B. højre håndtag
- C. højre ben m. hjul
- D. venstre ben m. hjul
- E. venstre håndtag
- F. indkøbstaske
- G. velcrobånd (2 stk.)



#### Montering

- Klap rollatorstellet op ved at skyde begge dele af tværrøret ud indtil det er låst på plads (Figur 1).
- Sæt venstre ben ind i venstre hul bagerst på stellet ved at trykke på låsepind til blokering af ben (hjul m. bremse er drejet udad) Lås pinden i hullet i rollatorstellet.
- Et bremsekabel forbinder venstre ben m. venstre håndtag. Sæt venstre håndtag ind i venstre hul i stellet ved at trykke på låsepind til blokering af håndtag. Lås pinden i hullet i rollatorstellet ved at indstille den ønskede højde på håndtaget.
- Før bremsekablet udad og sikr det m. et velcrobånd (Figur 2).
- Montér højre ben og højre skubbehåndtag på tilsvarende vis.

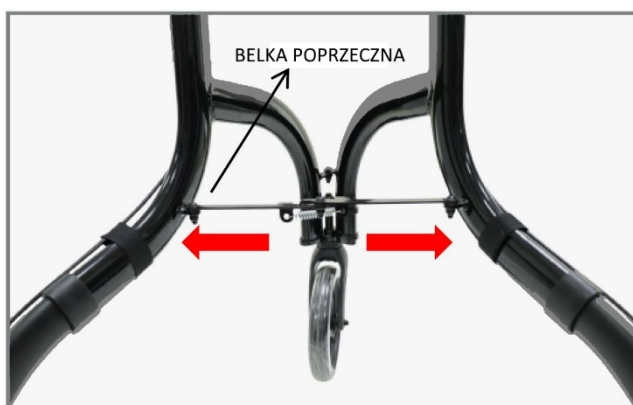

Figur 1

Figur 2

### Tekstforklaring


*Belka poprzeczna – tværrør*

### Montering af indkøbstaske

- Sæt det ene af T-beslagene, der er anbragt i siden af tasken, ind i hullet øverst på rollatorstellet (Figur 3). Lommerne skal være anbragt bagerst på rollatoren, dvs. skal vende mod brugeren.
- Gentag samme procedure på den anden side af tasken.



Figur 3

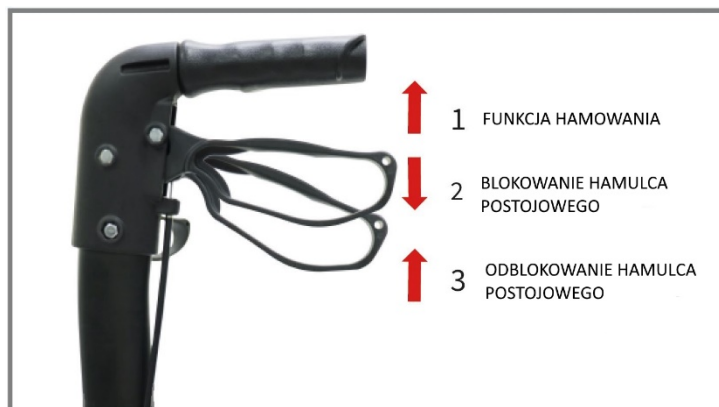

Figur 4

### Tekstforklaring

*Funkcja hamowania – bremsefunktion*

*Blokowanie hamulca postojowego – Aktivering af parkeringsbremse*

*Odblokowanie hamulca postojowego – Deaktivering af parkeringsbremse*

### Bremsefunktion

- For at standse rollatoren skal du flytte bremsestangen opad mod håndtaget, og dernæst holde den i denne position i et stykke tid (Figur 4).
- Under parkering skal du låse bremsen m. en bremseklemme ved at trække bremsehåndtaget nedad.
- For at frigøre bremsen skal du trække bremsehåndtaget opad.

## Højdejustering af håndtagene

Aktivér begge bremsesystemer m. en parkeringsklemme for at standse rollatoren. Tryk på pind til blokering af håndtaget og hold den nede. Justér dernæst håndtaget i højden.


Frigør låsepinden for at låse håndtaget i den indstillede højde. Træk håndtaget op og ned et par gange for at kontrollere, at det er låst korrekt i den indstillede højde.

Justér højden på det andet håndtag på tilsvarende vis.

**BEMÆRK!** Håndtagene skal være indstillet i samme højde.

## Sammenklapning og opklapning af rollatoren

- For at klappe en monteret rollator sammen, skal du demontere tasken, og dernæst trykke på og sammenfolde begge dele af tværrøret (Figur 5). Hold dernæst begge håndtagene nede og tryk dem indad.
- For at klappe en monteret rollator op, skal du holde begge håndtagene nede og trække dem udad. Fold dernæst begge dele af tværrøret ud, indtil det er låst på plads.

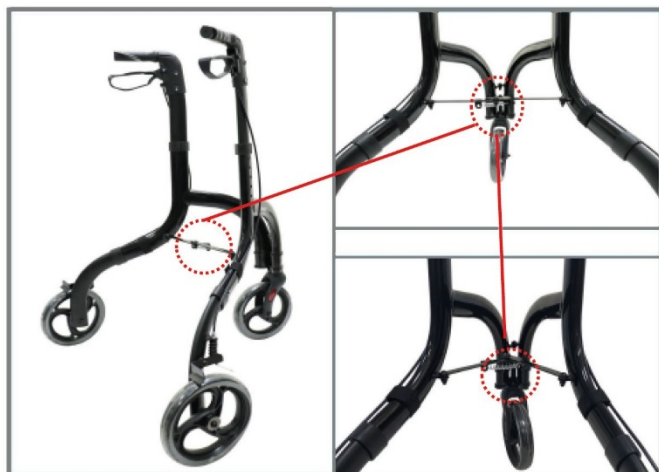

Figur 5



Figur 6

## Tekstforklaring

*Nakrętka regulacyjna 8 mm – justeringsmøtrik 8 mm*

*Nakrętka zabezpieczająca 10 mm – sikkerhedsmøtrik 10 mm*

## Justering af nederste bremses

Løsn sikkerhedsmøtrikken m. ringgaffelnøgle 10 mm (Figur 6). Justér dernæst bremsernes spænding m. ringgaffelnøgle 8 mm (der skal altid være et lille mellemrum mellem bremsemekanismen og hjulet efter, at bremsestangen er frigjort). Spænd sikkerhedsmøtrik 10 mm – mens du spænder møtrikken, kontrollér, at justeringsmøtrikken ikke har flyttet sig.

## 4. Teknisk specifikation

Totalbredde	68,5 cm
Totallængde	67 cm
Totalhøjde	84-94 cm
Hjuldiameter	8"
Vægt	4,4 kg
Maks. belastning	136 kg
Maks. belastning af kurven	5 kg
Stelfarve	sort

## 5. Bemærkninger og anvisninger

**Timago International Group frasiger sig ethvert ansvar for u hensigtsmæssig anvendelse af rollatoren, manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvendelse af rollatoren i strid med formålet.**

## 6. Vedligeholdelse

Rollatorstellet skal rengøres m. en fugtig klud, og dernæst tørres grundigt af. Det er ikke tilladt at bruge aggressive poleringsmidler på grund af risiko for beskadigelse af beskyttelseslagene. Fjern løbende alle urenheder fra de bevægelige dele af rollatoren (beslag, klemmeskruer, låse).










## 7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet bør ikke udsættes for direkte sollys, vand og fugt.

## 8. Garantioplysninger

Produktet er omfattet af garantien. Garantivilkårene er beskrevet i garantikortet, som du fik udleveret. Gem købsbeviset (kvittering el. faktura) til garantiformål.

## 9. Mærkning

	Referencenummer		Producent
	Partinummer		Produktionsdato
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs brugsanvisningen nøje igennem
	Producenten har vurderet produktets forenelighed m. de væsentlige krav, der stilles til medicinsk udstyr.		

Kontakt vores forhandlere for at gøre dig bekendt med hele vores sortiment.

For nærmere oplysninger se hjemmesiden [www.timago.com](http://www.timago.com)

Tak fordi du har valgt Timago produktet!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa [Aps og K/S]

ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Polen

Tlf.: +48 33 499 50 00

Telefax: +48 33 499 50 11

E-mail: info@timago.com



10/2023(I)