

## 1. Udførelse

RELAX geriatrisk hvilestol tilbyder komfortabel hvile til ældre, der permanent opholder sig i eget hjem.

Hvilestolen er udstyret m. en uafhængig dobbeltstyring, der giver brugeren maksimal komfort takket være en bred vifte af indstillingsmuligheder. Fjernbetjeningen muliggør individuel tilpasning af hvilestolen til brugerens behov. Takket være løftefunktionen, vippes hvilestolen fremad, så det er lettere for brugeren at sætte sig i stolen og rejse sig op herfra.

Sættet indeholder:

- en lænestol m. stel,
- et ryglæn,
- et kabel m. forsyningsenhed,
- en fjernbetjening.



## 2. Anvendelse


En geriatrisk hvilestol er beregnet til:

- personer, der har besvær m. selvstændig gang,
- personer m. nedsat funktion og bevægelsesbegrænsninger,
- personer m. svækket krop på grund af alder.

## 3. Udfoldning, sammenfoldning og justering af hvilestolen

### Før udfoldning

- Sørg for, at hvilestolen opstilles på et jævnt underlag.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads mellem hvilestolen og væggen samt andre genstande i rummet.
- Fjern alle sikkerhedsanordninger, der fastgør hvilestolens kabler til fodstellet.

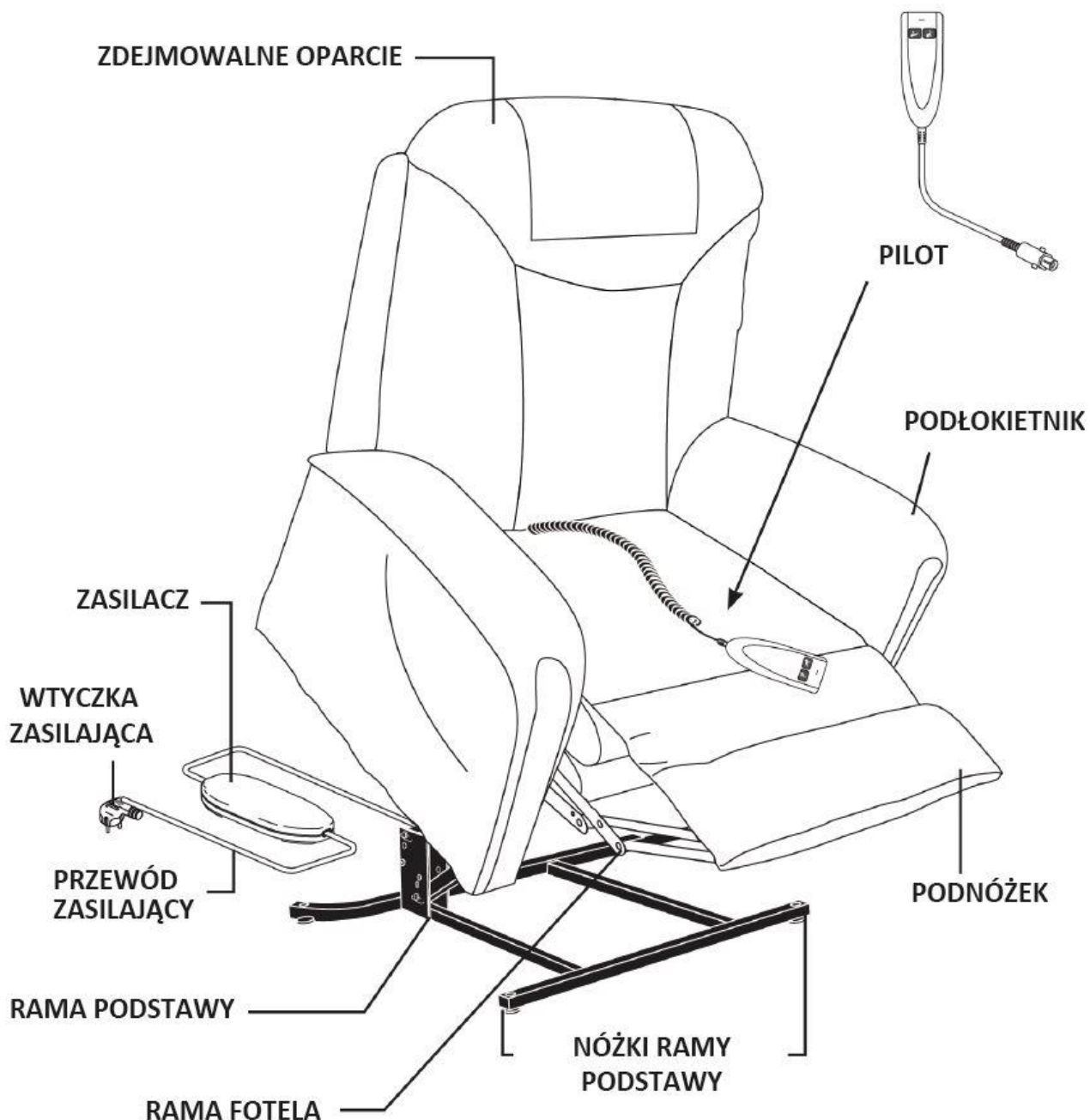

Tekstforklaring

Zdejmowalne oparcie – aftageligt ryglæn

Zasilacz – forsyningsenhed

Wtyczka zasilająca – forsyningsstik

Przewód zasilający – forsyningskabel

Rama fotela - stolestel

Pilot - fjernbetjening

Podłokietnik – armlæn

Podnózek – benstøtte

Nóżki ramy podstawy – fodstellets ben

## Udfoldning af hvilestolen

- Hvilestolen leveres fuldstændigt monteret, ud over det aftagelige ryglæn.
- Ryglænet monteres på hvilestolen vha. to monteringskinner, der er anbragt på begge sider af stolen.
- Tryk på ryglænet, indtil begge monteringskinner er låst i deres position.

- Kontrollér, at ryglænet er monteret stabilt ved at trække det let opad. Er ryglænet løst, skal ovenstående monteringsstrin gentages.
- Spænd begge stofskærme, der forbinder ryglænet m. hvilestolen, vha. de forreste og bagerste velcrobånd.
- Sæt forsyningskablet ind i stikkontakt for kablet på stolestellet. Slå kontaktlåsen til.
- Sæt tilslutningskabel for fjernbetjeningen ind til stikkontakt for kablet i sidelomme til hvilestol. Slå kontaktlåsen til.

### Sammenfoldning af hvilestolen

- Lås kontaktlåsene op og træk begge stik for hhv. fjernbetjeningskablet og forsyningskablet.
- Løsn alle stofskærme (forrest og bagerst velcrobånd).
- Vip monteringslåse på begge fastgørelsesskinner let udad m. et dertil egnet værktøj og skub ryglænet ud.

### Brug af fjernbetjeningen

#### Knap A

Ryglænet skubbes nedad.


#### Knap B

Ryglænet skubbes opad.

#### Knap C

Løftefunktion – hele stolen bevæges opad og vippes let fremad, så det er lettere for brugeren at rejse sig op fra stolen.

Hvis du holder knappen nede, mens stolens fodstøtter er løftet, vil fodstøtterne først sænkes, hvorefter hvilestolen løfter brugeren til stående stilling.

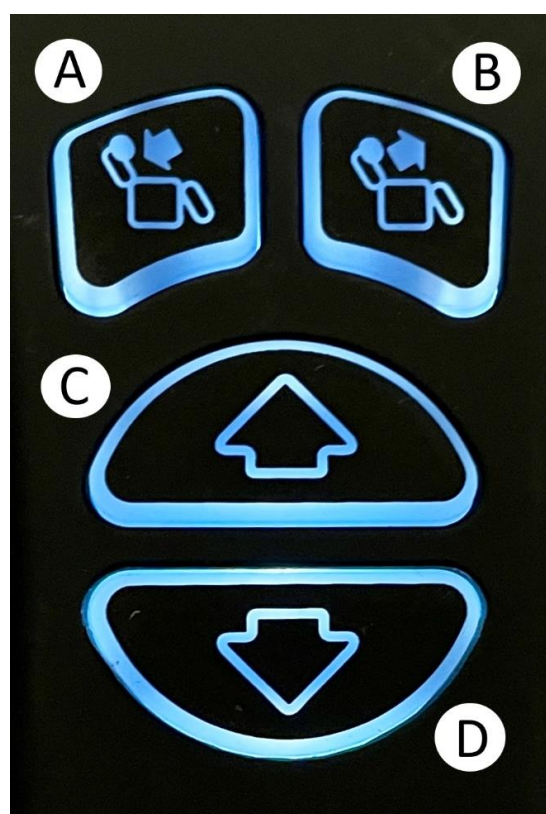


## Knap D

Tilbage til hvilepositionen - hele hvilestolen bevæges nedad.  
Efter at hvilestolen vender tilbage til neutral stilling, vil fodstøtten køre opad, hvis knappen stadig holdes nede.

## Transport af hvilestolen

Hvilestolen er udstyret m. to baghjul til transportformål (se figuren nedenfor).

For at flytte hvilestolen skal du tippe ryglænet let bagud, så hvilestolen hviler på baghjulene. Flyt dernæst stolen.

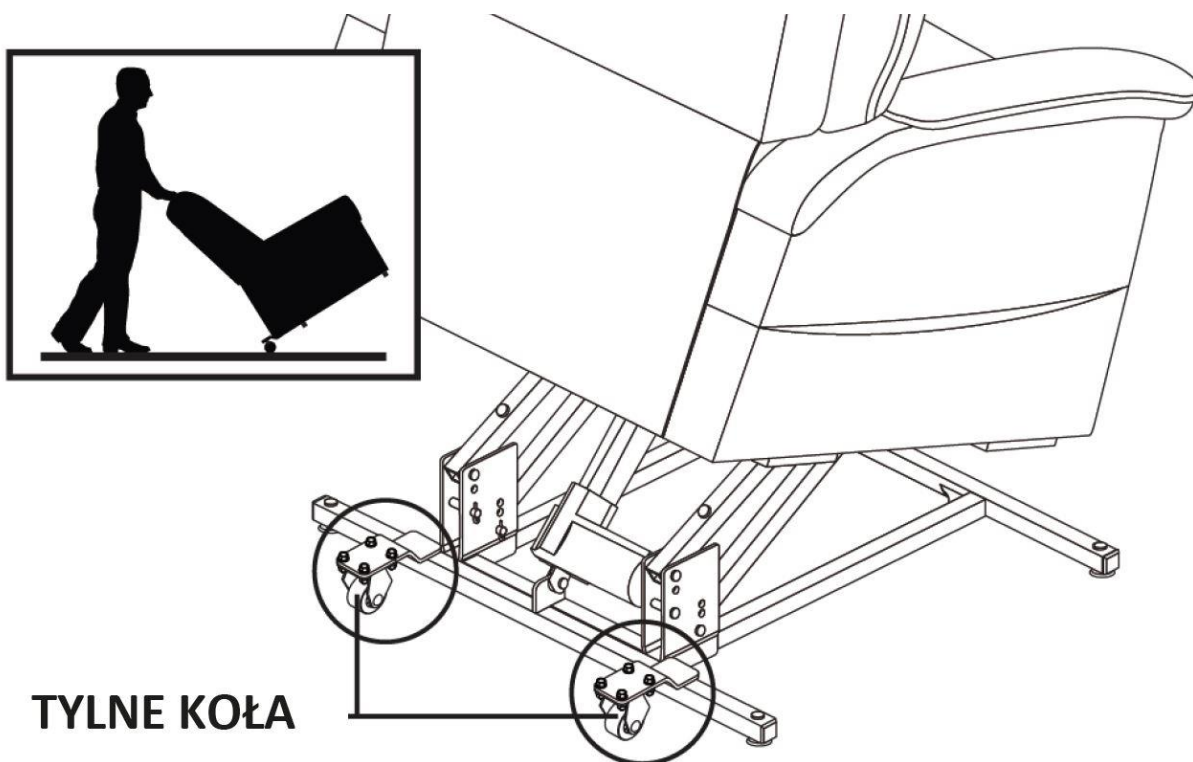

*Tekstforklaring:  
Tylne koła – baghjul*

#### 4. Teknisk specifikation

Total længde (siddestilling)	85 cm
Total højde (siddestilling)	109 cm
Sædedybde	43 cm
Ryglæns højde	76 cm
Sædehøjde (siddestilling)	51,5 cm
Total bredde	80 cm
Sædebredde	55 cm
Armlæns højde	12,5 cm
Total længde (liggestilling)	159 cm
Total højde (liggestilling)	89 cm
Total længde (løfteposition)	84 cm
Total højde (løfteposition)	129 cm
Ryglænets hældningsvinkel	141°
Fodstøttens løftevinkel	89°
Hældningsvinkel (løftefunktion)	17°
Vægt	43 kg
Maks. belastning	130 kg
Styringstype	dobbelstyring
Betrækfarve	Mocca

#### 5. Bemærkninger og anvisninger

- Hvilestolen er beregnet til indendørs brug af én person ad gangen.
- Det er ikke tilladt at sidde på ryglænet, armlænet el. fodstøtten.
- Hold hænderne og fødderne væk fra de bevægelige dele af fodstellet og stolestellet.

**Timago International Group frasiger sig ethvert ansvar for uhensigtsmæssig anvendelse af hvilestolen, manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvendelse af rollatoren i strid med formålet.**

## 6. Vedligeholdelse

Betrækket skal rengøres m. en fugtig klud, og dernæst tørres grundigt af. Det er ikke tilladt at bruge aggressive desinficeringsmidler på grund af risiko for beskadigelse af stoffet. Fjern løbende alle urenheder fra de bevægelige dele af fodstellet og stolestellet.










## 7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet bør ikke udsættes for direkte sollys, vand og fugt.

## 8. Garantioplysninger

Produktet er omfattet af garantien. Garantivilkårene er beskrevet i garantikortet, som du fik udleveret. Gem købsbeviset (kvittering el. faktura) til garantiformål.

## 9. Mærkning

	Referencenummer		Producent
	Partinummer		Produktionsdato
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs brugsanvisningen nøje igennem
	Producenten har vurderet produktets forenelighed m. de væsentlige krav, der stilles til medicinsk udstyr.		

Kontakt vores forhandlere for at gøre dig bekendt med hele vores sortiment.

For nærmere oplysninger se hjemmesiden **[www.timago.com](http://www.timago.com)**

Tak fordi du har valgt Timago produktet!



Timago International Group  
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa [ApS og K/S]  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Polska

Tlf.: +48 33 499 50 00  
Telefax: +48 33 499 50 11  
E-mail: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



10/2023(I)