

BRUGSANVISNING

Sammenklappelig toiletstol m. lynkobliner

Produktkode: TGR-R KT 618




1. Udførelse

En sammenklappelig toiletstol udført i et pulvermalet stålstel. Har højdejusterbare ben m. gummifødder m. anti-skrid. Stolen er udstyret m. et toiletbræt m. klap og en let aftagelig bækkenspand m. låg. Stolen er fastmonteret takket være anvendelsen af lynkoblingerne og derfor let at montere på egen hånd. Stolen kan justeres og dermed tilpasses den enkeltes behov, og armlænene på begge sider sikrer bedre stabilitet og brugssikkerhed.

Sættet indeholder: et hovedstel, et frontstel og et bagstel (bøjet) m. lynkoblinger, et toiletbræt m. klap, en bækkenspand m. låg

Bestanddele:

- a. bagstel
- b. frontstel
- c. bækkenspand
- d. højdejustering
- låsestift
- e. fødder m. anti-skrid

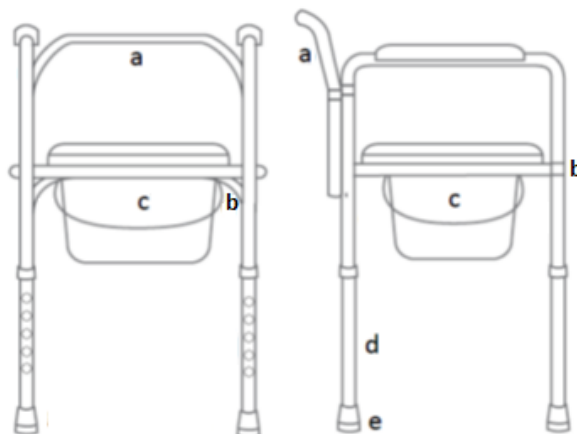

2. Anvendelse

En toiletstol er et hjælpemiddel, der gør det lettere for brugeren at udføre hygiejnerutiner. Den anbefales til personer m. mobilitetsbesvær, nedsat funktion og personer, der lider af andre bevægelsesbegrænsende tilstande, samt til dem, der ikke længere selvstændigt kan sætte og rejse sig fra toilettet. Stolen er udstyret

m. en bækkenspand m. låg, som er anbragt under sædet, og dermed har en toiletfunktion. Den er behjælpelig ved toilet- og plejerutiner.

3. Montering

Opklapning af toiletstolen

Trin 1. Hovedstellet skal klappes op. Montér frontstellet (b), og dernæst det bøjede bagstel (a) vha. lynkoblingerne.

Trin 2. Fastgør toiletbræt m. klap til røret bakerst på stellet, indtil plastbeslagene falder på plads.

Trin 3. Fastgør en bækkenspand el. en toiletadapter, hvis stolen placeres over toilettet, til stålbeslagene på stolen.

Højdejustering

For at justere stolen i højden, skal du trykke på metalstiften, vælg den ønskede benhøjde, og dernæst lås den i position m. en låsestift. Benene justeres trinvis for hver 2,5 cm.

Bemærk! Stifterne i alle ben skal være indstillet til samme højde. Benene bør altid hvile stabilt på underlaget.

Anvendelse

Åbn klappen, og dernæst tag låget af bækkenspanden. Sæt låget på plads efter endt brug og dernæst luk klappen.

4. Teknisk specifikation

Totalbredde	57 cm
Indvendig bredde	45 cm
Totaldybde	50 cm
Sæthøjde fra underlaget	40-54 cm
Totalhøjde fra underlaget	66-80 cm

Sædedimensioner	34 cm x 37 cm
Stolens vægt	5,9 kg
Maks. belastning	135 kg
Stelfarve	hvid

5. Bemærkninger og anvisninger

Timago International Group frasiger sig ethvert ansvar for uhensigtsmæssig anvendelse af produktet, manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvendelse af rollatoren i strid med formålet.

6. Vedligeholdelse

Den tekniske tilstand af toiletstolen skal kontrolleres regelmæssigt på egen hånd:

- Toiletstolen skal rengøres regelmæssigt kun m. vand og blide rengøringsmidler, der besidder en PZH-attest. Aftør stolen grundigt.
- **Undlad at bruge:** aggressive poleringsmidler, stærke rengøringsmidler, slibemidler, blegemidler, benzin el. nogen som helst opløsningsmidler til rengøring (der er risiko for beskadigelse af stellet, synlige mangler, og som konsekvens heraf – bortfald af garantien).
- Bækkenspanden skal tømmes og dernæst både bækkenspanden og toiletbrættet skal desinficeres efter hver brug. Brug toiletrensemidler i henhold til anvisningerne fra producenten.










7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet bør ikke udsættes for direkte sollys, vand og fugt.

8. Garantioplysninger

Produktet er omfattet af garantien. Garantivilkårene er beskrevet i garantikortet, som du fik udleveret. Gem købsbeviset (kvittering el. faktura) til garantiformål.

9. Mærkning

	Referencenummer		Producent
	Partinummer		Produktionsdato
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs brugsanvisningen nøje igennem
	Producenten har vurderet produktets forenelighed m. de væsentlige krav, der stilles til medicinsk udstyr.		

Kontakt vores forhandlere for at gøre dig bekendt med hele vores sortiment. For nærmere oplysninger se hjemmesiden www.timago.com
Tak fordi du har valgt Timago produktet!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa [ApS og K/S]

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polska

Tlf.: +48 33 499 50 00

Telefax: +48 33 499 50 11

E-mail: info@timago.com



04/2021(II)