

# BRUGSANVISNING

## Firehjulet aluminiumsrollator

Produktkode: TGR-R RA 882




### 1. Udførelse

En sammenklappelig firehjulet rollator, udført i et aluminiumsstel belagt m. farve m. metallisk glans. Har et bredt polstret sæde, et blødt ryglæn og en aftagelig indkøbskurv. Udstyret m. højdejusterbare håndtag m. anatomiske greb og bremse m. parkeringsklemme. Hjulene har et smalt tværsnit og en diameter på 8". Sættet indeholder: to håndtag m. bremse, et rollatorstel m. sæde, et ryglæn, en indkøbskurv, en låseskrue - 2 stk.

#### Rollatorens består af:

- a. håndtag
- b. bremse
- c. låseskrue
- d. bremsekabler
- e. ryglæn
- f. låsestift
- g. tværstang
- h. tværstangbeslag
- i. strop til sammenklapning af stellet
- j. indkøbskurv
- k. øverste bremsejustering
- l. nederste bremsejustering
- m. krykkeholder

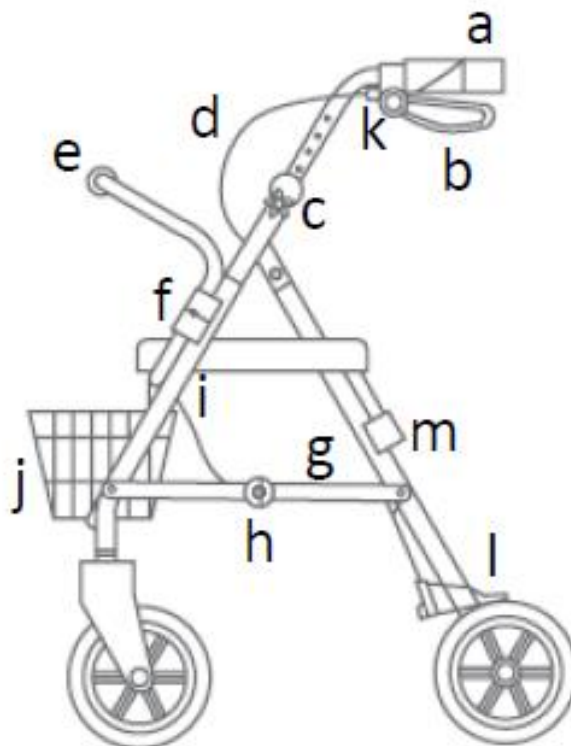

### 2. Anvendelse

En firehjulet rollator er et hjælpeudstyr beregnet for personer m. nedsat fysisk funktionsevne, der har brug for et stabilt greb og gangstøtte. Den anbefales også som hjælpemiddel til ældre personer m. dårlig balance,

der forbedrer deres gangkomfort og sikrer dem mod fald. Takket være anvendelsen af rollatoren kan personer m. gangbesvær el. problemer m. et komme op i stående stilling opretholde en aktiv hverdag. Rollatoren sikrer høj stabilitet, bedre støtte og sikkerhed under gangen.

### **3. Montering**

#### **Opklapning og sammenklapning af rollatoren**

- For at folde rollatoren ud skal du klappe stellet op og trykke på tværstangen, der er anbragt under sædet, indtil stangbeslagene er klappet fuldt op. Sæt dernæst håndtagene i monteringshullerne i den ønskede højde ved at tilspænde låseskruerne, bremsekablerne skal befinde sig på indersiden af rollatoren. Sædet skal hvile på det opklappede stel.
- Montér dernæst ryglænet i monteringshullerne forrest på rollatoren, indtil låsestifterne falder på plads.
- Nu kan du hænge indkøbskurven forrest på rollatorstellet.
- Fjern plastbeskytterne fra hjulene.
- For at klappe rollatoren sammen før transport skal du afmontere kurven, sænke sædet, og dernæst trække stroppen, der forbinder tværstangen m. stellet, opad, indtil stellet er klappet helt sammen.

#### **Bremsefunktion**

- For at standse rollatoren skal du flytte bremsestangen opad mod håndtaget, og dernæst holde den i denne position i et stykke tid.
- Under parkering el. når rollatoren bruges som sæde, skal du låse bremsen m. en bremseklemme ved at trække bremsehåndtaget nedad.
- For at frigøre bremsen, skal du trække bremsehåndtaget opad.

#### **Højdejustering af håndtagene**

- For at justere håndtagene i højden skal du løsne låseskruerne, der er anbragt yderst på stellet, vælge den ønskede rørhøjde og spænde låseskruerne til igen.

**Bemærk!** Håndtagene skal være justeret til samme højde.

## Bremsejustering

**Øverste bremsejustering:** Løsn kabelhåndtaget, træk passende længde af kablet ud og dernæst lås det fast ved at tilspænde klemmeskruen.

**Nederste bremsejustering:** løsn fastgørelsesskruen m. flad nøgle, træk i det sorte bremsekabel, så kablets stramning justeres, og spænd fastgørelsesskruen til igen.

## 4. Teknisk specifikation

Totalbredde	60 cm
Totaldybde	66 cm
Sædedimensioner	35 cm x 32 cm
Sædehøjde fra underlaget	53 cm
Højdejustering af håndtagene	77-88 cm
Vægt	8,2 kg
Maks. belastning	110 kg
Maks. belastning af indkøbskurven	5 kg
Stelfarve	vinrød, blå, grafitgrå

## 5. Bemærkninger og anvisninger

**Timago International Group** frasiger sig ethvert ansvar for u hensigtsmæssig anvendelse af rollatoren, manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvendelse af rollatoren i strid med formålet.

## 6. Vedligeholdelse

Rollatorstellet skal rengøres m. en fugtig klud, og dernæst tørres grundigt af. Det er ikke tilladt at bruge aggressive poleringsmidler på grund af risiko for beskadigelse af beskyttelseslagene. Fjern løbende alle urenheder fra de bevægelige dele af rollatoren (beslag, klemmeskruer, låse).










## 7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet bør ikke udsættes for direkte sollys, vand og fugt.

## 8. Garantioplysninger

Produktet er omfattet af garantien. Garantivilkårene er beskrevet i garantikortet, som du fik udleveret. Gem købsbeviset (kvittering el. faktura) til garantiformål.

## 9. Mærkning

	Referencenummer		Producent
	Partinummer		Produktionsdato
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs brugsanvisningen nøje igennem
	Producenten har vurderet produktets forenelighed m. de væsentlige krav, der stilles til medicinsk udstyr.		

Kontakt vores forhandlere for at gøre dig bekendt med hele vores sortiment. For nærmere oplysninger se hjemmesiden **[www.timago.com](http://www.timago.com)**

Tak fordi du har valgt Timago produktet!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa [ApS og K/S]

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polska

Tlf.: +48 33 499 50 00

Telefax: +48 33 499 50 11

E-mail: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



04/2021(II)