

BRUGSANVISNING

Firehjulet aluminiumsrollator YOLA

Produktkode: TGR-R RA 883 YOLA




1. Udførelse

En sammenklappelig firehjulet rollator, udført i et aluminiumsstel belagt m. farve m. metallisk glans. Udstyret m. bremse m. parkeringsklemme, et sæde m. ryglæn og en indkøbstaske. Har fulde hjul m. et smalt tværsnit og en diameter på 8". Kan klappes sammen under transport og har højdejusterbare håndtag m. anatomiske greb. Konstruktionen er baseret på krydsstellet og rør m. et ovalt tværsnit, hvilket øger betydeligt rollatorens modstandsdygtighed over for aksiale belastninger.

Sættet indeholder: et rollatorstel m. sæde og ryglæn, to håndtag m. bremse, en indkøbstaske, en ringklokke, låseskruer - 4 stk., drejelige 8" forhjul, 8" baghjul.

Rollatorens elementer:

- a. håndtag
- b. bremse
- c. ringklokke
- d. ryglæn
- e. indkøbstaske
- f. bremsekabel
- g. låsestift
- h. låseskrue
- i. håndtag til sammenklapning af sædet
- j. krykkehåndtag
- k. nederste bremsejustering

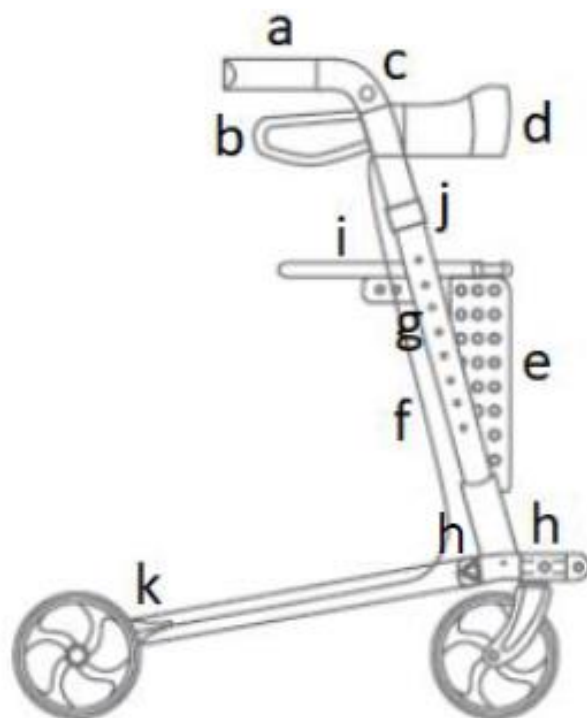

2. Anvendelse

En firehjulet rollator er et hjælpeudstyr beregnet for personer m. nedsat fysisk funktionsevne, der har brug for et stabilt greb og gangstøtte. Den anbefales også som hjælpemiddel til ældre personer m. dårlig balance,

der forbedrer deres gangkomfort og sikrer dem mod fald. Takket være anvendelsen af rollatoren kan personer m. gangbesvær el. problemer m. et komme op i stående stilling opretholde en aktiv hverdag. Rollatoren sikrer høj stabilitet, bedre støtte og sikkerhed under gangen.

3. Montering

Opklapning og sammenklapning af rollatoren

- Start med at klappe forhjulene op og låse dem i position ved at skubbe låseskruer ind i monteringshullerne i stellet. Klap dernæst baghjulene op og lås dem i position vha. låseskruer i den øverste del af bagbenene.
- For at klappe rollatoren op skal du trykke på det midterste punkt af sædet, så alle dele af rollatoren er afstemt i forhold til hinanden og der høres et klik.
- Montér indkøbstasken forrest på rollatoren.
- Kontrollér spændingen af monteringskruerne før rollatoren tages i brug for første gang.
- Fjern plastbeskytterne fra hjulene.
- Træk stroppen, der er anbragt i sædets midterste punkt, opad for at klappe rollatoren sammen.

Bremsefunktion

- For at standse rollatoren skal du flytte bremsestangen opad mod håndtaget, og dernæst holde den i denne position i et stykke tid.
- Under parkering el. når rollatoren bruges som sæde, skal du låse bremsen m. en bremseklemme ved at trække bremsehåndtaget nedad.
- For at frigøre bremsen skal du trække bremsehåndtaget opad.

Højdejustering af håndtagene

For at justere håndtagene i højden skal du trykke på metalstiften på stolens ben, vælge den ønskede højde på det indvendige rør, og derefter låse rørene i position i forhold til hinanden. Stifterne i alle benene skal være sat i samme højde.

Bremsejustering

Nederste bremsejustering: For at justere bremsen og øge spændingen skal du løsne justeringskruen vha. dertil egnede værktøjer, og dernæst spænde klemmeskruen ved samtidigt at holde justeringskruen på plads.

4. Teknisk specifikation

Totalbredde	64 cm
Totaldybde	69 cm
Sædedimensioner	46,5 cm x 26 cm
Sædehøjde fra underlaget	53,5 cm
Højdejustering af håndtagene	79,5-92,5 cm
Vægt	7,6 kg
Maks. belastning	130 kg
Maks. belastning af indkøbskurven	5 kg
Stelfarve	grafitgrå, orange, grøn

5. Bemærkninger og anvisninger

Timago International Group frasiger sig ethvert ansvar for u hensigtsmæssig anvendelse af rollatoren, manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvendelse af rollatoren i strid med formålet.

6. Vedligeholdelse

- Rollatorstellet skal rengøres m. en fugtig klud, og dernæst tørres grundigt af.
- Det er ikke tilladt at bruge aggressive poleringsmidler på grund af risiko for beskadigelse af beskyttelseslagene.
- Fjern løbende alle urenheder fra de bevægelige dele af rollatoren (beslag, klemmeskruer, låse).










7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet bør ikke udsættes for direkte sollys, vand og fugt.

8. Garantioplysninger

Produktet er omfattet af garantien. Garantivilkårene er beskrevet i garantikortet, som du fik udleveret. Gem købsbeviset (kvittering el. faktura) til garantiformål.

9. Mærkning

	Referencenummer		Producent
	Partinummer		Produktionsdato
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs brugsanvisningen nøje igennem
	Producenten har vurderet produktets forenelighed m. de væsentlige krav, der stilles til medicinsk udstyr.		

Kontakt vores forhandlere for at gøre dig bekendt med hele vores sortiment. For nærmere oplysninger se hjemmesiden **www.timago.com**
Tak fordi du har valgt Timago produktet!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa [ApS og K/S]
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska
Tlf.: +48 33 499 50 00
Telefax: +48 33 499 50 11
E-mail: info@timago.com



04/2021(II)