



BETJENINGSVEJLEDNING

Micro el-scooter 1.064 / 1.06424

Indhold

De anvendte mærkninger betydning	4
Indledning	4
Modeller	4
Indikationer / kontraindikationer	4
Modtagelse	5
Brug i overensstemmelse med formålet	5
Anvendelse	5
Tilpasning	5
Juridiske bestemmelser	6
Kombination med produkter fra andre producenter	6
Ibrugtagning efter opbevaring	6
Levetid	6
Oversigt	7
Model: 1064 / 1,06424	7
Betjeningsmodul	8
Håndtering af Micro el-scooteren	8
Sikring af Micro el-scooteren	8
Funktionskontrol	8
Køreegenskaber	8
Bremser	9
Driftsbremse	9
Opbremsning af Micro el-scooteren	9
Parkeringsbremse	9
Fastgørelse af bremserne	9
Løsning af bremserne	9
Køre-/skubbefunktion	9
Indstilling til skubbefunktion	9
Indstilling til kørefunktion	10
Betjeningsmodulets funktioner	10
Batteriladestik	10
Tilslutning af betjeningsmodul	10
Batterispænding	10
Batteriindikator	10
Evaluerings	10

Forhåndsindstillet tophastighed	10
Forhåndsindstilling af tophastighed 11	
Hastighedstrin	11
Joystick	12
Køre- og styrebevægelser	12
Opbremsning af Micro el-scooteren	12
Knapper og symboler	13
Klargøring til drift	14
Kontrol inden kørsel	14
Batteriets ladetilstand	14
Opladning af batterier	14
Batteriopladning	15
Særligt ved brug af litium-ion-batterier	15
Stilstand i mere end en uge	15
Placering af betjeningsmodulet	15
Funktionsbeskrivelse	16
Indstilling af afstand til armlæn	16
Afmontering af betjeningsmodulet	16
Isætning af betjeningsmodulet	16
Sæde	16
Drej sædet	16
Tag sædet af	16
Sæt sædet på	16
Indstilling af sædehøjde	16
Ryglæn	17
Armlænene	17
Opsvingning af armlæn	17
Indstilling af armlænvinkel	17
Tag armlænet af	17
Sæt armlænet i og positionér det	17
Reducér Micro el-scooterens mål	17
Batteripakken	17
Sikkerhedssele	17
Kurv	18
Holder til ganghjælpemiddel	18

Sædelift	18	Bortskaffelse	27
Sædehøjdeindstilling	18	Anvisninger til brug for forhandleren	27
Flytning og transport	18	Programmering af køreegenskaber	28
På-/aflæsning	18	Tekniske data	28
Ramper og lifte	19	Dæktryk ved luftdæk	28
Persontransport i motorkøretøjer	19	Rækkevidde	29
Transportsikring	19	Køreegenskaber ved forcering af stigninger	29
Vedligeholdelse	19	Anvendte standarder	29
Servicearbejde	19	Angivelser efter ISO 7176-15 for model 1.064/1.06424	29
Serviceplan	20	Yderligere tekniske data for model 1.064/1.06424	30
Dæk	21	Betydning af symbolerne på vaskeanvisningerne	31
Hjul	21	Betydning af mærkaterne på Micro el-scooter	31
Sikringer	21	Forklaring til symbolerne på typeskiltet	32
Fejludbedring	22	Ansvar/garanti	33
Fejldiagnose	23	Kontrolokumentation	34
Fejlvisning ved hjælp af batteriindikatoren	23	Ansvar- / garantikupon	35
Grundlæggende sikkerhedsanvisninger	24	Kontrolokumentation ved overdragelse	35
Ledsager	24		
Forflytning fra Micro el-scooteren	24		
Opsamling af genstande	24		
Kørsel på skråninger, stigninger eller skrånende kørebane	24		
Forcering af forhindringer	25		
Elektrisk anlæg	25		
Befordring i offentlige transportmidler	25		
Kørsel i offentlig trafik	26		
Rengøring	26		
Behandlet overflade	26		
Desinficering	26		
Reparation	27		
Istandsættelse	27		
Service	27		
Reservedele	27		
Anvisninger vedrørende længere brugspausen	27		

DE ANVENDTE MÆRKNINGERS BETYDNING

Sikkerhedsanvisninger på farvet baggrund skal altid følges!

- ➔ Dette symbol står for anvisninger og anbefalinger.
- [] Henvisning til et billednummer.
- () Henvisning til et funktionselement inden for et billede.

INDLEDNING

Læs dette dokument før første ibrugtagning, og ret dig efter det.

Børn og unge bør eventuelt læse dette dokument før første køretur sammen med forældre eller en tilsynsførende eller ledsager.

Denne betjeningsvejledning skal hjælpe dig med at blive fortrolig med håndtering af Micro el-scooteren og med at undgå ulykker.

- ➔ De illustrerede udstyrsvarianter kan afvige fra din model.

Derfor er der også medtaget kapitler om optioner, som muligvis ikke gælder for din individuelle Micro el-scooter.

Synshandicappede brugere finder PDF-filerne med udvidede oplysninger om vores produkter på vores website under:

< www.meyra.com >.

- ➔ Kontakt din forhandler, hvis du har spørgsmål.

Alternativt kan brugere med synshandicap få en hjælper til at læse teksten i dokumentationsmaterialet højt.

Hold dig løbende opdateret vedrørende produktsikkerheden, mulige tilbagekaldelseskampagner og generelle brugsanvisninger for vores produkter i < infocenter > på vores hjemmeside: < www.meyra.com >.

Denne betjeningsvejledning gælder for følgende modeller:

Model 1.064

Model 1,06424

INDIKATIONER / KONTRAINDIKATIONER

Ved allergiske reaktioner, hudrødme og/eller tryksår ved brug af Micro el-scooteren skal der straks søges læge.

For at undgå kontaktallergier anbefaler vi kun at bruge Micro el-scooteren iført tøj.

Micro el-scooteren er beregnet til at forbedre den selvstændige mobilitet for persongrupper med mobilitetsbegrænsninger, som ikke nødvendigvis er sygdomsbetingede.

Micro el-scooteren må ikke anvendes ved:

- kognitive og mentale begrænsninger samt mental retardering, som udelukker selvstændig brug af Micro el-scooteren.
 - blinde personer og personer med begrænset synsevne, som ikke kan kompenseres ved hjælp af synshjælpe-midler eller andre hjælpemidler, og som medfører begrænsninger i hverdagen.
 - Påvirkning af medicin med negativ indvirkning (drøftelse med læge eller farmaceut).
 - Forhold, som udelukker en selvstændig brug af styringen.
 - kraftige balance- og/eller sanseforstyrrelser.
 - manglende siddeevne.
- ➔ Spørg din læge, terapeut eller forhandler vedrørende disse og yderligere risici ved produktet.

MODTAGELSE

Alle produkter underkastes kvalitetskontrol på fabrikken og emballeres i særlige papkasser.

- ➔ Du bedes alligevel kontrollere kørestolen for eventuelle transportskader umiddelbart efter modtagelsen – helst mens overbringeren er til stede.
- ➔ Emballagen til Micro el-scooteren bør opbevares til en eventuelt senere nødvendig transport.

BRUG I OVERENSSTEMMELSE MED FORMÅLET

Micro el-scooteren er beregnet til at forbedre den selvstændige mobilitet indendørs samt i nærmiljøet omkring boligen (lejlighed, indkøbscentre, klinikker og plejehospitaler)

ANVENDELSE

Micro el-scooteren køres ved hjælp af det joystick, der er integreret i betjeningsmodulet.

Undgå pludselig igangsætning af din Micro el-scooter. – Risiko for at vælte!

Brug ikke Micro el-scooteren uden monteret sæde!

Undgå at køre på opad- eller nedadgående terræn med utilstrækkelig vejbanebeskaffenhed.

Micro el-scooteren er udelukkende beregnet til transport af én siddende person.

– Den er ikke beregnet til andre former for træk- eller transportbelastninger.

Micro el-scooteren kan anvendes på jævnt, fast underlag og kan bruges som følger:

- til indendørs områder (f.eks. hjem, daginstitution), herunder kortvarig brug på direkte tilstødende, jævne, asfalterede udendørs arealer.

- Udsæt aldrig Micro el-scooteren for ekstreme temperaturer og skadelige miljøforhold, som f.eks. sollys og ekstrem kulde.
- Sand og andre smudspartikler kan sætte sig fast i de bevægelige dele og bevirke, at de ikke fungerer.

Lad dig ikke bære på Micro el-scooteren ved at løfte Micro el-scooteren fra jorden. Ikke fast monterede komponenter, f.eks. sæde og beklædning, kan løsne sig og dermed forårsage et fald.

- ➔ Micro el-scooteren er et elektrisk køretøj og ikke en bærearbejdsmiddel.

Brug kun Micro el-scooteren i overensstemmelse med anvisningerne i kapitlet *Tekniske data* på side 28 angivne specifikationer og grænseværdier.

TILPASNING

Lad altid kun den autoriserede forhandler udføre tilpasninger og indstillinger.

Micro el-scooteren giver mulighed for tilpasning til individuelle kropsmål. Før første brug bør din autoriserede forhandler foretage en tilpasning af Micro el-scooteren og give dig en instruktion i funktionerne på din Micro el-scooter. Her tages der hensyn til brugerens køreefaring, fysiske begrænsninger og det primære anvendelsessted for Micro el-scooteren. Kontrollér før første brug, at din Micro el-scooter fungerer korrekt.

Hvis din autoriserede forhandler foretager en reparation/istandsættelse eller væsentlige ændringer på din Micro el-scooter uden brug af originale reservedele, betyder dette bl.a. en ny markedsføring af din Micro el-scooter. Dette betyder, at din forhandler evt. skal foretage nye overensstemmelsesvurderinger og kontroller.

- ➔ Vi anbefaler at kontrollere tilpasningen af Micro el-scooteren regelmæssigt med henblik på også på lang sigt at sikre optimal støtte, selv ved ændringer i brugerens sygdoms-/handicapbillede. Især for børn og unge anbefales tilpasning hver 6. måned.

JURIDISKE BESTEMMELSER

Micro el-scooteren er ikke godkendt til offentlig vejtrafik.

KOMBINATION MED PRODUKTER FRA ANDRE PRO-DUCENTER

Enhver kombination af din Micro el-scooter med komponenter, der ikke er leveret af os, udgør generelt en ændring af din Micro el-scooter. Kontakt os for at høre, om vi har godkendt kombinationen.

IBRUGTAGNING EFTER OPBEVARING

Micro el-scooteren er egnet til genbrug. Før hver genanvendelse skal Micro el-scooteren gennemgå en komplet inspektion.

- ➔ De hygiejniske foranstaltninger, der er nødvendige for genanvendelse, skal gennemføres efter en valideret hygiejneplan og skal omfatte desinficering.

Servicevejledningen, der er beregnet til den autoriserede forhandler, indeholder oplysninger om genbrug og hyppigheden af genbrug af din Micro el-scooter.

LEVETID

Vi antager, at produktet har en forventet gennemsnitlig levetid på 5 år, såfremt produktet anvendes til det tilsigtede formål, og samtlige krav med hensyn til vedligeholdelse og service overholdes. Produktets levetid afhænger af såvel anvendeshyppighed, anvendelsesmiljø samt plejen af produktet. Ved hjælp af reservedele er det muligt at forlænge produktets levetid. Reservedele fås som regel i op til 5 år, efter at produktionen er ophørt.

- ➔ Den oplyste levetid udgør ikke nogen yderligere garanti.


OVERSIGT

Model: 1064 / 1,06424

Oversigten viser de vigtigste komponenter og betjeningslementer på Micro el-scooteren.

Pos. Betegnelse

- (1) Ryglæn
- (2) Betjeningsmodul
- (3) Klemkrue til betjeningsmodul
- (4) Greb til sædelås
- (5) Støttehjul
- (6) Håndtag til skift mellem køre-/skubbe-funktion
- (7) Hovedsikring
- (8) Lås på armlænet
- (9) Armlæn
- (10) Sæde
- (11) Typeskilt
- (12) Fodplade
- (13) Svinghjul
- (14) Batterikasse
- (15) Drivhjul
- (16) Lås for sædehøjden (kun ved model 1.064)
- (17) Opbevaringsrum
- (18) Kontakt til sædeløft (kun ved model 1.06424)

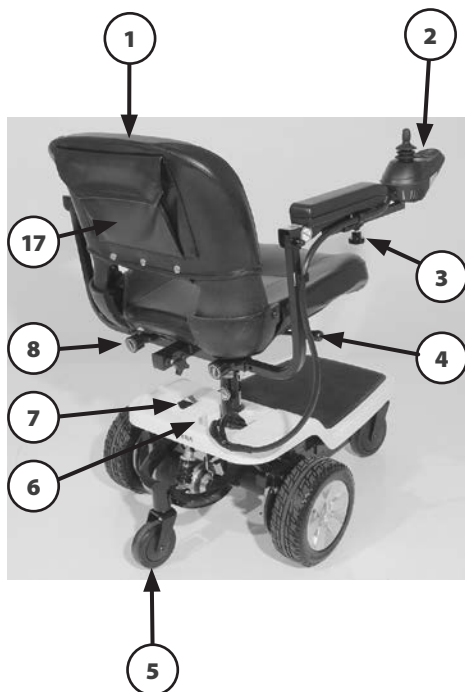


OVERSIGT

Betjeningsmodul

Overigten viser betjeningsmodulets betjeningsenheder.

Pos. Betegnelse

- (1) Betjeningsmodul
- (2) Batteriladestik
- (3) Joystick
- (4) Reducering af forvalgt hastighed
- (5) Horn
- (6) Kontroldisplay for batterikapacitet og fejlvisning
- (7) Tænd/sluk betjeningsmodul
- (8) Kontrolvisning af det indstillede hastighedsforvalg
- (9) Øgning af forvalgt hastighed

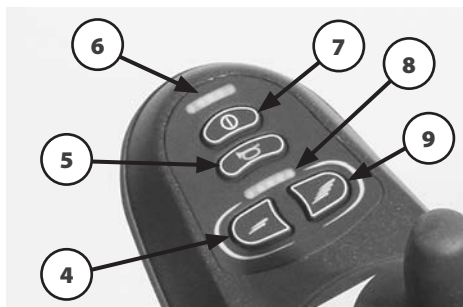

HÅNDTERING AF MICRO EL-SCOOTEREN

Sikring af Micro el-scooteren

Micro el-scooteren skal sikres mod utilsigtede rullebevægelser på følgende måde:

- 10. Skub omskiftergrebet til køre-/skubbe-funktion bagud til kørestilling.
- 11. Sluk for betjeningsmodulet.

Funktionskontrol

Før hver køretur skal Micro el-scooteren kontrolleres med hensyn til funktion og sikkerhed.

Køreegenskaber

Du bestemmer selv hastighed og kørselsretning under kørslen ved hjælp af joystickets bevægelse (køre- og styrehåndtag) samt den indstillede maksimale sluthastighed på din Micro el-scooter.

BREMSER

Brems din Micro el-scooter forsigtigt og i god tid. Dette gælder især foran personer og ved kørsel ned ad bakke!

Driftsbremse

Motorene fungerer elektrisk som driftsbremse og bremser Micro el-scooteren blidt og uden ryk til stilstand.

Opbremsning af Micro el-scooteren

For en kontrolleret opbremsning af Micro el-scooteren føres joysticket (styre- og kørehåndtag) langsomt tilbage til udgangspositionen (nulstilling).

- ➔ Micro el-scooteren stopper på kortest mulig strækning, når joysticket slippes.

Parkeringsbremse

Parkeringsbremserne virker kun, når skiftearmen til køre-/skubbefunktion for begge motorer er vippet til positionen for kørefunktion. De løsner sig automatisk, når man starter kørslen.

Parkeringsbremserne løsnes manuelt ved at dreje skiftearmen til køre-/skubbefunktion over til skubbefunktion.

Fastgørelse af bremserne

Micro el-scooteren må ikke kunne skubbes, når bremserne er aktiveret.

Undlad at indstille/skifte til skubbefunktion på nedadgående hældninger.

For at aktivere bremserne skubbes omskiftergrebene for køre-/skubbefunktion bagud til anslag og ind i kørefunktion [1 på side 36].

- ➔ Håndtaget til skift mellem køre-/skubbefunktion er beregnet til at blive betjent af en ledsager.

Løsning af bremserne

Stig kun ind i eller ud af Micro el-scooteren, når Micro el-scooteren er slukket, og omskiftergrebet for køre-/skubbefunktion er svinget over i kørefunktion!

Utilsigtet berøring af joysticket kan ellers få Micro el-scooteren til at sætte ukontrolleret i gang! – Fare for uheld!

For at løsne bremserne skubbes omskiftergrebene for køre-/skubbefunktion fremad til anslag og ind i skubbefunktion [2 på side 36].

- ➔ Håndtaget til skift mellem køre-/skubbefunktion er beregnet til at blive betjent af en ledsager.

KØRE-/SKUBBEFUNKTION

Skift kun Micro el-scooteren til skubbefunktion, eller skub den, når den står stille, ved manøvrering eller i nødstilfælde, men ikke på nedkørsler/stigninger.

Husk at skifte tilbage til kørefunktion, når elkøretøjet har været i skubbefunktion. Ellers er der fare for, at din Micro el-scooter ruller videre ukontrolleret.

Indstilling til skubbefunktion

1. Sluk for betjeningsmodulet, ellers vil kørestolen væresvær at skubbe.
 - ➔ Se kapitlet *Betjeningsmodulets funktioner* på side 10 for nærmere information.
2. Løsn bremserne [2 på side 36].
 - ➔ Se kapitlet *Løsning af bremserne* på side 9 for nærmere information.
 - ➔ Micro el-scooteren kan nu skubbes.

Indstilling til kørefunktion

1. Aktivér bremserne [1 på side 36].
 - ➔ Se kapitlet *Fastgørelse af bremserne* på side 9 for nærmere information.
2. Tænd for betjeningsmodulet.
 - ➔ Se kapitlet *Betjeningsmodulets funktioner* på side 10 for nærmere information.

Micro el-scooteren er nu klar til kørsel.

BETJENINGSMODULETS FUNKTIONER

Batteriladestik

Undlad at stikke andre genstande ind i batteriladestikket. – Fare for kortslutning!

Ved opladning af batterierne skal betjeningsmodulet først slukkes. Sæt derefter batteriopladerens stik ind forfra i ladestikket (3 på side 36) på betjeningsmodulet.

Tilslutning af betjeningsmodul

Joysticket må ikke styres ud under systemtesten.

Tryk på TÆND/SLUK-knappen (4 på side 36) for at tænde betjeningsmodulet. Elektronikken udfører nu en systemtest.

- ➔ Når batteriindikatoren (5 på side 36) lyser konstant, er elektronikken klar til drift.

Batterispænding

Efter tilkobling af betjeningsmodulet angiver batteriindikatoren (5 på side 36) efter systemtesten batterispændingen.

I takt med at batterispændingen falder, lyser færre og færre af de lysende segmenter på batteriindikatoren.

Batteriindikator

Batteriindikatoren (5 på side 36) angiver den eksisterende batterispænding på følgende måde:

Farverne betyder:

Grøn	Batterierne er opladet
	Ladetilstanden svarer til antallet af de displays, som lyser grønt.
Gul	Efteropladning anbefales.
Rød	Batterierne er tomme, efteroplad straks.

- ➔ En nøjagtig batteriindikator afspejles kun under kørsel på plant underlag.
 - ➔ Kørsel op og ned af stigninger vil få indikatoren til at vise forkert.

Evaluerings

Nøjagtigheden af batteriindikatoren afhænger f.eks. af batteritemperaturen, batteriets alder samt dets belastning og er derfor underlagt visse begrænsninger.

Rækkevidden for Micro el-scooteren hhv. batterierne bør testes én gang.

Forhåndsindstillet tophastighed

Fare for uheld ved uhensigtsmæssigt valg af den forhåndsindstillede hastighed!

Når der tændes for betjeningsmodulet, forhåndsindstilles den tophastighed, som var forvalgt, da der sidst blev slukket.

Forhåndsindstilling af tophastighed

Ved at trykke på knapperne (6 på side 36) og (7 på side 36) reduceres eller øges den forvalgte maksimale hastighed gradvist.

Displayet (8 på side 36) viser det valgte hastighedstrin.

Vælg en lav maksimumshastighed til kørsels-situationer, hvor du føler dig usikker (f.eks. kørsel i meget trange rum e.l.).

- ➔ Den maksimale hastighed skal indstilles afhængigt af de personlige forhold svarende til den pågældende kørsituation!
- ➔ Ved kørsel på ramper, stigninger, hældninger skal hastigheden tilpasses svarende til hældningen. Overskrid aldrig den tilladte tophastighed. – Fare for uheld!

Hastighedstrin

Den maksimale tophastighed kan forhåndsindstilles til 5 hastighedstrin [9 på side 36].

På hastighedstrin 5 (10 på side 36) er Micro el-scooterens maks. tophastighed 6 km/h.

På hastighedstrin 1 (11 på side 36) er den maks. tophastighed 20 % af maks. mulig hastighed.

Joystick

Først når batteriindikatoren (2) lyser konstant, må joysticket bevæges.

Køre- og styrebevægelser

Med joysticket (1) accelereres og bremses Micro el-scooteren. Vip langsomt joysticket i den ønskede køreretning.

Jo længere joysticket bevæges ud fra midterstillingen, desto hurtigere kører Micro el-scooteren (op til den indstillede tophastighed).


Hvis joysticket samtidigt vippes ud til siden, drejer kørestolen i en kurve. Hvis joysticket kun bevæges til siden, drejer Micro el-scooteren næsten på stedet.

➔ Ved baglænskørsel eller kørsel i kurver reduceres hastigheden automatisk.

Opbremsning af Micro el-scooteren

Micro el-scooteren stopper, når du slipper joysticket.

Flyt langsomt joysticket tilbage til midterpositionen (nulstillingen) for at foretage en afpasset nedbremsning.

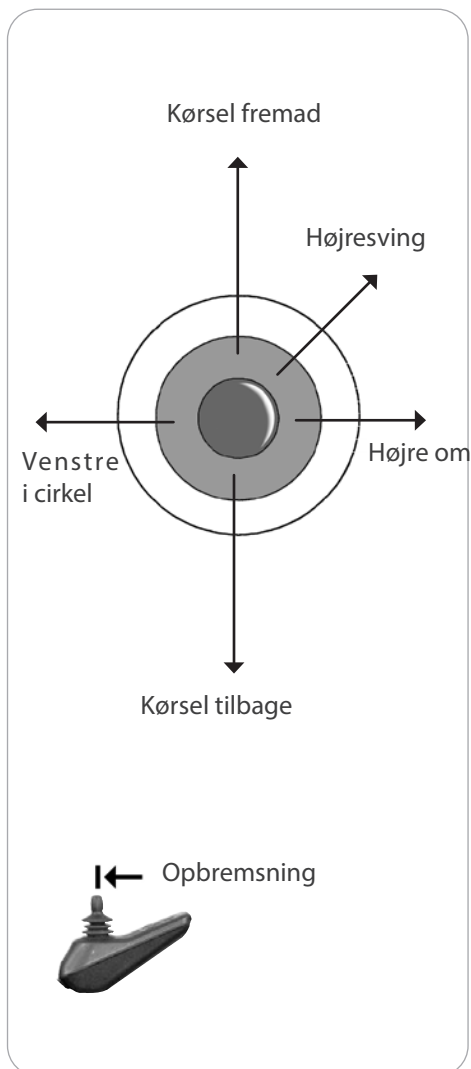

Knapper og symboler

	Tænd/sluk	Slår betjeningsmodulet til eller fra ved betjening Ved start udfører elektronikken en systemtest. Undlad at betjene joysticket i denne tid.
	Horn	Der lyder et akustisk signal, så længe der trykkes på knappen.
	Maks. hastighedsforvalg < Plus >.	Øger ved betjening af knappen den maks. forvalgte hastighed med et trin ad gangen (20 %). Af sikkerhedsmæssige grunde anbefaler vi kun at betjene < Plus-tasten >, når Micro el-scooteren står stille. Trin 1 (20 %) til maks. trin 5 (100 %).
	Maks. hastighedsforvalg < Minus >.	Forringer det maks. hastighedsforvalg med et trin ad gangen (20 %), når der trykkes. Af sikkerhedsmæssige grunde anbefaler vi kun at betjene < Minus-tasten >, når Micro el-scooteren står stille. Trin 5 (100 %) frem til min. trin 1 (20 %).
	Batteriopladningsindikator	I takt med en aftagende batteriopladningstilstand lyser et mindre antal lyssegmenter på batteriopladningsindikatoren. Blinkende lyssegmenter gør opmærksom på en fejl. Se kapitlet <i>Fejldiagnose</i> på side 23 for nærmere information.
	Visning af maks. tophastighed	Antallet af lysende dioder (LED) viser den forvalgte maksimale tophastighed/den valgte køreprofil. Hver LED svarer til et trin på 20 %.

KLARGØRING TIL DRIFT

For at gøre Micro el-scooteren køreklar skal følgende anvisninger udføres i den angivne rækkefølge.

1. Oplad batterierne via betjeningsmodulet inden første tur [12 på side 36].
 - ➔ Se kapitlet *Batteriopladning* på side 15 for nærmere information.
2. Kontrollér, om grebet på hovedsikringen står på < ON > (13 på side 36).
 - ➔ Se kapitlet *Sikringer* på side 21 for nærmere information.
3. Sæt drivmotorerne til køredrift [1 på side 36]. – Husk at aktivere bremserne.
 - ➔ Se kapitlet *Fastgørelse af bremserne* på side 9.
4. Kontrollér betjeningsmodulets position.
 - ➔ Betjeningsmodulets position skal indstilles, så Micro el-scooteren kan styres komfortabelt og sikkert.
 - ➔ Se kapitlet *Indstilling af afstand til armlæn* på side 16 for nærmere information.
5. Tænd for betjeningsmodulet.
 - ➔ Se kapitlet *Tilslutning af betjeningsmodul* på side 10 for nærmere information.

KONTROL INDEN KØRSEL

Inden kørsel bør følgende kontrolleres:

1. Micro el-scooterens tekniske tilstand.
 - ➔ Kontrollér f.eks. skrueforbindelserne ved at bevæge de enkelte komponenter såsom armlæn og ryglæn let.
 - ➔ Via en generel visuel inspektion.
2. Batteriets ladetilstand.

3. Indstillingen på den forvalgte maksimale hastighed.

➔ Se kapitlet *Forhåndsindstillet tophastighed* på side 10 for nærmere information.

Batteriets ladetilstand

Når det er tændt, viser batteridisplayet (5 på side 36) batteriets ladetilstand.

- ➔ Den viste værdi afhænger af omgivelsestemperaturen, batteriets alder og belastningstype og skal derfor ses med forsigtighed.
- ➔ Hvis det røde lyssegment i batteriindikatoren blinker, bør batterierne oplades straks.
- ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Fejludbedring* på side 22.
- ➔ Se kapitlet *Batterispænding* på side 10.

Opladning af batterier

Brug udelukkende den oplader, der er leveret med batteritypen!

Batterierne bør oplades straks efter den daglige brug af Micro el-scooteren, så den fulde køreevne igen er til rådighed næste dag.

Hvert batteri er underlagt en normal "selvaf-ladning". Hvis Micro el-scooteren ikke bruges i længere tid, bør batterierne genoplades én gang om ugen. Derved forbliver Micro el-scooteren konstant klar til brug.

- ➔ Opladningen bør foregå om natten. Det tager ca. 8 timer at oplade batteriet helt.

Til opladning af batterierne skal der anvendes en oplader, som er egnet til batteriernes konstruktionstype og nominelle kapacitet. Kun ved brug af de batterioplader, som vi har leveret og anbefaler, bevares garantien i fuldt omfang.

- ➔ Undgå gnistdannelse på grund af statisk elektricitet (som f.eks. kan skyldes syntetiske gulvbelægninger).

- ➔ Følg opladerens brugsanvisning.

Batteriopladning

Stik ikke andre genstande i opladningskontakten end batteriopladningsstikket.
– Fare for kortslutning!

- ➔ Følg betjeningsvejledningen til batteriopladeren ved opladning.
 - ➔ Opladningen bør foregå om natten. Det tager ca. 8 timer at oplade batteriet helt.
1. Micro el-scooteren skal sikres.
 - ➔ Se kapitlet *Sikring af Micro el-scooteren* på side 8 for nærmere information.
 2. Sæt stikket fra opladeren i batteriopladningsstikket på betjeningsmodulet (15 på side 36).
 3. Tænd for batteriopladeren/sæt strømstikket til batteriopladeren i en passende stikkontakt. Opladningsprocessen er sat i gang.
 - ➔ Opladningsprocessen fungerer kun, når grebet til hovedsikringen står på < ON > (13 på side 36).
 - ➔ Se hertil kapitlet *Sikringer* på side 21 for yderligere oplysninger.
 4. Afbryd forbindelsen mellem batteriopladeren og strømnettet, når opladningsprocessen er afsluttet, og træk stikket til batteriopladeren ud af batteriladestikket.

Særligt ved brug af litium-ion-batterier

Stik ikke andre genstande i opladningskontakten end batteriopladningsstikket.
– Fare for kortslutning!

Brug udelukkende den medfølgende litium-oplader til opladning af det valgfrie litium-ion-batteri.

Garantien er kun fuldt ud gyldig, hvis den batterioplader, vi har leveret, anvendes.

Fremmede opladere kan forårsage alvorlige skader på litium-ion-batteriet.

Oplad aldrig litium-ion-batteriet i nærheden af eller i forbindelse med brændbare væsker eller gasser.

Oplad aldrig litium-ion-batteriet i rum, hvor der kan dannes kondens på Micro el-scooteren og/eller litium-ion-batteriet.

Kør aldrig Micro el-scooteren helt tom i længere tid, da dette kan medføre beskadigelse af litium-ion-batteriet.

Et fuldstændigt afladet litium-ion-batteri må ikke genoplades.

Få litium-ion-batteriet udskiftet af forhandleren.

Oplad kun litium-ion-batteriet inden for det godkendte temperaturområde.

Se hertil kapitlet *Yderligere tekniske data for model 1.064/1.06424* på side 30.

Litium-ion-batteriet bør oplades straks efter den daglige brug af Micro el-scooteren, så den fulde køreevne igen er til rådighed næste dag.

Stilstand i mere end en uge

Ved stilstand af Micro el-scooteren i *længere end en uge* skal der udføres tilsvarende vedligeholdelsesforanstaltninger.

1. Grebet til hovedsikringen skal sættes på < OFF > for at afbryde strømforsyningen.
2. Tilslut opladeren én gang om ugen, og oplad batterierne.

PLACERING AF BETJENINGS-MODULET

Sluk for betjeningsmodulet inden indstilling/afmontering.

Tryk på Til/Fra-knappen (4 på side 36) på betjeningsmodulets betjeningsfelt.

- ➔ Se kapitlet *Tilslutning af betjeningsmodul* på side 10 for nærmere information.

Funktionsbeskrivelse

Betjeningsmodulets position kan tilpasses brugerens individuelle mål. Under transport eller med henblik på opbevaring kan betjeningsmodulet også tages af og lægges til side eller lægges på sædet [16 på side 37].

Indstilling af afstand til armlæn

For at indstille afstanden løsnes klemskruen (14 på side 36). Skub derefter betjeningsmodulet til den ønskede position. Før samtidig kablet forsigtigt med, og spænd klemskruen (14 på side 36) sikkert fast igen.

- ➔ Betjeningsmodulets position skal indstilles, så Micro el-scooteren kan styres komfortabelt og sikkert.

Afmontering af betjeningsmodulet

For at tage betjeningsmodulet af løsnes klemskruen (14 på side 36).

- ➔ Tag kablet ud af kabelholderne.

Træk derefter betjeningsmodulet fremad og ud af røret til armstøtten [17 på side 37].

Isætning af betjeningsmodulet

For at anvende kørefunktionen skal betjeningsmodulet stikkes ind i røret til armstøtten forfra], og afstanden til armstøtten derefter indstilles.

- ➔ Se kapitlet *Indstilling af afstand til armlæn* på side 16 for nærmere information.
- ➔ Fastgør kablet i kabelholderne.

SÆDE

Sædet [18 på side 37] med polstrede armlæn kan tages af og er højdejusterbart.

Drej sædet

Ved ind- og udstigning kan sædet drejes [19 på side 37].

For at løsne sædelåsen trækkes det sideplacerede greb (20 på side 37) opad.

- ➔ Inden for 180° går sædelåsen automatisk i indgreb igen for hver 45°.

Tag sædet af

Før sædet tages af, skal betjeningsmodulet tages af. – Følg anvisningerne i kapitlet *Afmontering af betjeningsmodulet* på side 16.

På model 1.06424 kan sædet ikke tages af.

For at tage sædet af [21 på side 37] trækkes det sideplacerede greb (20 på side 37) til sædelåsen opad.

For at løfte sædet af skal du tage fat under sædefladen fra siden.

- ➔ Brug ikke armlænen til at løfte eller bære sædet.

Sæt sædet på

Efter at sædet er sat på, skal betjeningsmodulet monteres igen.

For at sætte sædet på [18 på side 37] trækkes det sideplacerede greb (20 på side 37) opad.

- ➔ For at løfte sædet skal du tage fat under sædefladen fra siden.

Efter påsætning rettes sædet ind i kørselsretningen, og grebet (20 på side 37) skal gå i indgreb igen.

Kontrollér derefter sædelåsen.

Indstilling af sædehøjde

(Ikke på model 1.06424)

For indstilling af sædehøjden skal stikbolten (22 på side 37) trækkes ud af sædesøjlen. Efter positionering af sædesøjlen skal stikbolten sættes i igen (22 på side 37).

Ryglæn

Ryglænet kan svinges fremad ned på sædefladen [23 på side 37].

For at rejse det op skal ryglænet svinges op bagud [18 på side 37].

ARMLÆNENE

Opsvingning af armlæn

Ved ind- og udstigning kan armlænene svinges op [24 på side 38].

Indstilling af armlænvinkel

Vinklen på armlænet kan indstilles trinløst ved at justere anslagsskruen (25 på side 38).

Tag armlænet af

(Ikke på armlænet med kontakten til sædelift, model 1.06424)

For at tage armlænet af [26 på side 38] løsnes klemskruen (27 på side 38) og stikbolten (28 på side 38) trækkes ud.

- ➔ Når klemskruen er løsnet, og stikbolten er trukket ud, kan armlænet tages af udad [26 på side 38].

Sæt armlænet i og positionér det

Sæt armlænet i, og skub det indad til den ønskede position.

Efter isætning og positionering af armlænet sættes stikbolten i (28 på side 38).

Derefter spændes klemskruen (27 på side 38) fast.

Reducér Micro el-scooterens mål

Til opbevaring eller transport, f.eks. i en personbil, kan Micro el-scooteren reduceres i sine mål som følger [21 på side 37].

1. Sikr Micro el-scooteren.

- ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Sikring af Micro el-scooteren* på side 8.

2. Tag sædet af [21 på side 37] (ikke ved model 1.06424).

- ➔ Se også kapitlet *Sæde* på side 16.

3. Fjern batteripakken [29 på side 38].

- ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Batteripakken* på side 17.

De afmonterede dele skal opbevares sikkert og anbringes omhyggeligt igen, før kørestolen tages i brug!

Der kræves ingen særlige bærepunkter for at bære de aftagelige dele

BATTERIPAKKEN

Batteripakken kan tages ud til ekstern opladning af batterierne [29 på side 38].

4. Micro el-scooteren skal sikres.

- ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Sikring af Micro el-scooteren* på side 8.

5. Vip fodmåtten fremad [30 på side 38].

6. Tag batteripakken ud [29 på side 38].

- ➔ Tryk først batteripakken op nedefra, og tag den derefter ud.

SIKKERHEDSSELE

Sørg for, at der ikke kommer nogen genstande i klemme under seleremmen!

Efterfølgende montering af et fastspændingsbælte må kun udføres på et autoriseret værksted!

Hofteselen [31 på side 38] skrues fast på sædet nedefra.

Hofteselen bruges til at stabilisere siddepositionen og forhindrer, at man vælter ud af Micro el-scooteren.

Når sikkerhedsselen skal spændes, trækkes begge selens dele fremefter, og låsen skal gå hørligt i indgreb. Tryk på aktiveringsknappen og træk seleenderne fra hinanden for at åbne sikkerhedsselen.

- ➔ Sikkerhedsselen kan forlænges og må ikke sidde for stramt.

KURV

Jo større vægten i kurven er, desto større er risikoen for at tippe bagover.

Læg ikke værdifulde genstande som f.eks. en tegnebog åbent i kurven. - Utsigtet tab af værdifulde genstande.

Kurven [32 på side 38] kan tages af opad.

Kurven sættes på de to holdere for at hænge den på.

Den maksimale last i kurven er 3 kg.

HOLDER TIL GANGHJÆLPEMIDDEL

Eftermontering af en holder til ganghjælpemiddel må kun udføres af et autoriseret værksted.

Sæt kun stokke eller underarmskrykker i holderen til ganghjælpemiddel.

Ved kørsel gennem lave passager, f.eks. døre, skal frihøjden tages i betragtning, da ganghjælpemidlet eventuelt rager ud over konturen af Micro el-scooteren.

Holderen til ganghjælpemidlet bruges til sikker transport af et ganghjælpemiddel med en rørdiameter mellem 20 mm og 30 mm i næsten lodret position.

Tryk dit ganghjælpemiddel ind i begge holdere til ganghjælpemiddel med en let bevægelse fra side til side [33 på side 39].

- ➔ Sørg efter isætning for, at sædet stadig kan drejes.

Ganghjælpemidlet kan tages ud af holderen til ganghjælpemiddel ved at trække let i det.

SÆDELIFT

En ændring af sædehøjden må kun foretages, når køretøjet står stille.

Enhver ændring af sædehøjden medfører en reduktion af rækkevidden for Micro el-scooteren.

Sædehøjdeindstilling

For at justere sædehøjden fra grundstillingen skal kontakten (34 på side 39) bevæges opad.

- ➔ Når kontakten slippes, afbrydes justeringen.

For at justere sædehøjden til grundstillingen skal kontakten (34 på side 39) bevæges nedad.

- ➔ Når kontakten slippes, afbrydes justeringen.

FLYTNING OG TRANSPORT

Micro el-scooteren skal slukkes, før den løftes!

Brug ikke ryglænet, sædet eller armlænerne til at løfte Micro el-scooteren.

På-/af læsning

Micro el-scooteren kan også læses ved hjælp af ramper eller løfteplatforme.

- ➔ Se sikkerhedsanvisninger og generel håndteringsvejledning til < *Elkøretøjer* > kapitlet < *Ramper og lifte* >. – Dette dokument og yderligere oplysninger findes i < *Informationscenter* > på vores hjemmeside < www.meyra.com >

Ramper og lifte

Bemærk rampens eller liftens betjeningsvejledning.

Bemærk rampens eller liftens producentspecifikationer.

Den maksimale pålæsningshøjde, som står anført på rampen, skal være større end højden (h på side 39) fra jorden op til lastfladen, f.eks. på en personbil.

Rampens eller liftens bæreevne skal være større end Micro el-scooterens tilladte totalvægt.

Når der bakkes op på ramper, er der fare for, at elkørestolen slår kolbøtter!

Persontransport i motorkøretøjer

Din individuelle Micro el-scooter er ikke godkendt som sæde til personbefordring i motorkøretøjer. – Læs mere i kapitel *Betydning af mærkaterne på Micro el-scooter* på side 31.

Transportsikring

Den aktuelle transportvirksomheds forskrifter og anvisninger skal følges. – Forhør dig om dem før transporten.

Micro el-scooteren skal opbevares og sikres på en sådan måde, at den ikke udgør nogen fare for dig og andre.

VEDLIGEHOLDELSE

Mangelfuld eller forsømt pleje og vedligeholdelse af Micro el-scooteren medfører en begrænsning af producentansvaret.

Servicearbejde

Følgende serviceplan indeholder retningslinjer for udførelse af servicearbejde.

- ➔ Denne vedligeholdelsesplan giver ingen oplysninger om det faktisk nødvendige arbejdsomfang, der er konstateret på Micro el-scooteren.

Serviceplan

HVORNÅR	HVAD	BEMÆRKNING
Inden kørsel	Generelt Kontrollér for fejlfri funktion.	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper.
	Kontrol af magnet- bremse Stil omskiftergrebet kørsel-/skubbedrift på køredrift.	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper. Hvis Micro el-scooteren kan skubbes, skal bremsen omgående sættes i stand af et autoriseret værksted. – Fare for uheld!
Hver 2. uge (afhængigt af samlet kørestrækning)	Stilleskruer Kontrollér, om skruer og møtrikker sidder godt fast.	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper. Stram de løsne stilleskruer forsvarligt. Opsøg et autoriseret værksted efter behov.
Hver 6-8. måned (afhængigt af samlet kørestrækning)	Hjulfastgørelse Kontrollér, at hjulmøtrikker eller -skruer sidder godt fast.	Udfør dette alene eller sammen med en hjælper. Spænd løsne hjulmøtrikker eller -skruer, og efterspænd efter 10 driftstimer eller 50 km. Opsøg et autoriseret værksted efter behov.
Hver 2. måned (afhængigt af samlet kørestrækning)	Kontrol af hjul	Udfør visuel kontrol selv eller sammen med en hjælper. Ved nedslidt dækmønster eller beskadigelse af hjulene skal et autoriseret værksted kontaktes med henblik på reparation.
Hver 6. måned (alt efter, hvor ofte kørestolen bruges)	Kontrollér Renhed. Generel tilstand.	Se kapitlet <i>Rengøring</i> på side 26. Udfør dette alene eller sammen med en hjælper.

HVORNÅR	HVAD	BEMÆRKNING
Producentens anbefalinger: Hver 12. måned (alt efter, hvor ofte kørestolen bruges)	Eftersyn Køretøj. Oplader.	Foretages af forhandleren.

Dæk

Dækkene er lavet af en gummiblanding, der på nogle underlag kan efterlade spor, der kun vanskeligt eller slet ikke kan fjernes (bl.a. kunststof-, træ- eller parketgulve, tæpper, gulvbelægning). Vi hæfter ikke for skader på underlag på grund af slid eller kemiske processer på dækkene.

Hjul

Beskadigede hjul skal omgående erstattes af nye hjul af forhandleren.

➔ Udskift altid hjulene parvis.

To hjul med forskellig slitage forringer Micro el-scooterens retningsstabilitet.

Sikringer

Hovedsikringen er udført som en automatsikring.

Hvis hovedsikringen er udløst, står grebet på automatsikringen (13 på side 36) på < OFF >.

➔ Ved hyppig udløsning af hovedsikringen eller andre funktionsfejl skal årsagen afhjælpes af en autoriseret forhandler.

Fejludbedring

FEJL	ÅRSAG	UDBEDRING
Betjeningsmodulets batterikontrol lyser ikke efter tilslutning.	Hovedsikringen er udløst. Grebet til hovedsikringen står på < OFF >.	Grebet til hovedsikringen sættes på < ON >. Ved gentagen udløsning af hovedsikringen skal den repareres på et autoriseret værksted.
	Betjeningsmodul defekt.	Skal repareres på sagkyndigt værksted.
	Stikforbindelsen til strømforsyningen er uden kontakt.	Kontrollér stikforbindelser.
	Batterierne er afladet for meget.	Skal repareres på sagkyndigt værksted.
Batteriindikatoren blinker, når der tændes.	Skiftearmen til køre-/skubbefunktion er sat til skubbefunktion.	Sving indstillingshåndtaget køre-/skubbefunktion i skubbefunktion.
	Joysticket er flyttet for tidligt.	Sluk Micro el-scooteren, og tænd den igen.
	Stikforbindelsen på et af drevene har ikke kontakt.	Kontrollér stikforbindelser.
	Fejl i elektronikken.	Skal repareres på sagkyndigt værksted.
	Ikke oplyste fejl.	Se kapitlet <i>Fejldiagnose</i> på side 23.

FEJLDIAGNOSE

Hhv. fejl og informationer vises med batteriindikator, indikatoren for den maksimale sluthastighed og justeringsfunktionernes indikator.

Fejlvisning ved hjælp af batteriindikatoren

I tilfælde af en **fejl** stoppes Micro el-scooteren for en sikkerheds skyld, og lyssegmenterne i batteriindikatoren (5 på side 36) *blinker hurtigt*. Antallet af blinkimpulser fortæller noget om den mulige fejlkilde.

Gør principielt følgende for at afhjælpe fejl:

1. Sluk for betjeningsmodulet.
2. Udfør handlingen i kolonnen *Afhjælpning*.
3. Tænd for betjeningsmodulet.

➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Tilslutning af betjeningsmodul* på side 10.

➔ Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, og Micro el-scooteren ikke kan bruges videre, bedes du henvende dig til et autoriseret værksted.

FEJL	ÅRSAG	UDBEDRING
1 blinkimpuls	Batteriet er afladet.	Lad straks batterierne op, og kontrollér evt. batteritilslutningerne.
2 blinkimpulser	Forbindelsen til venstre motor er afbrudt.	Kontrollér motortilslutningskabel, -stik og motor.
3 blinkimpulser	Den elektriske ledning til venstre motor er defekt (kortslutning).	Kontrollér motortilslutningskabel, -stik og motor.
4 blinkimpulser	Forbindelsen til højre motor er afbrudt.	Kontrollér motortilslutningskabel, -stik og motor.
5 blinkimpulser	Den elektriske ledning til den højre motor er defekt (kortslutning).	Kontrollér motortilslutningskabel, -stik og motor.
6 blinkimpulser	Startspærren er aktiveret. Kørespærren er en elektronisk sikkerhedsanordning, der forhindrer kørsel, når batteriopladeren er tilsluttet.	Fjern laderen fra batteriladestikket.
7 blinkimpulser	En system- eller joystickfejl.	Rør ikke ved joysticket under tilkoblingsfasen. – Sluk Micro el-scooteren, og tænd den igen.
8 blinkimpulser	Betjeningsmodul eller elektronik defekt eller systemfejl.	Kontrollér kabel og tilslutningsstik. – Sluk Micro el-scooteren, og tænd den igen.
9 blinkimpulser	Driftsforstyrrelse på motorens magnetbremser.	Stil håndtaget til køre-/skubbe-funktionen på kørsel.
10 blinkimpulser	Batterispændingen er for høj (kørsel ned ad bakke).	Kør kun meget langsomt ned ad bakke, og kontrollér evt. batteritilslutningerne.

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

Disse sikkerhedsanvisninger er et uddrag fra *sikkerheds- og generelle håndteringsanvisninger*, som findes på vores hjemmeside: < www.meyra.com > kan findes.

Stik ikke fingrene ind i åbne rammerør.

– Risiko for tilskadekomst!

Under brugen af Micro el-scooteren, også når den står stille og især på stigninger/fald, skal der indtages en sikker siddeposition. – Fare for uheld!

For at opnå en sikker siddeposition skal brugerens ryg flugte med rygpulstringen og brugerens bækken sidde helt tilbage på sædet.

Forflytning fra Micro el-scooteren på stigninger/fald må kun ske i nødstilfælde med hjælp fra en ledsager og/eller hjælper!
– Fare for uheld!

Du bør ikke ryge under brugen af Micro el-scooteren.

Ved direkte sollys, kan sædebetræk/puder, armlænsputer, benstøtter og håndtag opnå temperaturer på over 41 °C. – Der er fare for tilskadekomst ved kontakt med ubeskyttet hud! Undgå en sådan opvarmning ved at parkere din Micro el-scooter i skyggen.

Særlige fastgørelsespunkter til medtagne genstande er holderen til ganghjælpemidler og den valgfrie bagagekurv.

Ved fysiske begrænsninger, som f.eks. blindhed, kræves der en egnethedserklæring til selvstændig føring af Micro el-scooteren.

Forflytning til og fra sædet må kun foretages ved slukket Micro el-scooter og med omskiftergrebet for køre-/skubbefunktion sat i kørestilling!

Utilsigtet berøring af joysticket kan ellers få Micro el-scooteren til at sætte ukontrolleret i gang! – Fare for uheld!

Sluk ikke betjeningsmodulet under kørslen. Micro el-scooteren sættes derved ud af drift og stopper straks.

Ledsager

Ledsageren skal gøres opmærksom på alle evt. faresituationer, før han/hun begynder at hjælpe. De komponenter på din Micro el-scooter, som en ledsager tager fat i, skal kontrolleres for korrekt fastgørelse.

Forflytning fra Micro el-scooteren

Kør Micro el-scooteren så tæt som muligt hen til det sted, hvor du vil forflytte dig fra Micro el-scooteren.

- ➔ I den forbindelse skal anvisningerne i kapitel *Sikring af Micro el-scooteren* på side 8 og *Drej sædet* på side 16 følges.
- ➔ Vi anbefaler, at forflytning fra Micro el-scooteren udføres med hjælp fra en hjælper.

Opsamling af genstande

Undgå at hælde overkroppen langt fremad, til siden eller bagud, især ved opsamling eller aflægning af tunge genstande. – Fare for, at Micro el-scooteren slår rundt eller vælter, især ved høje sædehøjder (sædelift)!

Kørsel på skråninger, stigninger eller skrånende kørebane

Fra en bestemt kørebanehældning er velsikkerheden og bremse- og styrefunktion betydeligt nedsat på grund af reduceret vejgreb.

- ➔ Se kapitlet *Tekniske data* på side 28.

Læn dig aldrig til den lave side af skråninger og køreunderlag med sidehældning.

Undgå ændringer i køretilstanden i ryk (især ved kritisk indstillede kørselsparametre som f.eks. store forsinkelser).

Kør altid med lav hastighed, når du kører ned og op ad bakke.

Ekstreme stigninger og nedkørsler skal køres med tilpasset sluthastighed.

Undlad at skifte til skubbefunktion på stigninger og nedkørsler. De automatiske bremsere fungerer ikke i skubbefunktion.

Skub ikke Micro el-scooteren på nedkørsler eller stigninger.

Der er fare for at vælte ved kørsel i sving og ved vending på stigninger og nedkørsler.

Undgå at køre på opad- eller nedadgående terræn med utilstrækkelig vejbanebeskaffenhed.

Kør aldrig hurtigere end fodgængerhastighed.

Den bremsekraft, der kan overføres til kørebanen, er på nedkørsler væsentligt mindre end på plant underlag og reduceres yderligere af dårlige kørebaneforhold (f.eks. eks. vådhed, tilsudsning). En farlig udskridning af de bremsede hjul og en dermed forbundet uønsket kursafvigelse skal udelukkes ved at bremse forsigtigt og kontrolleret.

Tværhældende kørebaner får din Micro el-scooter til at dreje i retning ned ad skråningen. Denne afdrift skal du kompensere for ved at styre imod.

Forcering af forhindringer

Muligheden for at komme hen over forhindringer afhænger bl.a. af kørebanens hældning.

Det er forbudt at køre på trapper!

Enhver forcering af en forhindring udgør en risiko! – Væltefare for Micro el-scooteren.

Forcering af en forhindring er en særlig risikosituation, hvor der bl.a. skal tages hensyn til en kombination af sikkerhedsanvisninger vedrørende skråninger og køreunderlag med sidehældning.

Kør så vidt muligt uden om forhindringer, som f.eks. sporriller, skinner, kloakdæksler eller lignende farekilder.

Kør altid hen imod mindre forhindringer, f.eks. afsatser/kanter langsomt og i ret vinkel (90°). Kør hen over forhindringen fremadkørende med ca. 0,5 m tilløb og begge hhv. for- og baghjul samtidig. Ellers kan din Micro el-scooter hælde til siden, og du kan blive kastet ud af Micro el-scooteren.

Hold så stor en sikkerhedsafstand til afgrunde, trapper, skråninger, bredder osv., at der er tilstrækkelig plads til at reagere, bremse og vende.

Lad dig om muligt løftes ud af Micro el-scooteren og bæres til bestemmelsesstedet af en eller flere hjælpere.

Elektrisk anlæg

Forkerte og/eller u hensigtsmæssige ændringer i køreadfærden kan forringe sikkerheden for Micro el-scooteren og brugen af Micro el-scooteren. – Fare for uheld!

Den elektroniske styring af en Micro el-scooter må ikke modificeres.

Hvis Micro el-scooteren reagerer usædvanligt eller udfører ukontrollerbare køremånvær, skal joysticket straks bringes i neutralstilling, og/eller Micro el-scooteren skal straks slukkes.

Befordring i offentlige transportmidler

Din Micro el-scooter er ikke beregnet til personbefordring i offentlige transportmidler.

Kørsel i offentlig trafik

Din Micro el-scooter er ikke godkendt til kørsel i offentlig vejtrafik.

Rengøring

Micro el-scooteren må ikke spules med en højtryksrenser! – Fare for kortslutning!

Plastbeklædningerne angribes af ikke-ioniske tensider samt af opløsningsmidler og især alkoholer.

Polstringer og betræk er som regel forsynet med plejeanvisninger (plejeskilt).

➔ Bemærk kapitel *Betydning af symbolerne på vaskeanvisningerne* på side 31.

Ellers gælder følgende anvisninger:

- ➔ Rengør puderne med varmt vand og opvaskemiddel.
- ➔ Pletter kan fjernes med en svamp eller en blød børste.
- ➔ Vask genstridige pletter ved at anvende et almindeligt vaskemiddel.
- ➔ Må ikke vaskes! Undlad vask i vaskemaskine!

Skyl med rent vand, og lad det tørre.

Stellet og hjulene kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel. Derefter tørres omhyggeligt.

- ➔ Kontrollér stellet for korrosionsskader samt andre skader.
- ➔ De syntetiske materialer må kun rengøres med varmt vand og neutralt rengøringsmiddel eller brun sæbe.
- ➔ Hvis der anvendes et almindeligt kunststofrengøringsmiddel, skal producentens anvisninger følges.

Belysningsudstyret skal altid holdes rent, og dets funktionsdygtighed skal kontrolleres, før kørsel påbegyndes.

- ➔ De elektriske komponenter skal beskyttes mod vand og fugt!

- ➔ Fare for beskadigelse af elektronik og betjeningsfelt ved strålevand.

Ved pleje bør der anvendes silikonefri rengørings- og plejemidler på vandbasis.

- ➔ Følg producentens anvisninger for produktet.

Brug ikke aggressive rengøringsmidler, såsom opløsningsmidler eller hårde børster etc.

Yderligere oplysninger om rengøring og pleje finder du i < *Information center* > på vores website:

< www.meyra.com >.

Behandlet overflade

Der er bedst mulig beskyttelse imod korrosion på grund af en speciel overfladebehandling.

- ➔ Hvis lakken er ridset eller beskadiget på lignende måde, kan stederne udbedres med en lakstift, der kan fås hos os gennem forhandleren.

Hvis de bevægelige dele af og til smøres med lidt olie, forlænges deres funktion.

Desinficering

Hvis produktet benyttes af flere personer (f.eks. på plejehjem), skal der anvendes et almindeligt desinficeringsmiddel.

- ➔ Før desinficeringen skal polstringer og håndtag rengøres.
- ➔ Det er tilladt at spraye eller aftørre med godkendte og anerkendte desinfektionsmidler.

Oplysninger om kontrollerede og anerkendte desinfektionsmidler og -procedurer kan fås af din nationale myndighed for sundhedsbeskyttelse.

- ➔ Ved anvendelse af desinfektionsmidler kan der forekomme skader på overflader, hvilket kan forringe komponenternes funktion på længere sigt.
- ➔ Følg producentens anvisninger for produktet.

Reparation

Reparationer må principielt kun gennemføres af autoriserede forhandlere.

Istandsættelse

Ved udførelse af reparationsarbejde kan du have fuld tillid til din forhandler. Han/hun er blevet instrueret i udførelsen af dette arbejde.

Service

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, bedes du henvende dig til din forhandler, der kan rådgive dig samt udføre service og reparation.

Reserve dele

Sikkerhedsrelevante dele eller moduler må kun monteres af et sagkyndigt værksted. – Fare for uheld!

Reserve dele kan udelukkende fås hos forhandleren. I tilfælde af reparation må der kun anvendes originale reserve dele!

- ➔ Komponenter fra andre firmaer kan forårsage fejl.

En reservedelsliste med de tilhørende artikelnumre og tegninger ligger hos forhandleren.

For at få leveret de rigtige reserve dele er det altid nødvendigt også at angive kørestolens serie-nr. (SN)! Nummeret står på typeskiltet.

Ved enhver ændring/modificering af elkørestolen foretaget af den autoriserede forhandler skal kørestolens betjeningsvejledning vedlægges supplerende information, såsom monterings-/betjeningsanvisninger. Dato for ændringer skal registreres og anføres ved reservedelsbestillinger.


På denne måde forebygges fejlbestillinger ved senere reservedelsbestillinger.

Anvisninger vedrørende længere brugspauser

Ved længere pauser i anvendelsen er følgende foranstaltninger nødvendige:

- ➔ Frakobl batteriets tilslutningsstik.
 - ➔ Bemærk i den forbindelse også hhv. kapitel *Batteriopladning* på side 15 og *Batteripakken* på side 17.
- ➔ Opbevaringstemperaturerne skal overholdes.
 - ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Tekniske data* på side 28.

BORTSKAFFELSE

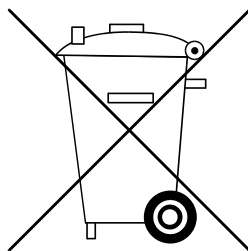

Bortskaffelse skal ske i henhold til nationalt gældende lovbestemmelser.

Kontakt kommunen for oplysninger om den lokale miljøstation.

Anvisninger til brug for forhandleren

Der kan rekvireres en vedligeholdelses- og servicemanual, som bl.a. indeholder følgende oplysninger:

1. Indstillinger, som kan udføres ved hjælp af værktøj.
2. Procedurebeskrivelser ved vigtige reparationer.
3. Bemærkninger om modelspecifikke ændringer.
4. En tjekliste til det årlige eftersyn.

Tjeklisten indeholder de funktionskontroller, der er nødvendige i forbindelse med eftersyn.

De indeholder retningslinjer for, hvordan inspektionsarbejdet skal udføres.

- ➔ Listen giver dog ingen oplysninger om den reelle og nødvendige pleje, køretøjet behøver.

Når den årlige inspektion er udført korrekt, skal dokumentationen for udført inspektion udfyldes i betjeningsvejledningen.

En skabelon til yderligere eftersynsdokumentation kan ved behov kopieres fra service- og vedligeholdelsesvejledningen. Den skal i så fald vedlægges betjeningsvejledningen.

Programmering af køreegenskaber

Køreegenskaberne for Micro el-scooteren kan indstilles ved hjælp af et programmeringsapparat.

- ➔ Bemærk den pågældende < service- og vedligeholdelsesvejledning >.

Køreegenskaberne for Micro el-scooteren bør regelmæssigt tilpasses de individuelle behov og den pågældende brugers læringsfremskridt.

- ➔ Programmeringen skal være tilpasset specielt til brugeren. Der skal tages højde for reaktionsevnen, helbredstilstanden samt fysiske og psykiske evner. Samråd med lægen eller terapeuten kan være en stor hjælp i denne forbindelse.
- ➔ Enhver ændring ved den fra fabrikkens side indstillede programmering kan udgøre en øget risiko for ulykker.
- ➔ Mulig fare for at vælte.

TEKNISKE DATA

Alle angivelser under < Tekniske data > gælder standardmodellen.

Måletolerance ± 15 mm, $\pm 2^\circ$.

Beregning af den maks. brugervægt:

Den tilladte totalvægt beregnes ud fra egenvægten for Micro el-scooteren og den maksimale brugervægt (personvægt).

Yderligere vægt pga. senere påmonterede dele eller bagage reducerer den maks. brugervægt.

Eksempel:

En bruger vil tage bagage på 5 kg med. Dermed reduceres den maks. brugervægt med 5 kg.

Dæktryk ved luftdæk

Det maks. dæktryk står på begge sider af dækket.

Dæktryk – styrehjul

Standard:

2,5 - 3,5 bar = 36 - 50 psi

Dæktryk - drivhjul

Standard:

3,0 - 4,0 bar = 44 - 58 psi

Ultraletløb:

6 bar = 87 psi

Højtryksdæk:

8 bar = 116 psi

Rækkevidde

Rækkevidden afhænger i høj grad af følgende faktorer:

- Batteritilstand
- Førervægt
- Kørehastighed
- Køreadfærd
- Kørebanens beskaffenhed
- Kørebetingelser
- Omgivelsestemperatur.

De oplyste nominelle data er realistiske under følgende omstændigheder:

- Omgivelsestemperatur 27 °C.
- 100 % nominel kapacitet på drivbatterier ifølge DIN-standard.
- Nye eller tilsvarende gode batterier med mere end 5 opladningscykluser.
- Nominel belastning på 100 kg.
- Uden gentagen acceleration.
- Plant, fast underlag.

Rækkevidden indskrænkes stærkt af:

- Dårlig ladekapacitet på batterierne
- Lave omgivelsestemperaturer.
- hyppig igangsætning og opbremsning,
- ældede drivbatterier,
- Tvungne nødvendige, hyppige styremålinger
- reduceret kørehastighed.

I praksis reduceres den rækkevidde, som fortsat kan opnås under "normale betingelser", til ca. 80 – 40 % af den nominelle værdi.

Køreegenskaber ved forcering af stigninger

Stigninger og strækninger med fald, der overstiger de tilladte værdier, må der af sikkerhedsmæssige årsager kun køres på uden fører (f.eks. ved ramper)!

Anvendte standarder

Elkørestolen er i overensstemmelse med standarden:

- EN 12184: 2014
- ISO 7176-8: 2014

Modellerne er tildelt anvendelsesklasse A i overensstemmelse med standarden EN 12184.

Vores anvendte moduler og komponenter opfylder EN 1021-2 med hensyn til bestandighed over for antændelse.

Angivelser efter ISO 7176-15 for model 1.064/1.06424

	min	maks
Total længde	760 mm	760 mm
Total bredde	600 mm	700 mm
Totalmasse	170 kg	170 kg
Brugermasse (inkl. nyttelast)	120 kg	120 kg
Den tungeste dels masse	25 kg	25 kg
Faktisk sædedybde	400 mm	400 mm
Faktisk sædebredde	470 mm	570 mm
Sædefladens højde ved forkanten (uden sædepude)	370 mm	450 mm
Sædevinkel	4°	4°
Ryglænsvinkel	18°	18°
Ryghøjde	370 mm	450 mm
Fodplade hen til sæde (underbenets længde)	370 mm	450 mm
Statisk stabilitet nedkørsel	6°	6°
Statisk stabilitet opkørsel	6°	6°

	min	maks
Statisk stabilitet sidelæns	6°	6°
Dynamisk stabilitet opkørsel	3°	3°
Armlænsøjde fra siddeflade	180 mm	180 mm
Ryglæn til forkant af armlæn	290 mm	290 mm
Overvindelse af forhindringer	15 mm	15 mm
Min. venderadius	560 mm	560 mm
Tophastighed ved fremadkørsel	6 km/t	6 km/t
Korteste bremsevej fra tophastighed	1000 mm	1000 mm
Rækkevidde med blybatterier	– km	10 km
Rækkevidde med litium-ion-batterier	– km	17 km

Yderligere tekniske data for model 1.064/1.06424

	min	maks
Støjniveau		70 dB(A)
Kapslingsklasse		IP X4
Vendeplads	900 mm	900 mm
Drevstyring		24 V / 50 A
Fremdrifteffekt (6 km/t)	2x 200 W	2x 200 W
Hovedsikring		30 A
Nyttelast	3 kg	3 kg
Akselbelastning foran	30 kg	30 kg
Akselbelastning bagpå	140 kg	140 kg
Frihøjde, motor		50 mm

	min	maks
Frihøjde, batteri-pakke		60 mm
Egenvægt (med batteripakke)	47 kg	53 kg
Egenvægt (uden batteripakke)	38 kg	43 kg
Total højde	880 mm	960 mm
Samlet højde med sædeløft	880 mm	980 mm
<u>Transportmål</u>		
Længde	760 mm	760 mm
Bredde (uden arm-læn)	600 mm	600 mm
Højde uden armlæn	740 mm	740 mm
<u>Klimatekniske oplysninger</u>		
Omgivelsestempe-ratur (med blybat-terier)	-25 °C til +50 °C	
Omgivelsestempe-ratur (med liti-um-ion-batterier)	-20 °C til +60 °C	
Opbevaringstempe-ratur med drivbat-terier (med blybat-terier)	-25 °C til +50 °C	
Opbevaring-temperatur med drivbatterier (med litium-ion-batterier)	-20 °C til +30 °C (maks. 1 år)	
Opbevaringstempe-ratur uden drivbat-terier	-40 °C til +65 °C	
<u>Svinghjul</u>		
120 x 40 mm (5")	punkterfri	
<u>Drivhjul</u>		
220 x 80 mm (9")	punkterfri	
<u>Drivbatterier</u>		

	min	maks
2 x 12 V 12 Ah (5 h) / 14 Ah (20 h)	vedligeholdelsesfri	
Maks. batterimål (LxBxH)	152 x 99 x 103 mm	
Ladestrøm, oplader- type: HP0060W(B)	2 A	
2 x 24 V 10,4 Ah	Lithium-ioner	
Maks. batterimål (LxBxH)	125 x 122 x 74 mm	
Ladestrøm, oplader- type: HP0060W(L2)	2 A	
Ladetemperatur	0 °C til +45 °C	

Betydning af symbolerne på vaskeanvisningerne

(symbolerne er i overensstemmelse med europæisk standard)



Finvaskeprogram ved den angivne maksimale vasketemperatur i °C



Normalvaskeprogram ved den angivne maksimale vasketemperatur i °C



Håndvask



Må ikke udsættes for blegemidler



Ikke egnet til tørretumbler



Må ikke stryges




Må ikke kemisk renses

Betydning af mærkaterne på Micro el-scooter



Læs betjeningsvejledninger og vedlagt dokumentation.

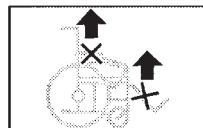

Micro el-scooter må ikke løftes i armlænene eller beklædningen. Kørestolen må ikke løftes i dele, der kan afmonteres.




Kørefunktion



Skubbefunktion



Skub kun kørestolen på plant underlag.

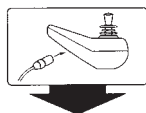

Oplysning om opladningsstik



Produktet er **ikke** godkendt som sæde i bil.



Advarsel mod risiko for klemning. – Stik ikke hænder/arme ind imellem komponenterne

Forklaring til symbolerne på typeskiltet



Produktet er **ikke** godkendt som sæde i bil.



Medicinsk udstyr



Producent



Bestillingsnummer



Serienummer




Produktionsdato



Till. brugervægt



Till. totalvægt

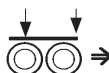

Till. akseltryk



Till. stigning



Till. fald

max. ... km/h

Till. maks. hastighed



Produktet er godkendt som sæde i bil.



Maks. tilladt brugervægt, når produktet er godkendt som sæde i et motorkøretøj.

ANSVAR/GARANTI

Manglende overholdelse af betjeningsvejledningen samt uprofessionel udførelse af vedligeholdelsesarbejde og især af tekniske ændringer og udvidelser (påmonterede dele) uden vores samtykke medfører bortfald af såvel ansvars- og garantikrav som af almindeligt produktansvar.

Nationale ansvars- / garantibetingelser mellem dig og din fagforhandler kan afvige fra de i kapitlet angivne betingelser.

For dette produkt påtager vi os det lovpligtige ansvar som en del af vores generelle forretningsbetingelser samt evt. øvrige udspecificerede/aftalte garantier. I forbindelse med krav om ansvar og garanti bedes du kontakte din forhandler medbringende følgende ANSVARS-/GARANTIKUPON samt de nødvendige oplysninger om model, følgeseddel-nr. med leveringsdato og serienummer (SN).

Serienummeret (SN) kan aflæses på typeskiltet.

Anerkendelse af ansvars- og garantikrav forudsætter altid en korrekt anvendelse af produktet, anvendelse af originale reservedele fra forhandlere samt regelmæssig udførelse af vedligeholdelse og kontrol.

Garantien dækker ikke skader på overfladen, hjulenes slanger og dæk, beskadigelser som følge af løsnede skruer eller møtrikker, ødelagte fastgøringshuller som følge af hyppigt monteringsarbejde.

Garantien dækker heller ikke skader på drev og elektronik som følge af usagkyndig rengøring med dampstråleudstyr eller som følge af, at komponenterne forsætligt eller uforsætligt er blevet udsat for vand.

Fejl på grund af strålingskilder som f.eks. mobiltelefoner med stor sendeeffekt, HiFi-anlæg og andre kraftige støjkluder uden for normspecifikationerne kan ikke gøres gældende som ansvars- eller garantikrav.

Denne betjeningsvejledning skal som en integreret del af produktet medgives ved bruger- eller ejerskifte.

Evalueringen af vore produkter kan ske ved hjælp af vores < *Information center* > (info-center) Område < *PMS* > på vores hjemmeside < www.meyra.com >.

Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med fremskridt for øje.



Produktet opfylder kravene i forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

KONTROLDOKUMENTATI- ON

Køretøjets data:

Model:

Følgeseddel-nr.:

Serie-nr. (SN):

Anbefalet sikkerhedsinspektion 2. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedsinspektion om 12 måneder

Dato: _____

Anbefalet sikkerhedsinspektion 1. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedsinspektion om 12 måneder

Dato: _____

Anbefalet sikkerhedsinspektion 3. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedsinspektion om 12 måneder

Dato: _____

Anbefalet sikkerhedsinspektion 4. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedsinspektion om 12 måneder

Dato: _____

Anbefalet sikkerhedsinspektion 5. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedsinspektion om 12 måneder

Dato: _____

Ansvar- / garantikupon

Bedes udfyldt! Kan efter behov kopieres, og kopien sendes til forhandleren.

Ansvar/garanti

Modelbetegnelse:

Følgeseddel-nr.:

SN (se typeskiltet):

Leveringsdato:

Forhandlerens stempel:

Kontroldokumentation ved overdragelse

Køretøjets data:

Serie-nr. (SN):

Model:

Følgeseddel-nr.:




Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____




Sted, dato: _____


Næste sikkerhedsinspektion om 12 måneder

Dato: _____

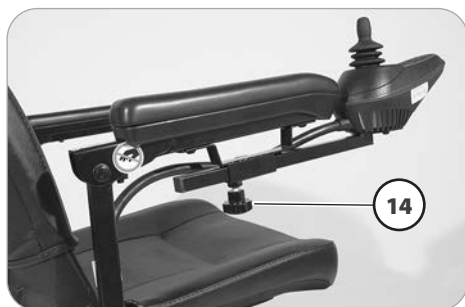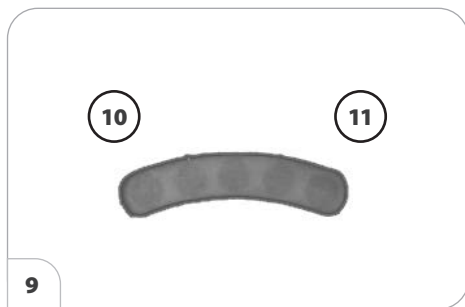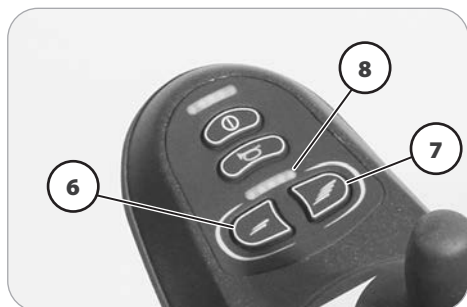




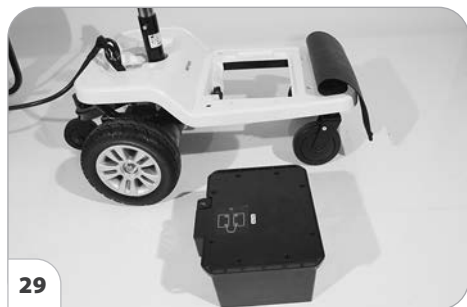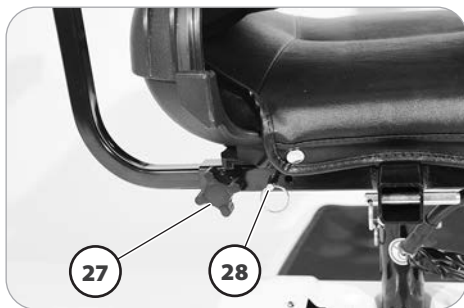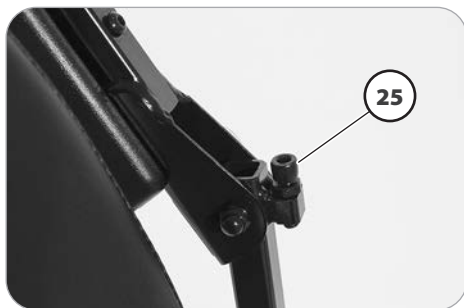

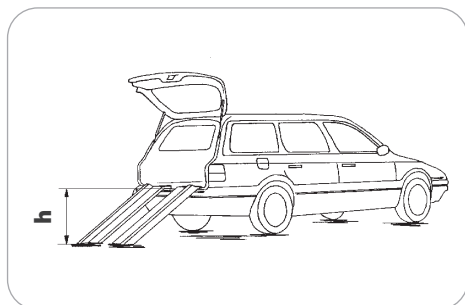



Din forhandler

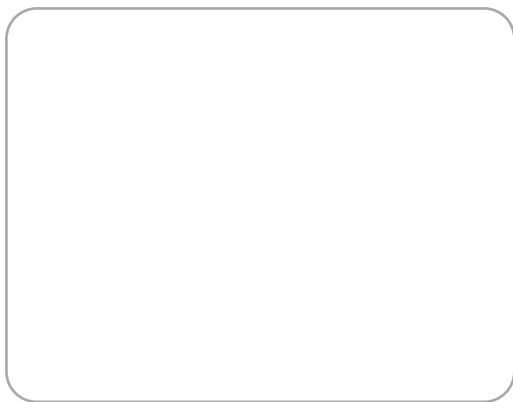

Original
Betjeningsvejledning

MEYRA GmbH Kleiststraße 49 | 32457 Porta Westfalica | Tyskland
info@meyragroup.com | Tel.: +49 571 93292 - 311 | Fax: +49 571 93292 - 9311 | www.meyra.de

2026-04 Tekniske ændringer af vores produkter samt trykfejl
i vores tryksager forbeholdes.

Delnr. 205 344 906